

SNADNÉ POUŽITÍ



ŠIROKOSPEKTRÝ
DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK
NA NEINVAZIVNÍ
ZDRAVOTNICKÉ
PROSTŘEDKY
A LESKLÉ POVRCHY

Meliseptol® New Formula

RYCHLÁ A ÚČINNÁ DEZINFEKCE POVRCHŮ



Meliseptol® New Formula

RYCHLÁ A ÚČINNÁ ALKOHOLOVÁ DEZINFEKCE POVRCHŮ BEZ OBSAHU DALŠÍCH MIKROBIÁLNĚ ÚČINNÝCH LÁTEK

Meliseptol® New Formula je širokospektrý dezinfekční prostředek na neinvazivní zdravotnické prostředky a lesklé povrchy.

VLASTNOSTI:

- Snadné použití otřením, případně postřikem
- Široké spektrum účinku
- Účinný během 1 minuty
- Dobré čisticí vlastnosti, vhodný i na lesklé kovové a skleněné povrchy
- Široké spektrum účinnosti: baktericidní, účinný na obalené i neobalené viry, tuberkulocidní, mykobaktericidní, fungicidní
- Příjemná citronová vůně
- Bez obsahu přídavných účinných látek
- Vhodný na neinvazivní zdravotnické prostředky, jako jsou např. vyšetřovací křesla, pracovní plochy nebo vybavení operačních sálů

SLOŽENÍ:

100 g roztoku obsahuje: 44,0 g ethanolu
Pomocné látky: 5% neionogenních tenzidů, parfém, purifikovaná voda.

Meliseptol® New Formula	Katalog. č.
Láhev 250 ml spray	19763
Láhev kulatá 1 000 ml	19764
Kanystr 5 l	19758
Rozstříkovací hlavice na 1 000 ml láhev	

Upozornění: Používejte dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě nebo na informačním listu.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Meliseptol® New Formula nalijte z láhve na jednorázovou utěrku a otřete povrch tak, aby byl plně smočen. Nebo postříkejte povrch, zejména obtížně dostupná místa sprayem. Dbejte na dokonalé smočení celého dezinfikovaného povrchu. Nechte působit min. 1 minutu. Nechte zaschnout, neutírejte do sucha. Pokud dezinfikujete elektrické zařízení, nejdříve jej vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout. Jestliže to není z provozních důvodů možné, ujistěte se, že nemůže dojít k zapnutí zařízení během dezinfekce.
- Meliseptol® New Formula nepoužívejte na povrchy citlivé vůči alkoholu, jako jsou např. akrylátová skla.
- V případě viditelného znečištění proveďte dezinfekci ve dvou krocích: nejprve odstraňte znečištění z povrchu jednorázovou utěrkou napuštěnou roztokem Meliseptol® New Formula; ve druhém kroku vydezinfikujte povrch výše uvedeným způsobem.



B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz