



NA CITLIVÉ  
MATERIÁLY



ÚČINNÝ BĚHEM 1 MINUTY  
TESTOVANÁ VYNIKAJÍCÍ  
MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA

# Meliseptol<sup>®</sup> Foam pure

RYCHLÁ PĚNOVÁ DEZINFEKCE  
CITLIVÝCH POVRCHŮ



# Meliseptol® Foam pure

## RYCHLÁ PĚNOVÁ DEZINFEKCE CITLIVÝCH POVRCHŮ

Přípravek je vhodný i pro zdravotnické prostředky s citlivými povrchy, jako jsou vybavení operačních sálů, příslušenství ultrazvukových přístrojů, infuzní pumpy, speciální nemocniční lůžka, zubařská křesla, povrchy z umělé kůže v nemocnicích a ordinacích.

### VLASTNOSTI:

- Rychlá a efektivní dezinfekce
- Testovaná vynikající materiálová kompatibilita
- K okamžitému použití
- Účinný během 1 minuty
- Nízký obsah alkoholu
- Nevytváří aerosol
- Bez parfemace
- Doporučuje se pro čištění a dezinfekci přístrojů Perfusor® Space a Infusomat® Space
- Vhodný do B. Braun Wipes zásobních systémů
- Použitelnost systému 4 týdny

### SLOŽENÍ:

100 g přípravku obsahuje:  
1-propanol 17 g; didecyldimethylamoniumchlorid 0,23 g;  
neionogenní tenzidy < 5%; purifikovaná voda

### NÁVOD K POUŽITÍ

- Elektrické přístroje vypněte, odpojte od proudu.
- Naneste Meliseptol® Foam pure v dostatečném množství a rozetřete přípravek na celý povrch tak, aby byl dostatečně smočen, nechte zaschnout. Vyčkejte uplynutí doporučené expozice. Těžko dostupné oblasti lze pouze postříkat přípravkem Meliseptol® Foam pure. Nestříkejte přípravek do otvorů na zařízeních.
- Vizuálně čisté povrchy jsou takto čištěny a dezinfikovány v jednom kroku.
- V případě viditelné kontaminace je třeba provést postup ve dvou krocích:
  - a) nejprve odstraňte kontaminaci ubrouskem na jedno použití nasáklým přípravkem Meliseptol® Foam pure
  - b) poté proveďte dezinfekci dalším nanesením přípravku a jeho rozetřením novým ubrouskem.
- Před použitím zařízení nechte povrch zcela uschnout

Meliseptol® Foam pure	Katalog. č.
Láhev s aplikátorem pěny 750 ml	19797
Kanystř 5 l	19289

**Upozornění:** Používejte dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě nebo na informačním listu.

### MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA OVĚŘENA:

- Akrylátová skla, Makrolon
- Latex, guma, silikon, koženka
- Ultrazvukové sondy zn. Philips, Hitachi, ALOKA
- Konzole zn. GE
- Inkubátory
- Věže na operačních sálech
- Klávesnice, myši, monitory a další příslušenství
- Perfusor® Space a Infusomat® Space



B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika  
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz