

Cyto-Set® – Příprava léku



1

Příprava léku v laminárním boxu.



2

1. Při použití aplikační soupravy Cyto-Set® Mix opatřené hrotem s ventilem zavřete uzávěr zavzdušnění.
2. Vbodněte trn do infuzní nádoby, celou linku naplňte roztokem a propláchněte ji.



3

1. Uzavřete hadicovou svorku umístěnou v blízkosti bezjehlového konektoru – lék se ředí v infuzní láhvi, nikoliv v hadičce setu Cyto-Set® Mix.
2. Připravenou injekční stříkačku připojte k bezjehlovému konektoru za pomoci úchopové destičky. Ventil se otevře automaticky.



4

1. Vstříkněte lék do infuzní nádoby.
2. Cytostatikum důkladně promíchejte tak, že roztok jednou nebo dvakrát aspirujete zpět do stříkačky.



5

Bezjehlový konektor opatřete červenou koncovkou – označíte tím, že vstup byl použit. Svorka zůstává uzavřena.



6

Lék je připraven pro transport na oddělení.



Příprava léku



Transport



Podávání léku



Likvidace

Cyto-Set® – Příprava léku



7

Zavedení trnu infuzního setu do nádoby s infuzním roztokem

1. Uzavřete ventil zavzdušnění na trnu infuzního setu.
2. Vbodněte trn do nádoby s infuzním roztokem.
3. Napusťte infuzní roztok do setu, kapací komůrku přitom držte dnem vzhůru.
4. Otevřete regulační hadicovou svorku a kapací komůrku naplňte alespoň ke kroužku.



8

Napouštění a proplach setu Cyto-Set® Infusomat® Space

1. Pokud používáte aplikační soupravu Cyto-Set® Infusomat® Space, držte segment vkládaný do pumpy při napouštění obráceně.

Připojení setu Cyto-Set® Infusion / Infusomat® Space k pacientovi

2. Otevřete regulační hadicovou svorku a nechte protékat proplachovací roztok.



9

Připojení 1. soupravy Cyto-Set® Mix

Odstraňte ochranný uzávěr bezjehlového konektoru na hlavním infuzním setu a uzávěr PrimeStop Cap na setu Cyto-Set® Mix. Našroubujte zelený konektor linky Cyto-Set® Mix na bezjehlový konektor. Pokud ucítíte „zacvaknutí“, jsou oba sety bezpečně spojeny.



10

Zahájení infuze s lékem

1. Uzavřete bílou svorku na hlavním infuzním setu.
2. Otevřete bílou svorku na setu Cyto-Set® Mix.



11

Propláchnutí hlavního infuzního setu

1. Po vyprázdnění infuzní nádoby s léčivem uzavřete svorku na setu Cyto-Set® Mix v blízkosti bezjehlového konektoru.
2. Otevřete bílou svorku na hlavním infuzním setu a linku propláchněte.



12

Připojení 2. soupravy Cyto-Set® Mix

1. Uzavřete svorku na hlavním infuzním setu.
2. Otevřete svorku na dalším setu Cyto-Set® Mix.
3. Prostřednictvím bezjehlových konektorů můžete připojit až čtyři sety Cyto-Set® Mix.



13

Před každou výměnou infuze s lékem propláchněte hlavní infuzní set.



14

Likvidace

Po poslední infuzi léku znovu propláchněte hlavní infuzní set. Celý uzavřený systém lze odpojit od žilní kanyly.

Set je pak připraven k likvidaci jako uzavřený systém.