



BEZPEČNĚ ÚČINNÝ  
V RIZIKOVÝCH  
SITUACÍCH



TESTOVÁNO  
NA NEJŠIRŠÍ SPEKTRUM  
MIKROORGANISMŮ

BEZ OBSAHU PARFÉMU  
A BARVIV

PLNĚ VIRUCIDNÍ BĚHEM 30 S

## Softa-Man<sup>®</sup> acute

ALKOHLOVÝ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK  
PRO HYGIENICKOU A CHIRURGICKOU DEZINFEKCI  
RUKOU PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PODMÍNKY



# Softa-Man<sup>®</sup> acute

## RYCHLÝ ŠIROKOSPEKTRÝ ALKOHOLOVÝ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA RUCI NEJEN PRO RIZIKOVÉ OBLASTI, ZAJIŠŤUJÍCÍ VYSOKOU MÍRU BEZPEČNOSTI PŘI ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

Softa-Man<sup>®</sup> acute je moderní přípravek k okamžitému použití pro dezinfekci rukou pro všechny rizikové oblasti v nemocnici i mimo ni, jako jsou např. infekční oddělení, laboratoře, JIP, ARO, ambulance nebo rychlá zdravotnická pomoc včetně transportu osob, u nichž je virologický stav neznámý, v nouzových situacích na letištích, v azylových domech, při cestování do subtropických a tropických rizikových oblastí apod.

### VLASTNOSTI:

- Široké spektrum účinnosti: baktericidní (včetně MRSA), tuberkulocidní, mykobaktericidní, levurocidní, účinný na obalené i neobalené viry
- **Širokospektrální účinnost během 30 sekund**
- Složení bez parfémů a barviv *snižuje riziko podráždění a senzibilizace*
- Dermatologicky testován: Náročné dermatologické testy včetně opakovaných epicutánních testů vyloučily jak okamžité iritační, tak postupné senzibilizující účinky přípravku
- Nízký bod vzplanutí

### SLOŽENÍ:

100 ml přípravku obsahuje:

Účinné látky: ethanol 45 g (100%), propan-1-ol 18 g (Ph.Eur.)

Pomocné látky: čištěná voda, Macrogol 4000, butan-2-on, octyldodecanol (Ph.Eur.), glycerin, kyseliny fosforečná (85%) a další přísady.

Softa-Man <sup>®</sup> acute	Katalog. č.
Lahvička 100 ml	19113*
Láhev 500 ml	19117
Láhev 1 000 ml	19115
Kanistr 5 l	19119*

**Upozornění:** Používejte dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě nebo na informačním listu.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

#### Hygienická dezinfekce rukou

Minimálně 3 ml neředěného přípravku Softa-Man<sup>®</sup> acute naneste na suché ruce a důkladně vtírejte do zaschnutí. Ruce udržujte celé zvlhčené přípravkem minimálně 20 s.

#### Chirurgická dezinfekce rukou

5 ml neředěného přípravku Softa-Man<sup>®</sup> acute naneste na suché ruce a předloktí a vtírejte. Postup proveďte dle standardu chirurgické dezinfekce. Dbejte na to, aby ruce a předloktí byly po celou doporučenou dobu vlhké. Poté nechte dokonale zaschnout. Expozice pro chirurgickou dezinfekci rukou 60 s.



B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika  
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz