



Meliseptol® Wipes ultra

DEZINFEKČNÍ UBROUSKY BEZ ALKOHOLU

Meliseptol® Wipes Ultra

VŠESTRANNÉ A BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Utěrky bez obsahu alkoholů a aldehydů Meliseptol® Wipes ultra se používají na čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků. Díky složkám, které se nefixují na organickou kontaminaci, jsou zvláště vhodné pro čištění a dezinfekci ultrazvukových sond přicházejících do kontaktu se sliznicemi (např. po vaginálním vyšetření).

Meliseptol® Wipes ultra je plně virucidní a sporicidní (c. diff.), takže je obzvláště vhodný i pro finální dezinfekci povrchů semikritických zdravotnických prostředků.

VLASTNOSTI:

- Virucidní a sporicidní účinnost (c. diff.)
- Účinnost prokázána i metodou na 4 polích
- Sporicidní účinnost již za 2 minuty
- Použitelnost 60 dní od otevření
- Vhodná kombinace s Meliseptol® Wipes sensitive
- Vylepšený uzavřený zásobník s "Safe-lock" uzávěrem

SLOŽENÍ:

100 g impregnační tekutiny oshuje:
0,4 g alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride,
0,2 g didecyldimethylammonium chloride,
5% neogenních tenzidů, parfém

NÁVOD K POUŽITÍ

Proveďte dezinfekci rukou a navlékněte si rukavice.
Před dezinfekcí odstraňte všechnu viditelnou kontaminaci (např. pomocí Meliseptol® Wipes sensitive).

Povrchy bez viditelného znečištění otřete utěrkou Meliseptol® Wipes ultra tak, aby byly zcela smočeny a udržujte je vlhké dokud neuplyne předepsaná expozice – neutírejte do sucha. Opláchněte nebo otřete povrch důkladně vodou (podle druhu zdravotnického prostředku).
Nebo opět otřete utěrkou Meliseptol® Wipes sensitive.

Meliseptol® Wipes Ultra	Katalog. č.
Dóza, 100 ubrousků	19810

Upozornění: Používejte dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě nebo na informačním listu.



B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz