


NÁVOD NA POUŽITIE

SCHODÍK DO VANE

4055

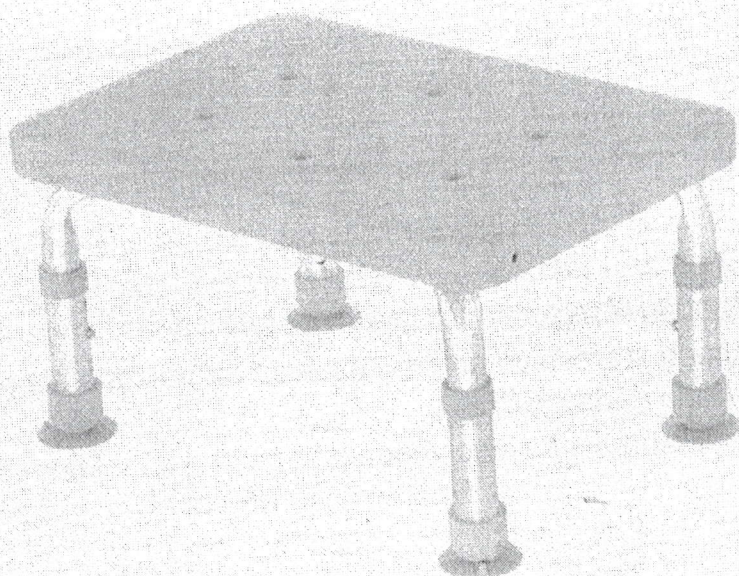

CE

 Distribútor na Slovensku:
DMA Praha s. r. o. – organizačná zložka
Pri Rajčianke 2896/33, 010 01 Žilina

 dma@dmapraha.sk
 www.dmapraha.sk

 +421 903 514 256

Výrobca: AVIVA d.o.o, Celjska cesta 4, 732 52, Rogatec, Slovinsko

POUŽITIE

Schodík do vane je súčasťou rady kompenzačných pomôcok, určených pro telesne postihnuté osoby a osoby so zníženou schopnosťou mobility. Svoje využitie nachádza hlavne tam, pacient nie je vzhľadom k svojmu zdravotného stavu schopný prekonávať väčšie výškové rozdiely. Konštrukcia uľahčuje pacientom vojsť do vane a eliminuje možné riziko pri týchto úkonoch a výrazným spôsobom tak zvyšuje jeho sebestačnosť.

POPIS

Konštrukcia schodíka 4055 je vyrobená z odľahčených duralových trubiek, ktoré sú v spodnej časti doplnené protišmykovými nadstavcami s prísavkou, čím výrazne prispievajú k zvýšenej stability a bezpečnosti. Nášlapná plastová časť má protišmykovú úpravu a je vybavená sedacou plochou s otvormi pre odtok vody. Oporné nohy umožňujú výškové nastavenie sedačky (viď technické parametre).

TECHNICKÉ PARAMETRE

Šírka schodíka: 42 cm

Hĺbka schodíka: 28,5 cm

Výška schodíka: 21-26 cm

Nosnosť schodíka: 136 kg

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred používaním schodíka si starostlivo prečítajte návod na použitie a v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte vášho dodávateľa.

Pred používaním schodíka konzultujte jeho vhodnosť s ošetrojúcim lekárom.

Schodík nepreťažujte a neprekračujte maximálnu nosnosť (viď technické parametre).

Pri montáži a nastavení schodíka postupujte opatrne, aby nedošlo k zachyteniu a úrazu prstov.

Pred každým použitím sa presvedčte, či je stupienok suchý a či sú z neho odstránené zbytky mydla, popr. ďalších toaletných alebo čistiacich prostriedkov.


Pre väčšiu bezpečnosť odporúčame kombinovať s protišmykovou podložkou a držadlom.

OBSAH BALENIA

Uistite sa, či ste dostali všetky časti schodíka - plastový schodík so štyrmi výškovo nastaviteľnými nohami s protišmykovými nadstavcami a skrutky s podložkami.

MONTÁŽ SCHODÍKA


Položte plastovú nášlapnú plochu hornou stranou na podložku. Priložte obidve nohy na schodík v poradí a orientáciou tak aby do seba zapadli a súhlasili čísla na nohách a na schodíku, tzn. 1-1, 2-2 (viď obr.). Nohy zafixujte a pevne dotiahnite pomocou priložených skrutiek.

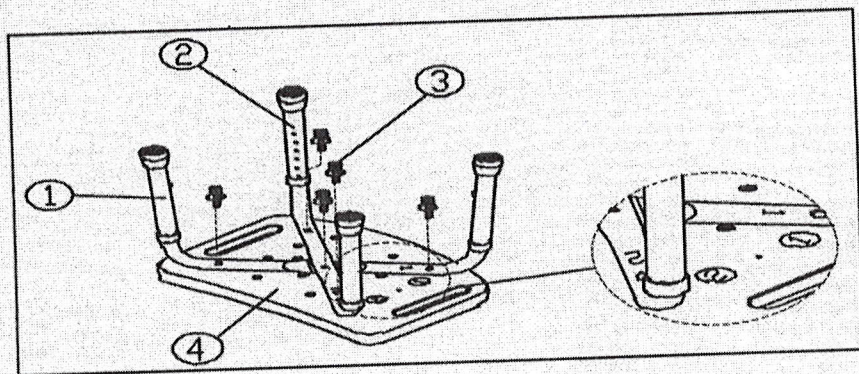


Montáž schodíka

NASTAVENIE VÝŠKY SCHODÍKA

Pre nastavení výšky schodíka stlačte z oboch strán poistku (A) a ťahom/tlakom nastavte požadovanú dĺžku nohy. Poistku potom nechajte samovoľne zapadnúť do zvoleného otvoru. Tento postup opakujte pri všetkých štyroch nohách, ktoré musia byť nastavené rovnako.

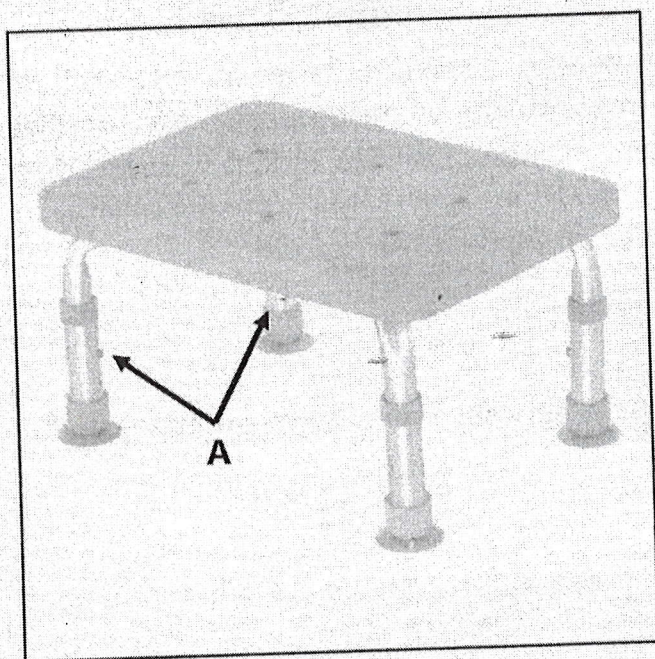


Umiestnenie aretačných poistiek

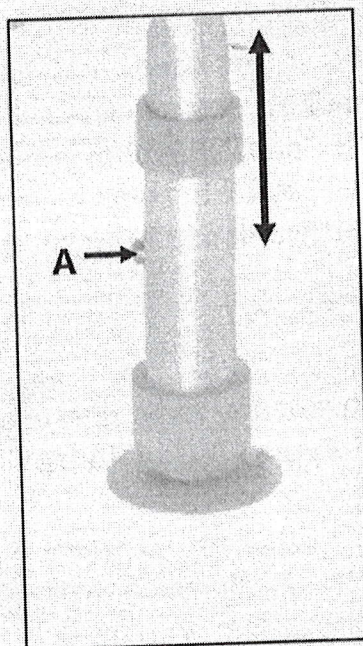
Stlačte aretačnú poistku
a nastavte dĺžku nohy

INŠTALÁCIA SCHODÍKA

Schodík položte na zvolené miesto a tlakom prostredníctvom prísaviek (1) zaistíte jeho polohu a stabilitu. K uvoľneniu a zdvihnutiu schodíka sú jednotlivé prísavky vybavené tiahlo (2), po ktorého odtiahnutí prísavku uvoľníte.

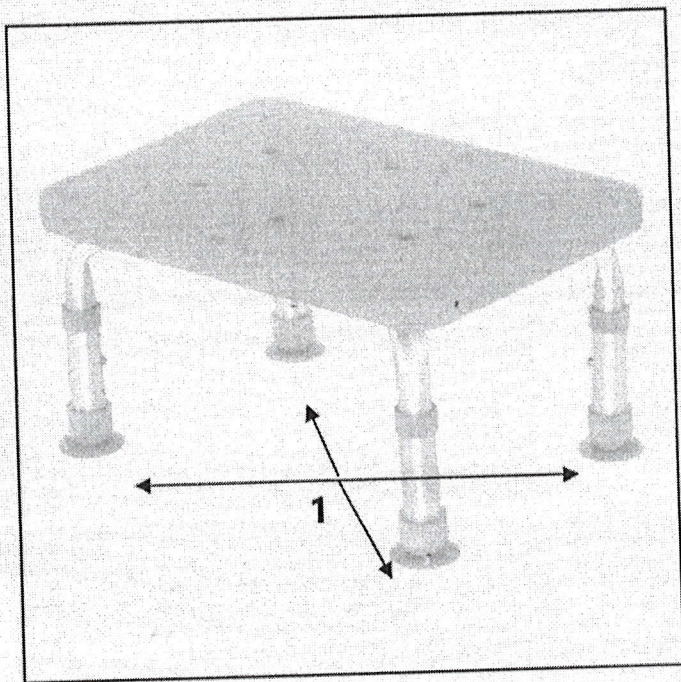

Protišmykové prísavky

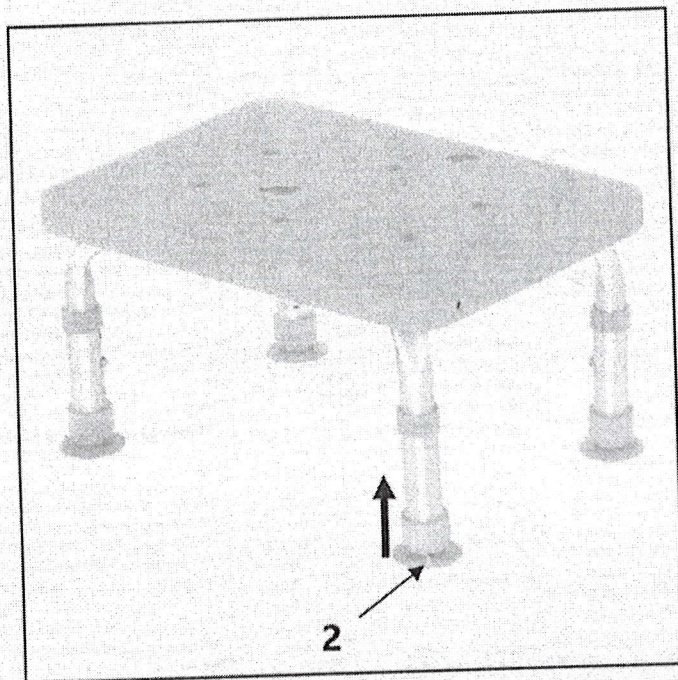

Tiahlo k uvoľneniu protišmykových prísaviek

ÚDRŽBA

Schodík môžete čistiť a udržiavať umývaním vodou, použitím bežných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá a nespôsobujú mechanické narušenie povrchu. Po použití alebo následnom očistení stoličku riadne osušte. Pre zachovanie maximálnej stability odporúčame pravidelne kontrolovať polohu všetkých istiacich prvkov, popr. odstrániť mechanické nečistoty všetkých častí.

SERVIS A OPRAVY

V prípade nutnosti odstránenia vady alebo vykonania servisu, kontaktujte autorizovaného predajcu, ktorý Vám poskytne všetky informácie.