

NÁVOD NA POUŽITIE

MADLO Z POCHRÓMOVANEJ OCELE 2197031-41-61-82



Sucesores de Manuel García S.L.

CIF B12321162

Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain

Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com

www.garcia1880.com

Návod na použitie

MADLO 2197031 / 2197041 /2197061 /2197082

PREDPISY

Tento výrobok je zdravotnícka pomôcka triedy I a je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach. Pri likvidácii obalu a výrobku prísne dodržiavajte právne predpisy vašej obce.

URČENÉ POUŽITIE

Pomocná pomôcka na umývanie a kúpanie. Technická pomôcka, ktorá poskytuje oporu osobe so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou, ktorá nemôže bežne používať sprchu, na uľahčenie vstávania a zaistenie bezpečnosti.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vyrobené z pochrómovanej ocele
- Rozmery
 - o 2197031: 31 cm
 - o 2197041: 41 cm
 - o 2197061: 61 cm
 - o 2197082: 82 cm
- Priemer rúry: 32 mm
- Odporúčané na vnútorné použitie
- Maximálna nosnosť: závisí od steny/dlaždíc, na ktoré sa madlo inštaluje

INŠTALÁCIA

1. Pred inštaláciou sa uistite, že povrch je čistý a suchý.
2. Kotvy na koncoch sú predvŕtané pre montáž na stenu.
3. Skrutky nie sú súčasťou balenia*. Tieto budú závisieť od typu steny alebo dlaždíc, na ktoré sa madlo inštaluje. Kontaktujte, prosím, svojho inštalátora.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Tieto madlá sú určené na pomoc s pohybom a nie sú určené na podopretie plnej hmotnosti tela.

KONTRAINDIKÁCIE

Neinštalujte tieto madlá pre nevidiacich alebo zrakovo postihnutých osôb. ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte skrutky, aby ste sa uistili, že sú bezpečne utiahnuté. Ak sú niektoré uvoľnené, ihneď ich vymeňte. Kontaktujte inštalátora, aby ich vymenil.
- Nevykonávajte žiadne úpravy (mechanické zmeny), aby ste predišli ohrozeniu bezpečného používania.

ODPORÚČANIA NA STAROSTLIVOSŤ A UMÝVANIE

- Na čistenie používajte neutrálny čistiaci prostriedok a teplú vodu. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
- Odporúča sa po každom použití rúkovač osušiť čistou, mäkkou handričkou.

Ak sa výrobok po každom použití neusuší, okolo skrutiek sa môže objaviť hrdza. Ak sa tak stane, poraďte sa s inštalátorom, či je vhodné skrutky vymeniť.

ŽIVOTNOSŤ

Životnosť výrobku je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania, ako aj pravidelnosťou jeho údržby. Prísny dodržiavaním pokynov v tejto príručke ho možno udržiavať v perfektnom stave 24 mesiacov.

ZÁRUKA

Záruka je platná po dobu dvoch rokov od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ produkt nebol zmenený vo svojej pôvodnej konfigurácii. V rámci záručnej lehoty bezplatne odstránime akúkoľvek výrobnú vadu, a to buď opravou, výmenou dielov alebo dodaním nového produktu, podľa nášho uváženia. Ak sa majiteľ produktu rozhodne pre opravu alebo výmenu, musí sa obrátiť na predajcu, ktorý je jediný zodpovedný za vybavovanie záruky s výrobcom. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho používania výrobku, nesprávnej manipulácie s ním, poškodenia výrobku v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je voda alebo iné škodlivé chemické, obštrukčné alebo korozívne látky, v dôsledku nesprávnej údržby, nedostatočného čistenia, straty komponentov alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov. Ďalšie informácie nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

UPOZORNENIE

- Ak zistíte akúkoľvek chybu, nezrovnalosť alebo poruchu, okamžite to oznámte predajcovi alebo distribútorovi, aby mohol produkt vymeniť alebo opraviť.
- Akékoľvek závažné incidenty súvisiace s produktom je potrebné nahlásiť spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.