

ZÁRUČNÝ LIST
Chodítko rehabilitačné štvorkolesové
AMBONA

Model: VCBK2A	Zákazník:
AMBONA	
Výrobné číslo:	
Doplňky:	Telefón:
	Zdravotná poisťovňa:
Kontroloval :	

Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na skryté vady materiálu a výrobné chyby. Nevzťahuje sa na diely, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu, na škody, ktoré vznikli dôsledkom nadmerného namáhania (preťažovaním, prekonávaním schodov bez plošiny, rampy alebo nájazdu), násilného poškodenia nekvalifikovaným zásahom, nesprávnej údržby alebo neautorizovanými zmenami konštrukcie.

Zmeny v rámci modulového systému môže vykonať iba výrobca alebo výhradný dovozca, pričom musia byť použité originálne a schválené náhradné diely. Výrobca si vyhradzuje možnosť vykonania zmien z dôvodu technického zlepšenia modifikácie dizajnu.

UPOZORNENIE:

Pri nárokovani na bezplatnú záručnú opravu sa obráťte vždy na Vášho autorizovaného predajcu – dodávateľa, u ktorého ste pomôcku získali s týmto vyplneným a potvrdeným záručným listom.

Záručný a pozáručný servis:

REVO – MAT, s.r.o.
 Nikola Tesla 28
 921 01 Piešťany
 Tel/fax.: 032 776 2949,033 381 3034
 Mob.: +421 917 666 725
 +421 907 951 707
 e-mail: revomat.servis@gmail.com
matus.bubak@rehacare.sk

Vydal:

Dňa:

.....
 Pečiatka a podpis

Chodítko rehabilitačné
4-kolesové AMBONA

Výrobca:

mdh SP. z o. o.
 ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24
 90-349 Łódź, Poľsko

Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku:

REHA-CARE, s.r.o.

M.R. Štefánika 1790/101

922 03 Vrbové



Chodítka slúži ako pomôcka na uľahčenie pohybu telesne postihnutých a chorých osôb. Napomáha k udržaniu stability pri nácviку chôdze. Je zakázané používať chodítka na nespevnemom povrchu, šikmých plochách a chodníkoch.

Svojimi technickými vlastnosťami je určené výhradne na použitie v interiéri.

Používa tým spôsobom, že sa rukami uchytíme rukoväť chodítka a predlaktia oprieme o plastové opierky.

Pred použitím sa presvedčíme, že chodítka je dôsledne zmontované a je na podložke stabilné. Nikdy ho výškovo nenastavujeme, keď sa oň opiera pacient. Oporné podložky laktov nastavíme do požadovanej výšky tak, že povolíme skrutku na pravej a ľavej strane nastavovacej tyče, nastavíme požadovanú výšku opornej dosky a opäť dotiahneme skrutky. Pomocou skrutiek nastavíme aj vzdialenosť držiadiel od opornej dosky. Po nastavení vždy skontrolujeme, či sú dotiahnuté všetky nastavovacie prvky.

Chodítka je vyrobené z ocelových profilov s povrchovou úpravou komaxid. Podvozok má štyri kolieska, z toho dve zadné sú brzdené. Opierky laktov sú výškovo nastaviteľné.

Základné rozmery chodítka AMBONA :

Šírka chodítka :	64 cm
Výška opierok laktva od zeme :	97-140 cm
Celková výška chodítka :	109-152 cm
Šírka tapacirovanej opierky laktov :	30 cm
Dĺžka opierok laktov :	60 – 83 cm
Hmotnosť :	12 kg
Maximálna nosnosť :	120 kg

Na čisteniu rámu chodítka je možné použiť bežné saponátové a dezinfekčné prípravky. Nie je povolené používať benzín alebo iné organické rozpúšťadlá.

Dátum poslednej revízie textu: 10.6.2014

Popis reklamácie	Dátum	Pečiatka a podpis