

**ZÁRUČNÝ LIST**  
**Chodítka rehabilitačné**  
**4-kolesové VCBK22**

Prevedenie: Chodítka 4-kolesové	Zákazník:
<b>VCBK22</b>	
Výrobné číslo:	
Doplňky:	Telefón:
	Zdravotná poisťovňa:
<b>Kontroloval:</b>	

**Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov.**

Záruka sa vzťahuje na skryté vady materiálu a výrobné chyby. Nevzťahuje sa na diely, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu, na škody, ktoré vznikli dôsledkom nadmerného namáhania, nesprávnej údržby, násilného poškodenia nekvalifikovaným zásahom alebo neautorizovanými zmenami konštrukcie. Zmeny v rámci modulového systému môže vykonať iba výrobca alebo výhradný dovozca, pričom musia byť použité originálne a schválené náhradné diely.

Výrobca si vyhradzuje možnosť vykonanie zmien z dôvodu technického zlepšenia modifikácie dizajnu.

**UPOZORNENIE:**

**Pri nároku na bezplatnú záručnú opravu sa obráťte vždy na Vášho autorizovaného predajcu – dodávateľa, u ktorého ste pomôcku získali s týmto vyplneným a potvrdeným záručným listom. V opačnom prípade strácate nárok na bezplatnú opravu.**

**Záručný a pozáručný servis:**

REVO – MAT, s.r.o.

Nikola Teslu 28

921 01 Piešťany

Tel/fax.: 032 776 2949,033 381 3034

Mob.: +421 917 666 725

+421 907 951 707

e-mail: [revomat.servis@gmail.com](mailto:revomat.servis@gmail.com)

[matus.bubak@rehacare.sk](mailto:matus.bubak@rehacare.sk)

Vydal: .....

Dňa: .....

.....  
Pečiatka a podpis

Popis a návod na používanie  
**Chodítka rehabilitačné**  
**4-kolesové VCBK22**

**Výrobca:**

mdh SP. z o. o.

ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poľsko

**Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku:**

**REHA-CARE, s.r.o.**

M.R. Štefánika 1790/101

922 03 Vrbové



## Návod na používanie

Chodítko slúži ako pomôcka na uľahčenie pohybu telesne postihnutých a chorých osôb vo vonkajšom a vnútornom prostredí. Chodítko sa používa tým spôsobom, že sa rukami uchytíme rukoväť chodítka, ktoré sú výškovo nastaviteľné.

K regulácii rýchlosti slúžia dve brzdy, ktoré sú spojené lankom s ovládacími páčkami, ktoré sú umiestnené v rukoväti.

### 1. ROZLOŽENIE CHODÍTKA

\* Postavte chodítko pred seba v smere pohybu.

Zabrzďte parkovacie brzdy.

\* Nakloňte chodítko k sebe, aby boli vodiace kolieska odľahčené a zatlačte súčasne ľahko rukoväť smerom nadol.

\* Po zaaretovaní záskočného mechanizmu zatlačte plochou dlane na priečnu výstuhu smerom dole a zasuňte aretačnú pásku.

### 2. ZLOŽENIE CHODÍTKA

\* Zopakujte prvé dva kroky.

\* Uchopte jednou rukou chodítko za rukoväť.

\* Potom uchopte priečnu výstuhu a dvíhajte ju jednoducho smerom nahor.

### 3. NASADENIE KOŠÍKA

\* Košík nasádzate pri rozložení a zabrzdenom chodítku.

\* Koš zavesíte do držiakov na prednej trubke rámu chodítka.

### 4. NAMONTOVANIE PLASTOVÉHO PODNOSU

\* Podnos položíme zhora na sedadlo tak, aby sa štyri plastové nožičky zasunuli do otvoru sedadla.

### 5. NASTAVENIE VODÍTKA

\* Výšku vodítko nastavujeme pri rozložení a zabrzdenom chodítku.

\* Na trubkách uvoľníme plastové skrutky tak, aby sa dali voľne pohybovať.

\* Nastavte správnu výšku vodítko / najlepšie do výšky zápästí /.

### 6. BRZDY

\* Počas jazdy zabrzďte ľahom páky, ktorá je umiestnená pod rukoväťami, smerom nahor.

\* Uvoľnením páky odbrzdíte.

\* Zatlačením oboch pák pod rukoväťami chodítka smerom nadol chodítko zabrzdíte.

\* Odbrzdíme uvoľnením oboch pák do strednej polohy.

### 7. KOLESÁ

\* Na chodítku sú polyuretánové kolieska veľkosti 8"

## POZOR ! Bezpečnostné pokyny.

Maximálna nosnosť **110 kg**

Jazda iba na rovnom a vodorovnom podklade !

Pozor na značku minimálneho zasunutia trubky vodítka !

Každá z brzd pôsobí iba na jedno koleso !

K čisteniu nepoužívajte agresívne alebo iné leptajúce čistiace prostriedky !

Dĺžka chodítka	71 cm
Šírka chodítka	59 cm
Výška chodítka	83 -97 cm
Zložené	35+/-2 cm
Hmotnosť	10,7 kg

## Údržba chodítka

Na čistenie kostry chodítka a sedačky je možné použiť bežné saponátové prípravky. Jedenkrát ročne je nutné premazať ložiská a brzdy silikónovým olejom.

Záručné a pozáručné opravy		
Popis závady	Dátum	Pečiatka a podpis