


Výrobca:
Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka-Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biala
Poľsko

Dovozca:
Reha-CARE, s.r.o.
M.R. Štefánika 1790/101
922 03 Vrbové

Chodítko štvorkolesové ocelové s oporou na lakte TGR-R RS 8811

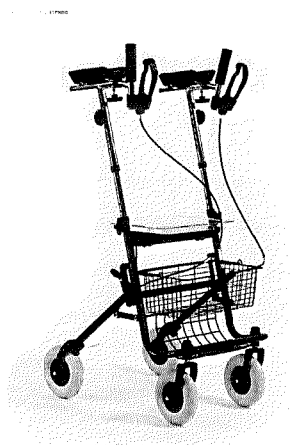

Timago

Chodítko vysoké s ručnými opierkami TGR – R RS8811

Výrobca:
Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka - Spółka komandytowa, ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biala, Poľsko

Obsah balenia: 1 ks

Nosnosť: 135 kg

Celková šírka: 61 cm, **výška:** 60 cm

Funkcia: Zabezpečuje dostatočnú oporu pri chôdzi

Charakteristika: Vyrobené z ocele

Návod na používanie:

Chodítko sa pred použitím správne výškovo nastaví a to povolením matíc pod ručnou podložkou. Maximálna výška je označená ryskou. Dĺžku ručných držiadiel môžete takisto prestaviť povolením matice.

Chodítko uchopte za držiadlá, posúvajte a zároveň kráčajte s ním.

Výrobné číslo: 20140218558

Upozornenie: Neskladovať na nevhodnom mieste (vo vlhku, na prudkom slnku a v blízkosti výhrevných telies)

Spotrebujte: určené na opakované používanie

Čistenie: používajte bežné čistiace prostriedky

Dovozca:

Reha-CARE, s.r.o.

M.R. Štefánika 1790/101, 929 03 Vrbové

Tel.: 0907 729 228

Email: info@rehacare.sk

Dátum vydania návodu na použitie: 14.5. 2014



Výrobca:
Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka-Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biala
Polsko

Dovozca:
Reha-CARE, s.r.o.
M.R. Štefánika 1790/101
922 03 Vrbové

ZÁRUČNÝ LIST

Názov výrobku:	
Typ:	
Výrobné číslo:	

Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

UPOZORNENIE:

Pri nárokovani na bezplatnú záručnú opravu sa obráťte vždy na Vášho autorizovaného predajcu – dodávateľa, u ktorého ste pomôcku získali s týmto vyplneným a potvrdeným záručným listom.

Záručný a pozáručný servis:

Reha-CARE, s.r.o.
M.R Štefánika 1790/101
922 03 Vrbové
Tel. 0917 180 197

Dňa:

Podpis a pečiatka:.....