

NÁVOD NA POUŽITIE
PODLOŽKA NA PRESUN PACIENTA
2553



Sucesores de Manuel García S.L.
CIF B12321162
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com
www.garcia1880.com

NORMATÍVNE POŽIADAVKY

Tento výrobok je zdravotníckym výrobkom triedy I a je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych výrobkoch. Pri likvidácii obalu a výrobku prísne dodržiavajte zákonné predpisy platné vo vašej krajine.

URČENÉ POUŽITIE

Pomôcka určená na uľahčenie presunu osoby, ktorá z dôvodu problémov s pohyblivosťou zostáva ležať v posteli, aby sa ošetrovateľ nezranil v dôsledku nadmernej námahy. Je tiež nevyhnutná na vykonávanie niektorých úkonov pri zmene polohy, najmä u osôb, ktoré sú ohrozené vznikom preležanín a potrebujú, aby sa ich poloha pravidelne menila.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Táto podložka na presun pacienta sa môže použiť na presúvanie osôb v posteli vertikálnym, horizontálnym smerom alebo otáčaním. Mäkký nylonový poťah uľahčuje presúvanie v posteli.
- Má dva nastaviteľné bezpečnostné pásy.
- Má 4 odolné úchyty na každej strane a jeden na každom konci, ktoré umožňujú pevné uchopenie.
- Vyrobené z veľmi odolnej tkaniny Oxford.
- Rozmery: dĺžka 180 cm x šírka 70 cm.
- Maximálna nosnosť: 200 kg.

SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Uistite sa, že povrch, na ktorom pacient sedí alebo leží, je pevne uchytený a nemôže sa pohnúť.
- Preložte pacientovi prestieradlo buď tak, že ho otočíte na bok, alebo ak vám pacient môže pomôcť, opatrne mu zdvihnite zadok/nohy z postele.
- Aby ste predišli náhlym pohybom, vždy, keď je to možné, požiadajte pacienta, aby vám pomohol alebo si pomohol sám.
- Rozložte prestieradlo pod pacienta a uistite sa, že je správne umiestnené, v strede.
- Prekladacie plachty NESMÚ zostať POD pacientom. Plachtu môžete vytiahnuť spod pacienta tak, že uchopíte spodnú časť v blízkosti ramien a bokov pacienta a jemne ju vytiahnete.
- Neprekračujte maximálnu hmotnosť.

OPATRENIA

- Pred každým použitím sa uistite, že je produkt v perfektnom stave.
- Produkt nepoužívajte, ak má viditeľné poškodenie. Ak je opotrebovaný, nepoužívajte ho.
- Tento produkt smú používať iba ošetrovatelia a kvalifikované osoby. Odporúča sa, aby všetky osoby zapojené do manuálnej manipulácie absolvovali príslušné školenie.
- Tento produkt smú používať iba opatrovatelia a vhodné osoby. Odporúča sa, aby všetky osoby zapojené do činností ručnej manipulácie absolvovali primerané školenie.
- Nedodržanie pokynov, varovaní a poznámok v návode na použitie môže spôsobiť fyzické zranenia vám alebo tretím osobám alebo poškodenie produktu.
- Tento výrobok sa smie používať len na určený účel. Nesmie sa používať na iné účely. Nesmie sa napríklad používať ako hračka, na prepravu predmetov, ako hojdačka atď.
- Nevykonávajte žiadne úpravy (mechanické zmeny), aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti používania.

KONTRAINDIKÁCIE

Ak nebudete dodržiavať pokyny, varovania a poznámky v návode na použitie, môže to spôsobiť fyzické zranenia vám alebo tretím osobám alebo poškodenie produktu.

ODPORÚČANIA PRE ÚDRŽBU A PRANIE

- Pravidelne čistite a sušte. Nečistoty odstráňte jemnou vlhkou handričkou a neutrálnym mydlom. Následne vysušte. Nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky, ktoré môžu poškodiť materiál výrobku.
- Nevhodné do sušičky
- Keď výrobok nepoužívate, uložte ho na suchom mieste pri izbovej teplote.

ŽIVOTNOSŤ

Životnosť výrobku ovplyvňujú podmienky používania a skladovania a pravidelnosť údržby. Pri dodržaní pokynov uvedených v tejto návode je možné výrobok uchovať v perfektnom stave po dobu 24 mesiacov.

ZÁRUKA

Záruka je platná po dobu dvoch rokov (6 mesiacov na batérie) od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ výrobok nebol zmenený vo svojej pôvodnej konfigurácii. V rámci záručnej lehoty bezplatne odstránime akúkoľvek výrobnú vadu, buď opravou, výmenou dielov alebo dodaním nového produktu, podľa nášho uváženia. Ak sa rozhodnete pre opravu alebo výmenu, majiteľ produktu sa musí obrátiť na predajcu, ktorý bude jediný zodpovedný za vybavovanie záruky s výrobcom. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho používania výrobku, nesprávnej manipulácie s ním, poškodenia výrobku v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je voda alebo iné škodlivé chemické, obštrukčné alebo korozívne látky, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo údržby, nedostatočného čistenia, straty komponentov alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov. Ďalšie informácie nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

UPOZORNENIE

- Ak zistíte akúkoľvek chybu, nezrovnalosť alebo poruchu, okamžite to oznámte predajcovi alebo distribútorovi, aby mohol produkt vymeniť alebo opraviť.
- Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s produktom je potrebné nahlásiť spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.