

NÁVOD NA OBSLUHU - STOLIČKA DO SPRCHY RS 929

Ďakujeme, že ste si vybrali pomôcku od výrobcu Moretti s.p.a. Jej dizajn a kvalita zaisťuje maximálne pohodlie a spoľahlivosť. Prečítajte si prosím pozorne celý návod na použitie ešte pred prvým použitím. Táto príručka obsahuje základné rady pre správne používanie a cenné tipy pre vašu maximálnu spokojnosť. V prípade pochybností sa obráťte na autorizovaného predajcu, ktorý Vám pomôže a poradí správne.

POUŽITIE A POPIS


Sprchovacia stolička je určená pre sprchovanie osôb ktorým choroba alebo postihnutie nemožňuje dlho stáť, alebo nemôžu stáť vôbec. Má perforovanú opierku chrbta a sedačku pre ľahšie odtekanie vody. Držadlá na sedačke uľahčujú udržanie rovnováhy. Sedačka ma nastaviteľnú výšku sedu. Výšku sedu nastavíte nasledovne: zatlačte na zaistovací kolík a povitiahnite nohu stoličky tak aby po nastavení požadovanej výšky zaistovací kolík späť zaskočil do otvoru na nohe. Postup opakujte na ostatných nohách stoličky tak aby bola výška nôh nastavená rovnako. Týmto postupom môžete zvýšiť alebo znížiť výšku sedu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výška sedu v cm (nastaviteľná v rozmere): 38-55
Celková výška stoličky v cm (nastaviteľná v rozmere): 66-83
Rozmer opierky chrbta v cm (výška x šírka): 44x45
Rozmer sedačky v cm (hĺbka x šírka): 31 x 50
Nosnosť: 130 kg

Zaistovací kolík

Otvory pre nastavenie výšky sedu

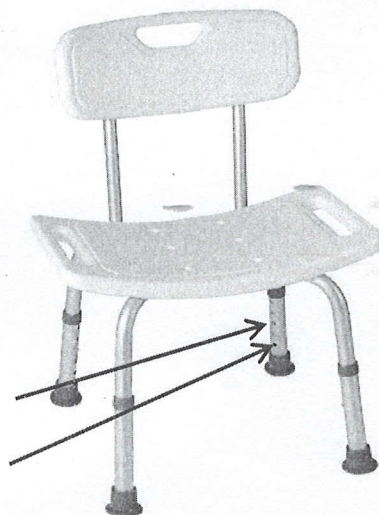

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobca poskytuje na zdravotnícku pomôcku záruku 24 mesiacov. Vzťahuje sa na skrytú vadu materiálu a závadu, ktorá nie je zapríčinená užívateľom. Ak v mimoriadnom prípade dôjde k poruche výrobku, ktorá nie je spôsobená užívateľom, má zákazník právo, aby mu bola vada odstránená. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré vznikli pri nesprávnom používaní výrobku, na mechanické poškodenie zapríčinené preťažením, neopatrným zaobchádzaním po neodbornom a nekvalifikovanom zásahu, nesprávnou a nedostatočnou údržbou. Nevzťahuje sa na diely podliehajúce nadmernému opotrebeniu. Pri uplatnení záruky predkladá zákazník kompletnú, očistenú zdravotnícku pomôcku a potvrdený záručný list. Pre Vašu bezpečnosť a z dôvodu dodržania záruky zo strany výrobcu zdravotníckych pomôcok môže zmeny v rámci modulového systému previesť len autorizovaný servis a môžu byť použité iba certifikované náhradné diely.

Výrobca:

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
520 22 Cavriglia (Arezzo)
Taliansko

Autorizovaný servis:

STELLATOUR, s.r.o.
Družstevná 489/63, 916 01
Stará
mobil: 0911 333 455
e-mail:
objednavkyzp@gmail.com

Užívateľ (meno, adresa tel. číslo):

.....

.....

Zdravotnícku pomôcku vydal (meno, dátum, pečiatka, podpis):