


Chodítko štvorkolesové TGR-R RS 881

Upozornenie : Pred použitím výrobku pozorne prečítajte tento návod

- 1. Popis :** chodítko je vyrobené z oceleového rámu s práškovou farbou. Vybavené parkovacou brzdou, sedadlom a vyberateľným košíkom. Má celogumové kolieska s priemerom 8" a výškovo nastaviteľnými rukoväťami, ktoré sú zakončené anatomickými koncovkami

Sada obsahuje: • Nosný rám so sedadlom • Dve rukoväte s brzdou • Košík

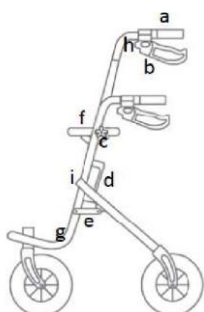

• Zaistovacie skrutky - 2 ks.

Hlavné časti : a) rukoväť

b) brzda

c) zaistovacia skrutka

d) zámok na skladanie rámu krížový záves

f) sedadlo

g) držiak na barle

h) horné nastavenie brzdy

i) spodné nastavenie brzdy

2. Použitie : chodítko je pomocné zariadenie určené na použitie pre ľudí so zníženou pohyblivosťou, ktorí potrebujú stabilnú podporu a ochranu pri chôdzi. Odporúča sa aj ľuďom starším, ako pomôcku pri udržiavaní rovnováhy, zlepšenie pohodlia pohybu a zaistenie bezpečnosti proti pádu. Použitie opory má pozitívny vplyv na návrat k aktivite ľudí s problémami s lokomóciou alebo vertikalizáciou.

3. Montáž

Skladanie a rozkladanie podpery

- Najprv namontujte rukoväte do otvorov rámu v správnej výške a utiahnite blokovacie skrutky. Os rukoväti by mala byť nastavená rovnobežne so zadnými kolesami a brzdové lanky by mali byť vpredu.
- Podperu je potrebné rozložiť stlačením priečneho nosníka umiestneného pod sedadlom tak, že pánty na vonkajšie strany stojana sú úplne vysunuté.
- Košík by mal byť zavesený v prednej časti pod sedadlom.
- Odstráňte plastové chrániče kolies.
- Ak chcete zložiť stojan na prepravu, musíte najskôr zatahnuť parkovaciu brzdou potiahnutím rukoväte smerom Dole. Potom súčasne stlačte sklopný zámok a potiahnite smerom hore za rameno. Košík môžete odobrať.

Funkcia brzdy :

- Ak chcete chodítko zastaviť, potiahnite rukoväť brzdy k nahor smerom k rukoväti a potom ho držte.
- Zablokujte chodítko pri parkovaní potiahnutím rukoväte brzdy nadol.
- Ak chcete brzdou uvoľniť, potiahnite rukoväť brzdy nahor.

Nastavenie výšky rukoväte : Ak chcete nastaviť výšku rukoväti, odskrutkujte zaistovacie skrutky umiestnené na vonkajších stranách rámu, vyberte vhodnú výšku rúrky a dotiahnite zaistovacie skrutky. Ručky majú byť nastavené v rovnakej výške.

Nastavenie brzd

Horné nastavenie brzdy : Odskrutkujte lankovú rukoväť, potiahnite ju nahor do vhodnej vzdialenosti a potom ho uzamknite utiahnutím upínacej skrutky.

Spodné nastavenie brzd: Pomocou plochého kľúča uvoľnite upevňovaciu skrutku, potiahnite čierne brzdové lanko

na nastavenie napätia lanka. potom utiahnite upevňovaciu skrutku.

4. Technické parametre : Celková šírka : 57 cm, Celková hĺbka : 65 cm, Rozmery sedadla : 38 cm x 16 cm, Výška sedadla od zeme : 60 cm, Výškové nastavenie rukoväti : 75-98 cm, Hmotnosť : 10,8 kg, Maximálna nosnosť : 135 kg, Maximálna nosnosť nákupného košíka : 12 kg

5. Poznámky a odporúčania : Timago International Group nezodpovedá za nesprávne používanie produktu, nedodržiavanie pravidiel bezpečnosť a použitie v rozpore s týmito pokynmi.

6. Údržba : Nosný rám chodítka by sa mal čistiť vlhkou handričkou a potom dôkladne vysušiť.

Nepoužívajte drsné leštiace prostriedky, pretože môžu spôsobiť poškodenie - zničenie ochranných náterov. Pravidelne odstraňujte nečistoty z pohyblivých častí chodítka (pánty, upínacie skrutky, zámky).

ZÁRUČNÝ LIST

Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na skryté vady materiálu a výrobné chyby. Nevzťahuje sa na diely, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu, na škody, ktoré vznikli dôsledkom nadmerného namáhania, nesprávnej údržby, násilného poškodenia nequalifikovaným zásahom alebo neautorizovanými zmenami konštrukcie. Zmeny v rámci modulového systému môže vykonať iba predajca a musia byť použité originálne náhradné diely. Zároveň by sme chceli upozorniť, že účelovo záruky, musíte si uschovať doklad o kúpe (účtenka resp. faktúra)

Meno a adresa pacienta :

Dátum predaja a potvrdenie výdajne ZP (lekárne) :

Popis závady :

Záručný servis : Distribútor