

Dovozca: SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o., Polárna 6, 040 12 Košice, [www.sanitaske.sk](http://www.sanitaske.sk)

Výrobca: Reha Fund Sp. z o.o., Poľsko

### Stolička sprchovacia okrúhla RF-822

**Upozornenie:** Pred použitím výrobku pozorne prečítajte tento návod

**Určenie výrobku:** Stolička do sprchy umožňuje ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou udržiavať každodennú osobnú hygienu pri zachovaní značnej nezávislosti

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** Pre vašu bezpečnosť postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Pred použitím stoličky sa uistite, že: a) výška sedadla je správne nastavená, b) uzamykacie tlačidlá fungujú správne, c) gumené koncovky sú v dobrom stave, d) všetky nohy sú nastavené v rovnakej výške.
2. Používajte iba originálne príslušenstvo. Používanie neoriginálnych dielov môže spôsobiť nesprávne nastavenie stoličky, čo má za následok riziko pádu.
3. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie stoličky.
4. Neskladujte pri teplote po 0°C.
5. Pred použitím sa uistite, že nožné rúrky sú v rovnakej výške.
6. Nepokúšajte sa posunúť stoličku po podlahe s vodou, ľadom alebo olejom.
7. Stolička sa musí používať na rovnom povrchu.
8. Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s výrobkom treba nahlásiť

**POZOR!** Nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.

#### VÝŠKOVÉ NASTAVENIE:

1. Stlačte bezpečnostný gombík na nohe stoličky a jemne ním otočte.
2. Nastavte správnu výšku.
3. Tlačidlo nasmerujte na príslušný otvor, vďaka čomu prítlačnú pätku zafixujete na želanej výške.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky na každej nohe a uistite sa, že všetky päty sú nastavené v rovnakej výške.

**POZOR!** Uistite sa, že sú všetky nožičky správne zaistené a nastavené na rovnakú výšku.

#### SADANIE A VSTÁVANIE:

1. Uistite sa, že stolička je stabilná a pripravená na použitie.
2. Postavte sa chrbtom k stoličke tak, aby ste sa jej prednou časťou dotýkali zadnou stranou kolien.
3. Natiahnite ruky dozadu a oprite sa rukami o sedadlo.
4. Pomaly sa posadte na stoličku, pokrčte lakty a ak je to možné, kolená a boky.
5. Ak chcete vstať zo stoličky, oprite sa rukami o sedadlo a vytlačte sa.

#### ČISTENIE A ÚDRŽBA:

1. Odporúča sa pravidelne kontrolovať stoličku, či nie je poškodená alebo viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne kontrolujte, či:
  - Na ráme sa neobjavili žiadne praskliny ani zalomenia
  - Uzamykacie tlačidlo správne zaisťuje nastavenú výšku
  - Otvory rúr nie sú zväčšené alebo predĺžené
  - Gumené koncovky nie sú opotrebované – ak áno, vymeňte ich
  - Žiadne iné časti sprchovacieho kresla nie sú uvoľnené alebo poškodené

2. Stoličku sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po vyčistení treba stoličku osušiť mäkkou handričkou.

**POZOR!** Na čistenie stoličky nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazíva.

HLAVNÉ ČASTI: sedadlo, rám, skrutka motýliková, stláčací blokovací kolík, násadec

#### **MONTÁŽ:**

1. Položte operadlo na tvrdý povrch rovným povrchom nadol (A). Otočte tiež jednu zo štruktúr hornej časti nohy (B) a zarovnajte otvory pre skrutky s otvormi sedadla (A).
2. Umiestnite druhú konštrukciu hornej časti nôh (B) na predchádzajúcu v tvare kríža a zarovnajte otvory pre skrutky s otvormi sedadla (A).
3. Umiestnite kovové podložky na upevňovacie skrutky (D) a vložte ich do otvorov nôh a sedadla (A). Otáčajte skrutkami, kým nezapadnú.
4. Umiestnite spodné časti nôh (E) na konce priečných výstuh. Uistite sa, že každý zámok nôh je správne zaistený.
5. Umiestnite sedadlo do sprchy do správnej polohy. Inštalácia je dokončená.

#### **TECHNICKÉ PARAMETRE:**

Max. nosnosť: 136 kg

Hmotnosť: 1,5 kg

Nastaviteľná výška sedadla: 38-56 cm

Priemer sedadla: 32 cm

Hrúbka sedadla: 2,5 cm

Výrobca posúdil súlad so základnými požiadavkami na zdravotnícke pomôcky.

#### **Záručný list**

**Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov.**

Záruka sa vzťahuje na skryté vady materiálu a výrobné chyby. Nevzťahuje sa na diely, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu, na škody, ktoré vznikli dôsledkom nadmerného namáhania, nesprávnej údržby, násilného poškodenia nekvalifikovaným zásahom, alebo neautorizovanými zmenami konštrukcie. Zmeny v rámci modulového systému môže vykonať iba predajca a musia byť použité originálne náhradné diely.

Výrobné číslo výrobku:

Meno a adresa pacienta:

Dátum predaja potvrdenie a výdajne ZP (lekárne):

Popis závady:

Záručný servis: Distribútor

Dátum revízie textu: 12/2022