

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho výhrevného vankúša pre plecia a chrbát GASKY. Prosíme, pozorne si preštudujte tento návod a uložte si ho pre prípadnú potrebu pre budúcnosť.

Obsah dodávky: 1x výhrevný vankúš, 1x kontrolná jednotka a 1x návod

Parametre produktu:

Číslo modelu: HW02

Názov: GASKY veľký výhrevný vankúš na plecia a chrbát

Vstupné napätie: AC 220-240V, 50kHz

Výkon: 145 W

Stupne nastavenia: 1-2-3-4

Plánovanie vypnutie: 1,5 hod

Veľkosť: 60x85cm

Materiál: extra mäkký flis

Ošetrovanie: podľa medzinárodných symbolov v pôvodnom návode

VAROVANIA:

Pre riziko popálenia, úrazu elektr. prúdom a vznik požiaru pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie:

1. Prečítajte starostlivo návod
2. Produkt používajte len na predhriatie ľudského tela, nie je určený pre zvieratá
3. Dbajte na citlivosť používateľa voči teplu
4. Nepoužívať deťmi do 3 rokov, pre deti medzi 3-8rokov len pod kontrolou dospeléj osoby
5. u deti nad 8 rokov a osôb mentálne alebo fyzicky handykovaných len v prípade, že sú schopní porozumieť návodu, použitiu a vyžaduje sa dohľad zaškolenou osobou
6. Produkt nie je určený pre medicínske použitie v nemocniciach, je pre domáce použitie
7. Nepoškodzovať prístroj ostrými predmetmi, nekrčiť a nemačkať
8. Prístroj možno použiť len v spojení s dodanou kontrolnou jednotkou
9. V prípade implantovaného kardiostimulátora alebo iného prístroja citlivého na elektromagnetické pole možno prístroj použiť len po konzultácii s lekárom
10. prírodné káble nelámte a nepoškodzujte
11. Pravidelne kontrolujte produkt a v prípade zistených závad ho nesmiete bez súhlasu a kontroly výrobcom používať
12. Nepoužívajte prístroj v prostredí s vysokou koncentráciou kyslíka
13. Ak prístroj nepoužívate, vytiahnite ho zo zástrčky. Nenechávajte ho bez dozoru pre manipuláciu pre nezaškolených prípadne deti
14. Neťahajte za kábel, nepoužívajte ho ako „rúčku“
15. Zapájajte prístroj len do siete s adekvátnym 220V napätím
16. Prístroj nesmie prichádzať do kontaktu s masťami a gélmi
17. Akékoľvek opravy prírodného kábla, vyhrievacích káblov či kontrolnej jednotky môže prevádzať len odborný personál
18. Pri praní prateľnej časti nesmie vypínač a kontrolná jednotka prísť do styku s vodou
19. Ak sa prístroj používa dlhšiu dobu mala by kontrolná jednotka byť nastavená na najnižší stupeň výkonu
20. Pri nepoužívaní prístroja ho odložte až po jeho vychladnutí, prípadne po praní je absolútne suchý, odpojte šnúru. Skladujte na suchom mieste.
21. Pri odložení nezaťažujte prístroj nadmerným tlakom z vonku
22. Pri použití výhrevnej vesty treba zobrať do zreteľa, že sa nemá používať na polohovateľnej posteli. Ak sa predsa použije, treba dôsledne skontrolovať priebeh káblov a zamedziť ich poškodeniu

VÝROBCA: LACMAX GmbH, LAUBENHOF 23, 45326 EDSEN, NEMECKO

Najčastejšie otázky a riešenia:

Prístroj nehreje

Príčina: prístroj nie je v sieti/ prístroj nie je zapnutý/ prístroj má poruchu

Riešenie: zapojte do siete / zapnite prístroj/ urobte 30 min. t. st. na samotnej veste/zabezpečte kvalifikovanú opravu

Prístroj hreje veľmi intenzívne

Príčina: pri použití je vesta pokrčená, zalomená alebo odkrytá/ po zapnutí je prídlhý čas na maxime

Riešenie: dbajte na to, aby vesta bola vyrovnaná/ po 30-60 minútach prepnite na požadovanú intenzitu

Nerovnomerné vyhrievanie

vesta je pokrčená, a lebo výhrevný drôt je zamotaný, prípadne je nerovnomerná vrstva prikrývky

Riešenie. Rozprestrite rovnomerne vestu

Prístroj po bezproblémovom používaní náhle nefunguje

Nesprávne použitie alebo nesprávne pranie, kontaktujte servis

Kontrolná jednotka obsahuje: 4 stupne intenzity od najnižšej 1, po najvyššiu 4
tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
Auto-vypnutie po 1,5 hod.

Návod na použitie:

1. Zapojte prístroj do zástrčky. Stlačte zapnutie na kontrolnej jednotke a následne sa štandardne zobrazí stupeň 1
2. Stlačením tlačidla vyhrievania, môžete prepínať medzi stupňami 1 až 4
3. Vesta po 1,5hďine sama automaticky vypne
4. Vypnite vestu a odpojte zo zástrčky

Čistenie a údržba:

Pred každým čistením odpojte od elektrického prívodu

Odpojte kontrolnú jednotku od vesty

Čistenie: Zmäkčite vestu asi 15minút v studenej mydlovej vode. Vestu možno prať v práčke v šetriacom profile po dobu 2 minút alebo ručne. Opláchnite vestu s čistou studenou vodou. Sušiť sa dá strojovo, chladiacim cyklom alebo vyvesením.

Údržba:

Odložiť vestu až keď je vychladnutá príp. po praní úplne suchá. Stočte šetrne kábel. Skladujte na suchom mieste.

POZOR:

Kontrolná jednotka nesmie prísť do styku s vodou, čistite ju len vlhkou handrou. Nepožívajte chemické čistenie, môže to poškodiť kábel. Prať len šetrne a bez mechanických pomôcok, Nežehliť! Zapojenie prístroja len, ak je už úplne vysušený. Kábel neperte a nedávajte do vody! Časté pratie vesty má na ňu negatívny účinok. Mechanické sušičky nepoužívajte!