

STOLÍK MOBILNÝ K LOŽKU



Upozornenie : Pred použitím výrobku pozorne prečítajte tento návod

Určenie výrobku : Stolič je navrhnutý na použitie pri sedení na stoličke alebo v posteli a poskytuje rovný povrch , nastaviteľnú výšku na čítanie, písanie, jedenie atď. Dosku stola možno nakloniť pre väčšie pohodlie počas použitia.

Indikácie: indikácie nie je možné viazať na konkrétnu oblasť klinicky, pretože stolič je vhodný pre široké použitie pre ľudí so zníženou pohyblivosťou.

Kontraindikácie : Kontraindikácie nemožno spájať s konkrétnou klinickou oblasťou. Pozrite si informácie ohľadom bezpečnosti.

Oblasti použitia: Výrobok je možné použiť v domácej starostlivosti, v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach dlhodobej starostlivosti, ako aj v nemocniciach.

Bezpečnostné pokyny: • Uistite sa, že si túto príručku prečítali všetky osoby, ktoré ju používajú. • Výrobca nezodpovedá za škody a/alebo zranenia spôsobené nedodržaním predpisov na používanie. • Výrobok používajte iba v bezchybnom stave. • Ak sa zistia chyby, ihneď kontaktujte svojho predajcu. • Dodržujte všetky odporúčania a upozornenia výrobcu. • Venujte pozornosť informáciám na etikete výrobku. • Výrobok používajte len na popísaný účel. • Nestúpajte na zariadenie • Vyhýbajte sa štrukturálnym zmenám zariadenia, pokiaľ na to nemáte písomné povolenie súhlas výrobcu s takýmito zmenami. • Počas nastavovania a montáže, musí používateľ dávať pozor, aby si nepričivil prsty alebo iné časti tela medzi dvoma pohyblivými časťami zariadenia. • Dosku stola nepreťažujte, nosnosť max 15 kg. • V pravidelných intervaloch kontrolujte, či sú skrutky dotiahnuté. • Nepokúšajte sa používať stôl ako pomôcku pri chôdzi. • Nepokúšajte sa sedieť alebo stáť na stole. • Výrobok sa smie používať iba na rovných, hladkých a stabilných povrchoch. • Všetky kolesá by mali zostať počas používania neustále v kontakte s podlahou. Tým sa zabezpečí rovnováha výrobku a malo by sa zabrániť nehodám. • Zariadenie nie je odolné voči ohňu. Nenechávajte ho v blízkosti ohňa, zapálenia alebo zdrojov extrémneho tepla.

Balenie: Zariadenie je dodávané v kartónovej krabici, rozložené pre ľahkú prepravu.

Obsahom balenia je: ✓ Noha stola (s kolesami) X 2 ✓ Priečny nosník (s kolesami) X 1 ✓ X 1 stolová doska ✓ Teleskopická trubica X 2 ✓ Skrutky - dlhé X 2 ✓ Skrutka pre Umbraco - krátka X2 ✓ Montážne diely a nástroje (3 x 2 x 1) (1-9)

Počiatočná kontrola Skontrolujte zhodnosť obsahu krabice so zoznamom vyššie. Ak v tejto fáze zistíte, že niektorá časť chýba , resp je poškodená, ihneď kontaktujte svojho dodávateľa.

Popis :

1. Tácka
2. Skrutky na nastavovanie výšky
3. Brzdy kolies
4. Kolesá

Podnos s nastaviteľnou výškou a sklonom. Ak chcete nastaviť výšku podnosu, uvoľnite dve skrutky (2), posuňte rúrky do požadovanej polohy a znova utiahnite skrutky. Ak chcete zmeniť uhol podnosu, stačí posunúť jednu z rúrok vyššie alebo nižšie ako ostatné pri nastavovaní.

Uzamykateľné otočné kolieska Dve otočné kolesá je možné zaaretovať stlačením plastového pedálu.

POZOR! Pred použitím musia byť kolesá úplne zatvorené zamknuté a stôl zaistený na mieste.

Inštalácia Montážny návod je na poslednej strane.

Príslušenstvo K tomuto zariadeniu nie je dodávané žiadne príslušenstvo