

ZÁRUČNÝ LIST
Chodítka rehabilitačné
4-kolesové ROLLATOR B

Prevedenie: Chodítka 4-kolesové	Zákazník:
ROLLATOR B	
Výrobné číslo:	
Doplňky:	Telefón:
	Zdravotná poisťovňa:
Kontroloval:	

Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na skryté vady materiálu a výrobné chyby. Nevzťahuje sa na diely, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu, na škody, ktoré vznikli dôsledkom nadmerného namáhania, nesprávnej údržby, násilného poškodenia nekvalifikovaným zásahom alebo neautorizovanými zmenami konštrukcie. Zmeny v rámci modulového systému môže vykonať iba výrobca alebo výhradný dovozca, pričom musia byť použité originálne a schválené náhradné diely.

Výrobca si vyhradzuje možnosť vykonanie zmien z dôvodu technického zlepšenia modifikácie dizajnu.

UPOZORNENIE:

Pri nároku na bezplatnú záručnú opravu sa obráťte vždy na Vášho autorizovaného predajcu – dodávateľa, u ktorého ste pomôcku získali s týmto vyplneným a potvrdeným záručným listom. V opačnom prípade strácate nárok na bezplatnú opravu.

Záručný a pozáručný servis:

REVO – MAT, s.r.o.
Piešťanská cesta 402/1
922 03 Vrbové

Mob.: +421 917 666 725

e-mail: danis@revomat.sk

Vydal:

Dňa:

.....

Pečiatka a podpis

Popis a návod na používanie
Chodítka rehabilitačné
4-kolesové ROLLATOR B

Výrobca:

Bischoff & Bischoff GmbH
Becker-Góring-StrafBe 13
D -76307 Karlsbad
Deutschland

Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku:

REHA-CARE, s.r.o.
M.R. Štefánika 1790/101
922 03 Vrbové



Návod na používanie

Chodítko slúži ako pomôcka na uľahčenie pohybu telesne postihnutých a chorých osôb vo vonkajšom a vnútornom prostredí. Chodítko sa používa tým spôsobom, že sa rukami uchytíme rukoväti chodítka, ktoré sú výškovo nastaviteľné. K regulácii rýchlosti slúžia dve brzdy, ktoré sú spojené lankom s ovládacími páčkami, ktoré sú umiestnené v rukoväti.

1. ROZLOŽENIE CHODÍTKA

* Postavte chodítko pred seba v smere pohybu.

Zabrzďte parkovacie brzdy.

* Nakloňte chodítko k sebe, aby boli vodiace kolieska odľahčené a zatlačte súčasne ľahko rukoväť smerom nadol.

* Po zaaretovaní záskočného mechanizmu zatlačte plochou dlane na priečnu výstuhu smerom dole a zasuňte aretačnú pásku.

2. ZLOŽENIE CHODÍTKA

* Zopakujte prvé dva kroky.

* Uchopte jednou rukou chodítko za rukoväť.

* Potom uchopte priečnu výstuhu a dvíhajte ju jednoducho smerom nahor.

3. NASADENIE KOŠÍKA

* Košík nasádzate pri rozložení a zabrzdenom chodítku.

* Koš zavesíte do držiakov na prednej trubke rámu chodítka.

4. NAMONTOVANIE PLASTOVÉHO PODNOSU

* Podnos položíme zhora na sedadlo tak, aby sa štyri plastové nožičky zasuňuli do otvoru sedadla.

5. NASTAVENIE VODÍTKOV

* Výšku vodítkov nastavujeme pri rozložení a zabrzdenom chodítku.

* Na trubkách uvoľníme plastové skrutky tak, aby sa dali voľne pohybovať.

* Nastavte správnu výšku vodítkov / najlepšie do výšky zápästí /.

6. BRZDY

* Počas jazdy zabrzďte ťahom páky, ktorá je umiestnená pod rukoväťami, smerom nahor.

* Uvoľnením páky odbrzdíte.

* Zatlačením oboch pák pod rukoväťami chodítka smerom nadol chodítko zabrzďte.

* Odbrzdíme uvoľnením obidvoch pák do strednej polohy.

7. KOLESA

* Na chodítku B&B sú polyuretánové kolieska veľkosti 200x50 mm.

POZOR ! Bezpečnostné pokyny.

Maximálna nosnosť **120 kg**

Jazda iba na rovnom a vodorovnom podklade !
Pozor na značku minimálneho zasunutia trubky vodítka !

Každá z brzd pôsobí iba na jedno koleso !

K čisteniu nepoužívajte agresívne alebo iné leptajúce čistiace prostriedky !

Dĺžka chodítka	71 cm
Šírka chodítka	58 cm
Výška sedadla	61 cm
Zložené	30 cm
Hmotnosť	11,5 kg

Údržba chodítka

Na čistenie kostry chodítka a sedačky je možné použiť bežné saponátové prípravky. Jedenkrát ročne je nutné premazať ložiská a brzdy silikónovým olejom.

Záručné a pozáručné opravy		
Popis závady	Dátum	Pečiatka a podpis