

NÁVOD NA POUŽITIE JUDY PODPERA K ZÁCHODOVEJ MISE 940 ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA

Objednávacie číslo:	RF-940
Maximálne bezpečné zaťaženie:	Max. nosnosť: 113 kg
Nastavenie výšky:	64 - 74 cm
Nastavenie šírky:	53 - 63 cm.
Hmotnosť:	1,55 kg



POZOR: Pred použitím stojana si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

PRÍPRAVA

Podpera určená na pomoc starším ľuďom, ľuďom so zdravotným postihnutím a ľuďom s problémami s rovnováhou pri vstávaní a sadaní si na toaletu.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Z bezpečnostných dôvodov je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania:

1. Pred použitím sa vždy uistite, že je podpera správne zložená, upevnená a zaistená na mieste, kde ju m o ž n o nastaviť.
2. Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie podpery.
3. Pri používaní stojana je vždy potrebné postupovať mimoriadne opatrne. Vyhnite sa akýmkoľvek potenciálnym nebezpečenstvám, a k o je napríklad opretie váhy tela len o jednu stranu podpery alebo opretie sa o predmety, ktoré nie sú na tento účel určené.
4. Používajte len originálne príslušenstvo. Použitie neoriginálnych dielov môže mať za následok nedostatočné nastavenie stojana, čo môže viesť k riziku pádu.
5. Podložku neskladujte pri teplotách nižších ako 0 °C.



POZOR! Nedodržanie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.



POZOR: O vhodnom použití podpery sa poraďte s lekárom alebo fyzioterapeutom podľa vašich funkčných schopností a činností každodenného života.



POZNÁMKA: Nasledujúce informácie sú odporúčaním výrobcu, ale mali by ste ich konzultovať so svojim lekárom alebo rehabilitačným terapeutom.

SÚČASTI PODPERY A MONTÁŽ

Podpera sa skladá z nasledujúcich komponentov (obr. 1):


1. Montážna doska;
2. Podrúčky;
3. Rám;
4. Štíty;
5. Čiapky.

Podporná zostava:

1. Odstráňte nástavec záchodového sedadla z misy.
2. Montážnu dosku umiestnite medzi misu a držiak záchodového sedadla tak, aby jej zaoblená časť bola na zadnej strane toalety (obr. 2).
3. Nasadíte záchodové sedadlo späť a prestrčte upevňovacie skrutky cez dosku a škrupinu. Namontujte a utiahnite matice.
4. Vložte rám do zaoblenej časti držiaka tak, aby ramená smerovali nahor. Stlačte zaistovacie tlačidlo a zasunite rám dovnútra dosky tak, aby sa tlačidlo uzamklo v požadovanej polohe.
5. Pomocou aretačných tlačidiel nastavte výšku stojana do správnej úrovne. Uistite sa, že všetky aretačné tlačidlá sú bezpečne zaistené a že obe strany stojana sú nastavené v rovnakej výške.
6. Pripevnite nosné ramená k rámu stlačením zaistovacieho tlačidla tak, aby sa uzamklo v otvore.
7. Uistite sa, že je stojan dobre upevnený a stabilný a že sú všetky jeho komponenty správne pripojené.



POZOR: Nie všetky typy záchodových sedadiel sú vhodné na inštaláciu podpery. Uistite sa, že je záchodové sedadlo pripevnené k toalete pomocou skrutiek.

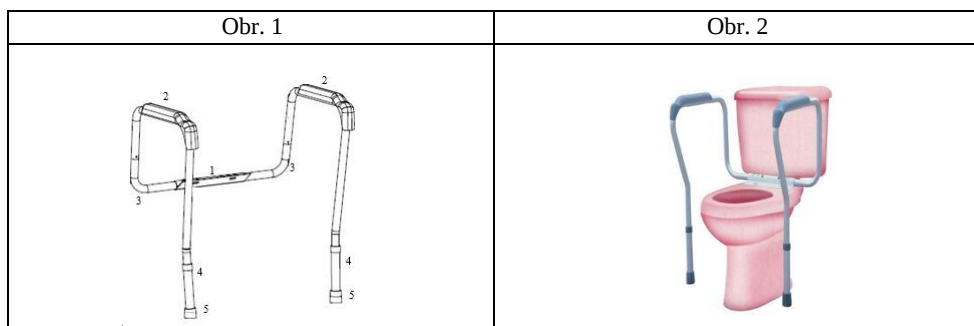

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Podperu sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po vyčistení by sa mala podpera vysušiť mäkkou handričkou.



POZOR: Na čistenie stojana nepoužívajte rozpúšťadlá, bieliadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Montážna doska	hliník
Podrúčky	PP+TPR
Rám	hliník
Štíty	PP+TPR
Čiapky	guma

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo série

	Vrchol, neprevracajte sa
	Skladujte na suchom mieste
	Chýlostivé, zaobchádzajte s nimi opatrne



REHA FUND Sp. z o.o.

Ulica Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Poľsko
 telefón: +48 22 594 03 00, fax: +48 22 594 03 07
 e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.2
 Wydano: 11/2020

ZÁRUČNÁ KARTA
PODPERA ZÁCHODOVEJ MISY JUDY
940

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predávajúceho:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že tovar, na ktorý je vystavený tento záručný list, je úplne nový a vysoko kvalitný.
2. Na podporu sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba od dátumu predaja na záručnom liste.
3. Základom pre vybavenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni spoločnosť REHA FUND Sp. z o.o. alebo jej autorizovaní servisní technici za predpokladu, že zariadenie bolo používané v súlade s jeho určením a návodom na použitie.
5. Oprava sa vykoná čo najskôr, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia zariadenia v servisnom stredisku.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - údržbu, čistenie a nastavenie podľa návodu na použitie;
 - diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu počas bežného používania;
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr. ohyby, škrabance, zlomeniny atď;
 - škody vzniknuté používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, neoprávnenými opravami, úpravami alebo konštrukčnými zmenami.
7. Pred odovzdaním zariadenia autorizovanému servisnému technikovi ho treba vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servis.
8. Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Ltd.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

Lp.	Dátum podania žiadosti	Obj. č.	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis služby
1.					
2.					

POZNÁMKY

