

VANKÚŠ NA SEDENIE

Justyna

ROZMER 42 x 44 x 6 cm

NEPREMOKAVÝ OBAL

Penový vankúš proti preležaninám pre ľudí, ktorí sú dlhodobo v sedavej pozícii. Profil a štruktúra peny zabezpečuje voľnú cirkuláciu vzduchu a výstupky navyše masírujú povrch pokožky.



Špeciálny profil zmiernuje následky dlhodobého sedenia.



Podporuje prevenciu preležanín.



Zabezpečuje voľnú cirkuláciu vzduchu.



Vyrobený z netoxickej, vysokokvalitnej polyuretánovej peny.



Vyrobený v Poľsku.



Výrobca:

Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Varšava,
tel. 22 59 40 300
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



LOT

Vydané:
12/2022
v. 2022/12

REF 624

REF 624/PU



NÁVOD NA POUŽITIE

Vankúš na sedenie Justyna

ÚČEL POUŽITIA

Antidekubitný vankúš na sedenie Justyna sa odporúča na prevenciu preležanín a stavoch po dekubitoch. Zabezpečuje vhodnú cirkuláciu vzduchu a správnu polohu tela. Je tiež ideálny pre ľudí, ktorí trávajú dlhý čas v sede.

VLASTNOSTI

Vankúš je vyrobený z netoxickej, tvarovanej polyuretánovej peny. Rozmery: 42 x 44 x 6 cm. Poťah je vyrobený zo 100 % polyesterovej tkaniny.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Po čistení dobre vysušte. Penovú mačku nenamáčajte do vody.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte vlhký výrobok priamo v kontakte s pokožkou.
Nepoužívajte v prípade výskytu alergických kožných reakcií.
Nepoužívajte, ak dôjde k mechanickému poškodeniu výrobku (napr. prasknutie, roztrhnutie).
Nepoužívajte inak, ako je určené.

UPOZORNENIA

Pred použitím konzultujte zamýšľané použitie, výber výrobku a spôsob používania s lekárom alebo rehabilitačným pracovníkom.
Pred prvým použitím vyperte obal, v ktorom je vankúš.
Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu ani iným zdrojom vznietenia. Pena vystavená otvorenému ohňu sa rýchlo vznieti.
Nevystavujte výrobok dlhodobo nízkym teplotám (pod 5 °C).
Obal výrobku nie je hračka.
Akúkoľvek závažnú udalosť súvisiacu s výrobkom treba nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

POZOR

Nevystavujte výrobok dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu, pretože sa môže sfarbiť pod vplyvom slnečného žiarenia. Zmena farby peny nemá vplyv na fyzikálne a mechanické vlastnosti výrobku.

ZÁRUKA

Na predmet sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba. Treba ho používať v súlade s jeho určením a podľa odporúčaní uvedených v návode na použitie. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené používaním predmetu v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien. Výrobok musí byť do servisného strediska doručený čistý. V prípade neodôvodnenej reklamácie bude kupujúci znášať náklady na realizáciu a reklamáciu. Záruka sa poskytuje na základe dokladu o kúpe. Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. Záruka na predaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.



Producent:

Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Warszawa, Polska

tel. 22 59 40 300,
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl