



RF-K1/PU



5 903940 713113 >

ROZMERY

40,5 x 44 x 9 cm

POŃAH

Nepremokavý


REHA FUND Sp. z o.o.

Staniewicka 14

03-310 Varšava, Poľsko

E-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

REF

RF-K1

#

RF-K/PU

QTY

1ks

LOT



UDI

ANTIDEKUBITNÝ PODSEDÁK KOMFORT

Penový podsedák proti preležaninám je ideálny pre ľudí, ktorí trávajú dlhé hodiny sedením. Podsedák bol navrhnutý s ohľadom na pohodlie a zdravie – jeho inovatívny profil a penová štruktúra zaisťujú vynikajúcu cirkuláciu vzduchu a účinne zabraňujú prehriatiu a poteniu. Jedinečné výstupky navyše jemne masírujú pokožku a prinášajú úľavu a relaxáciu.



Špeciálny profil zmierňuje následky dlhodobého sedenia



Podporuje prevenciu preležanín



Zabezpečuje voľnú cirkuláciu vzduchu



Vyrobené v Poľsku



NÁVOD NA POUŽITIE

ANTIDEKUBITNÝ PODSEDÁK KOMFORT



URČENÝ ÚČEL

Antidekubitný podsedák Komfort je určený na prevenciu preležanín a stavov po preležaninách. Zaisťuje správnu cirkuláciu vzduchu a správnu polohu tela. Je tiež ideálny pre ľudí, ktorí sedia dlhší čas.

VLASTNOSTI

Podsedák je vyrobený z netoxickej, profilovanej polyuretánovej peny. Rozmery: 40,5 x 44 x 9 cm. Podsedák je dostupný s bavlneno-polyesterovým poťahom a vodeodolným poťahom (100% polyester).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vyčistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Po vyčistení dobre osušte. Nenamáčajte všetku penu do vody.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte vlhký prípravok, ktorý je v priamom kontakte s pokožkou.

Nepoužívajte v prípade alergických kožných reakcií.

Nepoužívajte, ak bol výrobok mechanicky poškodený (napr. zlomenie, roztrhnutie).

Nepoužívajte inak, ako je určené.

VAROVANIE

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo fyzioterapeutom o užitočnosti použitia, výbere produktu a spôsobe použitia. Každá závažná nehoda súvisiaca s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko. Pred prvým použitím poťah umyte. Produkt by sa mal vyberať podľa veľkosti tela. Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu alebo iným zdrojom ohňa, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie. Pena vystavená otvorenému ohňu sa prudko vznieti. Nevystavujte výrobok dlhší čas nízkym teplotám (pod 5 °C).

Obal produktu nie je hračka. Nevystavujte výrobok dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu, pretože môže vplyvom slnečného žiarenia zmeniť farbu. Zmena farby peny nemá vplyv na jej fyzikálne a mechanické vlastnosti produktu.

ZÁRUKA

Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predmet predaja je úplne nový a kvalitný. Na výrobok sa vzťahuje záruka (podrobné záručné podmienky nájdete na webovej stránke výrobcu).

Výrobok by sa mal používať v súlade s určeným účelom a odporúčaniami v návode na použitie.

Vysvetlenie symbolov

Výrobca	Dátum výroby	Chráňte pred vlhkosťou
Katalógové číslo	Označenie CE	Najnižšia prípustná teplota
Pozrite si návod na použitie	Varovanie	Neperte
Kód šarže	Udržujte v čistote	Nežehlite
Zdravotnícka pomôcka	Model č.	Vysušte vodorovne
Jedinečný identifikačný kód produktu	Chráňte pred slnečným žiarením	Nečistite chemicky
Množstvo	Nepoužívajte, ak je obal poškodený	Nebielte

Dátum vydania návodu na použitie: 01.2025 v.1



REHA FUND Sp. z o.o.
Staniewicka 14
03-310 Varšava, Poľsko
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

I/RF-K1/1/15.01.2025