

NÁVOD NA POUŽITIE ZVÝŠOVAČ WC KATE 871

URČENÝ ÚČEL

Zvyšovač WC slúži k zvýšeniu výšky toalety na najpohodlnejšiu úroveň pre užívateľa. Vďaka tomu je jednoduchšie sa posadiť a vstať. Je určený všetkým ľuďom, ktorí majú problém s pohybom a používaním toalety, napr. pacientom po operácii bedra, po úraze, seniorom.

MODELY		
Katalógové číslo	RF-871/11	RF-871/15
Max. bezpečné zaťaženie	150 kg	150 kg
Výška vpredu	117 mm	147 mm
Výška vzadu	147 mm	177 mm
Výška zadnej časti s klipsňami	207 mm	237 mm
Šírka zvyšovača	367 mm	367 mm
Hĺbka zvyšovača	401 mm	401 mm
Šírka otvoru	208 mm	208 mm
Hĺbka otvoru	264 mm	264 mm
Váha	1,05 kg	1,32 kg



POZOR! Pred použitím zvyšovača si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny.

PRAVIDLÁ PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

Pre vašu bezpečnosť dodržujte nasledujúce odporúčania:

1. WC zvyšovač nie je určený k trvalej inštalácii. Mal by byť uvoľnený a pritiahnutý raz do týždňa, aby sa zaistilo správne usadenie.
2. Pomaly sa posaďte na sedadlo s pokrčenými kolenami, ak možno súčasne pokrčte bedrá a kolena.
3. Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s pomôckou musí byť oznámený výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko.
4. Nedovoľte kontakt s horúcimi zariadeniami.
5. Pred použitím bezpečne pripevnite k toalete.



POZOR! Nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.



POZOR! Poradte sa so svojim lekárom alebo rehabilitačným pracovníkom, aby ste určili vhodný spôsob použitia zvyšovača v súlade s vašimi funkčnými možnosťami a každodennými aktivitami.



POZOR! Nižšie uvedené informácie sú odporúčané výrobcom, ale je treba ich konzultovať so svojim lekárom alebo rehabilitačným pracovníkom.

MONTÁŽ

1. Ak chcete nainštalovať zvyšovač, najprv odstráňte sedadlo s poklopom z toalety.
2. Uvoľnite klipsne zo zvyšovača (obr. 1).
3. Nasadte klipsne na zvyšovač (obr. 2).
4. Nainštalujte zvyšovač na WC pomocou klipsní (obr. 3).
5. Skontrolujte stabilitu (obr. 4).

obr. 1	obr. 2
	
obr. 3	obr. 4
	

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odporúča sa pravidelne kontrolovať, či zvyšovač nie je poškodený alebo či nie sú viditeľné známky opotrebenia.
2. Zvyšovač sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po vyčistení osušte zvyšovač mäkkou handričkou.
3. Zvyšovač sa dá dať dolu za účelom čistenia tak, že odmontujete bočné klipsne.



POZOR! Na čistenie alebo dezinfekciu zvyšovača nepoužívajte rozpúšťadlá, bieliadlá, abrazíva, roztoky na bázy alkálií, riedidlá, acetóny ani iné roztoky.



POZOR! Pravidelne kontrolujte upevnenie zvyšovača, aby ste sa uistili, že je bezpečne pripevnený.

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Celá konštrukcia	PP (polypropylén)
------------------	-------------------

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Prečítajte si návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo série
	Týmto smerom v správnej polohe, neprevracajte

	Uchovávať v suchu
	Krehké, manipulujte opatrne



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Poľsko
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.1
Vydané: 05/2023

POZNÁMKY

ZÁRUČNÝ LIST
ZVYŠOVAČ WC KATE 871

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predávajúceho:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predmet predaja, ku ktorému je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na zvyšovač sa vzťahuje záruka 24 mesiacov a na ostatné diely sa vzťahuje záruka 6 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovaný servisný technik za predpokladu, že zariadenie bolo používané v súlade s jeho účelom a odporúčaniami uvedenými v návode na použitie.
5. Oprava/Výmena bude vykonaná čo najskôr, maximálne však do 14 dní odo dňa prevzatia zariadenia na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - činnosti súvisiace s údržbou, čistením a nastavovaním popruhu popísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
 - mechanické a tepelné poškodenie popruhu, napr. nalomeniny, trhliny atď.;
 - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním svojpomocných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred vrátením prístroja autorizovaným servisným technikom ho treba vyčistiť podľa návodu na použitie, aby bolo vhodné na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkoví účtované náklady na dopravu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRÁV *(vyplňa servisný technik)*

Č.	Dátum nahlásenia	Číslo objednávky	Popis závady/ rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisného technika
1.					
2.					