



ROZMERY

200x90x10 cm

MNOŽSTVO

1 ks.

FARBA

ZELENÁ

15/P/N/10



REF 15/P/N

15/P/N/10



REHA FUND Sp. z o.o.

Staniewicka 14,

03-310 Varšava, Poľsko www.rehafund.pl

LOT



Nepremokavý poťah

Chrání povrchy vystavené vlhkosti alebo nečistotám v dôsledku kontaktu s tekutinami alebo s fyziologickými sekrétmi.



Nepremokavý



Umývateľný

*Poznámka: fotka poťahu je len ilustračná

NÁVOD NA POUŽITIE

Nepremokavý poťah



URČENÝ ÚČEL

Nepremokavý poťah je navrhnutý tak, aby chránil povrch matracu proti preležaninám pred nečistotami a fyziologickými sekrétmi.

CHARAKTERISTIKA

Vyrobené z nepremokavého materiálu: pletený 100% polyester, PU ochranný povlak. Tento elastický poťah má všíty silný elastický pás, ktorý uľahčuje správne nasadenie na matrac.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vyčistite jemnou handričkou namočenou v teplej vode a jemných čistiacich prostriedkoch. Perte do 40 °C, jemné pranie. Po vyčistení dobre osušte.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte vlhký poťah v priamom kontakte s pokožkou.

Nepoužívajte v prípade alergických kožných reakcií.

Nepoužívajte, ak dôjde k mechanickému poškodeniu výrobku (napr. zlomenie, roztrhnutie).

Nepoužívajte inak, ako je určené.

⚠ UPOZORNENIA

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo fyzioterapeutom o účelnosti použitia, výbere produktu a spôsobe použitia.

Každá závažná nehoda súvisiaca s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

Nechlórujte (na bielenie nepoužívajte zlúčeniny, ktoré emitujú voľný chlór).

Nečistite chemicky.

Nežehlite (vyhnite sa kontaktu s vyhrievanými povrchmi, napr. radiátorom).

Použiteľná len na jedna strana obalu (poťah by mal smerovať nahor s pleteným povrchom).

Nesušte v sušičke.

Zhoršenie vizuálnych a estetických vlastností (napríklad povrchové pokrvenie) nemá vplyv na zmenu funkčných parametrov materiálu (fyzikálne a mechanické vlastnosti).

Obal výrobku nie je hračka.

ZÁRUKA

Na výrobok sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Výrobok by sa mal používať v súlade so určeným účelom a odporúčaniami v návode na použitie. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie, nebanalitou, vykonaním samostatných opráv, úprav alebo štrukturálnych zmien. Výrobok musí byť dodaný čistý do servisu. V prípade neoprávneného oznámenia budú kupujúcemu účtované náklady na realizáciu a reklamáciu. Záruka je založená na doklade o kúpe.

Územná pôsobnosť záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

Vysvetlenie symbolov

Výrobca	Dátum výroby/krajina pôvodu	Chráňte pred slnečným žiarením	Nebielte
Referenčné číslo	Označenie CE	Nepoužívajte, ak je obal poškodený	Nečistite chemicky
Pozrite si návod na použitie	Číslo modelu	Nepoužívajte, ak je obal poškodený	Nežehlite
Číslo série	Udržujte v čistote	Upozornenie	Perte na max. 40°C
Zdravotnícka pomôcka	Chráňte pred vlhkosťou		



REHA FUND Sp. z o.o.
Staniewicka 14
03-310 Varšava, Poľsko
www.rehafund.pl

I/PL/15/P/N/2/08.03.2024