

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca		Upozornenie
	Označenie CE		Sériové číslo
	Referenčné číslo		Množstvo
	Dátum výroby		Týmto smerom v správnej polohe, neprevracajte
	Prečítajte si návod na použitie		Uchovávať v suchu
	Zdravotnícka pomôcka		Krehké, zaobchádzajte opatrne
	Jedinečný identifikačný kód produktu		



VÝROBCA A DISTRIBÚTOR ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
Staniewicka 14, 03-310 Varšava, www.rehafund.pl

Návod na použitie TOALETNÁ STOLIČKA MICHAEL 805

Katalógové číslo	RF-805
Celková dĺžka	64 cm
Celková šírka	51 cm
Celková hĺbka	59,5 cm
Šírka sedadla	49,5 cm
Hĺbka sedadla	41 cm
Rozsah nastavenia výšky sedadla	41 – 56,3 cm
Maximálna hmotnosť používateľa	120 kg
Hmotnosť stoličky	6 kg



UPOZORNENIE! Pred použitím stoličky si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

ÚVOD

Toaletná stolička slúži aj ako prenosná toaleta. Stoličku je možné použiť pri lôžku pacienta. Pomáha ľuďom so zníženou pohyblivosťou a starším ľuďom pri základných fyziologických činnostiach. Uľahčuje to aj starostlivosť o pacienta. Lakťové opierky uľahčujú vstávanie zo stoličky a sedenie na nej.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dodržujte nasledujúce pravidlá:

- Pred použitím toaletnej stoličky sa uistite, že:
 - výška stoličky je správne nastavená;
 - uzamykacie tlačidlá fungujú správne;
 - gumové násadce sú v dobrom stave;
 - všetky teleskopické nožičky stoličky sú nastavené v rovnakej výške
- Používajte iba originálne príslušenstvo. Použitie neoriginálnych dielov môže spôsobiť nedostatočné prispôbenie stoličky, čo môže mať za následok riziko pádu.
- Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie stoličky.
- Neskladujte stoličku pri teplote nižšej ako 0 °C.
- Každá závažná nehoda súvisiaca s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.
- Pri otváraní balenia skontrolujte neporušenosť súpravy. Ak vykazuje nejaké nezrovnalosti, kontaktujte distribútora, u ktorého ste ju zakúpili.
- Pri používaní by mala byť stolička umiestnená na rovnom, suchom a neklzavom povrchu.
- Skontrolujte správne pripevnenie odnímateľných nožičiek a svoriek na nastavenie výšky.
- Pred použitím vždy dávajte pozor na hmotnosť pacienta, ktorá nesmie prekročiť nosnosť deklarovanú výrobcou.



Nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných pokynov môže viesť k vážnym nehodám.

SEDENIE A VSTÁVANIE

- Uistite sa, že stolička je stabilná a pripravená na použitie.
- Postavte sa chrbtom k stoličke tak, aby ste sa zadnou časťou kolien dotýkali prednej časti stoličky.
- Natiahnite ruky dozadu a položte ruky na lakťové opierky.
- Pomaly si sadnite na stoličku, pokrčte lakte a ak je to možné, kolená a boky.
- Ak chcete vstať zo stoličky, položte ruky na ruky a postavte sa. Predtým, ako pustíte lakťové opierky stoličky, uistite sa, že udržiavate rovnováhu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odporúča sa pravidelne kontrolovať stoličku, či nie je poškodená alebo či nie je viditeľná známka opotrebovania. Pravidelne kontrolujte, či:
 - na ráme nebolo žiadne škripanie ani zalomenie;
 - násadce neboli poškodené – ak áno, mali by sa vymeniť;
 - žiadne iné časti toaletnej stoličky nie sú uvoľnené alebo poškodené.
2. Toaletnú stoličku sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Toaletná stolička by sa mala po vyčistení vysušiť mäkkou handričkou. Vedro je možné dezinfikovať za studena, napr. etanolom.
3. Je vhodné pravidelne kontrolovať stav zvarov.
4. Skontrolujte činnosť svoriek, skrutiek a opotrebovania svoriek.
5. Vyčistite neagresívnymi čistiacimi prostriedkami.
6. V prípade dezinfekcie použite prostriedky na báze alkoholu.
7. Zlikvidujte vybavenie v súlade s platnými predpismi.



Na čistenie stoličky nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne prostriedky.

INŠTALÁCIA

1. Nainštalujte bočné rámy stoličky (obr. 1).
2. Vložte skrutky do spodných otvorov (obr. 2).
3. Pripevnite spojovaciu priečku k zadnej časti stoličky (obr. 3).
4. Uťahnite krídlové skrutky (obr. 4).
5. Pripevnite priečniky určené pre vedro (obr. 5).
6. Nainštalujte spojovaciu priečku na prednú časť stoličky (obr. 6).
7. Upevnite operadlo a upevnite ho krídlovými skrutkami (obr. 7 a obr. 8).
8. Vložte vedro do rámu (obr. 9).
9. Nainštalujte záchodovú dosku (obr. 10).
10. Nainštalujte poklop (obr. 11).
11. Skontrolujte stabilitu stoličky (obr. 12).



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10



Obr. 11



Obr. 12

VÝŠKA

Výšku môžete nastaviť pomocou uzamykacích tlačidiel umiestnených na nožičkách stoličky. Jednou rukou stlačte uzamykacie tlačidlo (obr. 13), druhou posuňte trubicu do vhodnej výšky. Zaisťte uzamykacie tlačidlo.



Obr. 13

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Poklop	PE (polyetylén)
Opierka	PE (polyetylén)
Záchodové sedadlo	PE (polyetylén)
Rám	oceľ
Násadec	PVC (polyvinylchlorid)
Vieko na vedro	PVC (polyvinylchlorid)
Vedro	PVC (polyvinylchlorid)
stabilizačný uzáver	PVC (polyvinylchlorid)

ZÁRUKA

Výrobca ubezpečuje zákazníka, že produkt je úplne nový a kvalitný. Na výrobok sa vzťahuje záruka (podrobné záručné podmienky nájdete na webovej stránke výrobcu). Výrobok by sa mal používať v súlade s určeným účelom a odporúčaniami v návode na použitie.