

NÁVOD NA POUŽITIE REHABILITAČNÉ CHODÍTKO LUCA 803/1

I. ÚVOD

Dámy a páni,

Radi by sme sa vám poďakovali, že ste si vybrali produkt spoločnosti REHA FUND Sp. z o.o., popredného dodávateľa zdravotníckych potrieb a rehabilitačných produktov na poľskom trhu.

Návod na použitie obsahuje tipy a návrhy, ktorých znalosť je potrebná pre správne používanie produktu.

*Obrázky v návode nižšie sú len ilustračné



UPOZORNENIE! Pred použitím produktu si prečítajte návod na použitie. Výrobca nezodpovedá za nesprávne používanie výrobku, nedodržanie pravidiel bezpečného používania a za použitie v rozpore s určeným účelom.

II. CHARAKTERISTIKA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Katalógové číslo:	RF-803/1
Max. bezpečné zaťaženie:	100 Kg
Nastavenie výšky:	81-99 cm
Maximálna šírka:	50 cm
Hmotnosť:	2,5 Kg

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Rám chodítka	Oceľ + hliník
Násadce	guma

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

K chodítku je možné dokúpiť toaletnú súpravu (obr. 1) a lavicu (obr. 2).



Obr. 1



Obr. 2

III. URČENÝ ÚČEL A POUŽITIE PRODUKTU

Chodítko je určené pre starších a zdravotne postihnutých ľudí s poruchami pohybového aparátu alebo s problémami so vzpriamenou polohou. Môže byť použitý v interiéri aj exteriéri. Pomáha pri každodenných činnostiach, napr. vstávanie z postele, chôdza, používanie toalety, chôdza.

IV. KONTRAINDIKÁCIE

Kontraindikácie vzpriameného polohovania, poranenia a dysfunkcie horných končatín brániace podpore chodítka, poranenia dolných končatín brániace udržaniu rovnováhy, poruchy motorickej koordinácie, problémy s labyrintom, nestabilita chrbtice.

V. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

Dodržujte nasledovné:

1. Pred použitím chodítka vždy skontrolujte, či:
 - chodítko je nastavené na správnu výšku;
 - uzamykací mechanizmus a tlačidlá na nastavenie výšky sú správne zaistené;
 - všetky nohy chodítka sú nastavené do rovnakej výšky;
 - Násadce na nohách chodítka nie sú opotrebované – ak áno, vymeňte ich.
2. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie chodítka.
3. Pri používaní chodítka buďte vždy mimoriadne opatrný. Vyhňte sa akýmkoľvek potenciálnym nebezpečenstvám, ako sú nerovné alebo mäkké povrchy, prekážky na ceste, mokré podlahy atď.
4. Používajte iba originálne príslušenstvo. Použitie neoriginálnych dielov môže spôsobiť nedostatočné prispôsobenie chodítka, čo má za následok riziko pádu.
5. Neskladujte chodítko pri teplote pod 0 °C.
6. Každá závažná nehoda súvisiaca s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko



UPOZORNENIE! Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel bezpečného používania môže viesť k vážnym nehodám.



UPOZORNENIE! Pred použitím sa poradte so zdravotníckym pracovníkom o absencii kontraindikácií pri používaní produktu.



UPOZORNENIE! Ak je chodítko správne nastavené, používateľ by mal byť schopný udržiavať vzpriamené držanie tela s mierne ohnutými lakťovými kĺbmi. Potom pri chôdzi váhu tela preberá rám chodítka.

VI. POUŽITIE

INŠTALÁCIA

1. Výrobok je určený na vlastnú montáž bez použitia náradia.
2. Stlačte zaistovaciu páčku na ráme (obr. 3).
3. Rozložte prvú stranu rámu (obr. 4).
4. Rozložte celý rám (obr. 5).



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



UPOZORNENIE! Z bezpečnostných dôvodov, aby sa zabránilo zloženiu chodítka počas používania, bezpečnostná svorka musí byť na svojom mieste.

FUNKCIE CHODÍTKA

Chodítko má 3 funkcie:

- nastaviteľný – rám sa pohybuje pri chôdzi;
- s kolieskami – pre uľahčenie je možné kolieska, ktoré sú štandardne dostupné, namontovať na predné nohy; pri chôdzi sa rám pohybuje vpred pomocou koliesok;
- podpora pri vstávaní – rám chodítka má rukoväť v dvoch výškach.

VÝŠKA CHODÍTKA

Výšku môžete nastaviť pomocou uzamykacích tlačidiel umiestnených v nohách chodítka. Jednou rukou stlačte uzamykacie tlačidlo, druhou posuňte trubicu do vhodnej výšky. Zaistíte uzamykanie tlačidlo.

VII. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odporúča sa pravidelne kontrolovať chodítko, či nie je poškodené alebo či nemá viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne kontrolujte, či:
 - na ráme nie sú žiadne praskliny ani ohnutia,
 - násadce nie sú poškodené – ak áno, mali by sa vymeniť,
 - žiadne iné časti chodítka nie sú uvoľnené alebo poškodené.
- Chodítko sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po vyčistení by malo byť chodítko vysušené mäkkou handričkou. Toaletné vedierko je možné dezinfikovať za studena, napr. etanolom.



UPOZORNENIE! Na čistenie chodítka nepoužívajte rozpúšťadlá, bieliadlá ani abrazívne prostriedky.



UPOZORNENIE! Ak máte pochybnosti o vhodnosti zariadenia na použitie, obráťte sa na servisné stredisko výrobcu.

VIII. KONIEC POUŽÍVANIA

Ak sa pri kontrole chodiaceho rámu v súlade s odporúčaniami výrobcu zistia akékoľvek nezrovnalosti. Pozrite si pokyny: Čistenie a údržba - výrobok okamžite prestaňte používať. Po použití musí byť výrobok zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

Predpokladaná doba používania chodítka je 5 rokov. Tento čas môže byť dlhší alebo kratší v závislosti od frekvencie používania a údržby produktu.

IX. ZÁRUKA

Výrobca ubezpečuje zákazníka, že položka predaja je úplne nová a kvalitná. Na výrobok sa vzťahuje záruka (podrobné záručné podmienky nájdete na webovej stránke výrobcu). Výrobok by sa mal používať v súlade s určeným účelom a odporúčaniami v návode na použitie.

X. ZOZNAM SYMBOLOV

	Výrobca		UPOZORNENIE
	Označenie CE		Číslo série
	Referenčné číslo		Množstvo
	Dátum výroby		Týmto smerom v správnej polohe, neprevracajte
	Pozrite si návod na použitie		Skladujte v suchu
	Zdravotnícka pomôcka		Krehké, zaobchádzajte opatrne
	Jedinečný identifikačný kód produktu		Chráňte pred sľečným žiarením



REHA FUND Sp. z o.o.
Staniewicka 14,
03 – 310 Varšava, Poľsko www.rehafund.pl



I/RF-803/1/4/16.10.2024
Dátum vydania návodu na použitie: 10/2024
v.4

