

NÁVOD NA POUŽITIE
PREDĹŽENÁ SPRCHOVACIA STOLIČKA
2198



Sucesores de Manuel García S.L.
CIF B12321162
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com
www.garcia1880.com

PREDPISY:

Tento výrobok je zdravotnícka pomôcka triedy I a je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach.

Tento výrobok by sa nemal likvidovať v bežnom odpade. Na jeho likvidáciu sú určené zberné miesta. Pri likvidácii obalu a samotného výrobku prísne dodržiavajte zákonné predpisy vo vašej obci.

URČENÉ POUŽITIE


Podporná pomôcka na umývanie a sprchovanie. Je to technická pomôcka, ktorá umožňuje ľuďom so zníženou pohyblivosťou alebo zdravotným postihnutím, ktorí nemôžu sprchu používať bežným spôsobom, zostať počas kúpania v sede.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vyrobené z hliníka
- Vhodné na použitie pod vodou
- Rozmery:
 - Nastaviteľná výška: 81-91 cm
 - Výška sedadla (podlaha): 43-53 cm
 - Rozmery sedadla: 70 x 41 cm
 - Celková dĺžka: 77 cm
 - Celková hĺbka: 71 cm
- Čistá hmotnosť: 4,70 kg
- Maximálna nosnosť: 100 kg

NÁVOD NA POUŽITIE

Dve nohy sú umiestnené vo vnútri a dve vonku, čo umožňuje bezpečný vstup, státie a vystupovanie z vane.

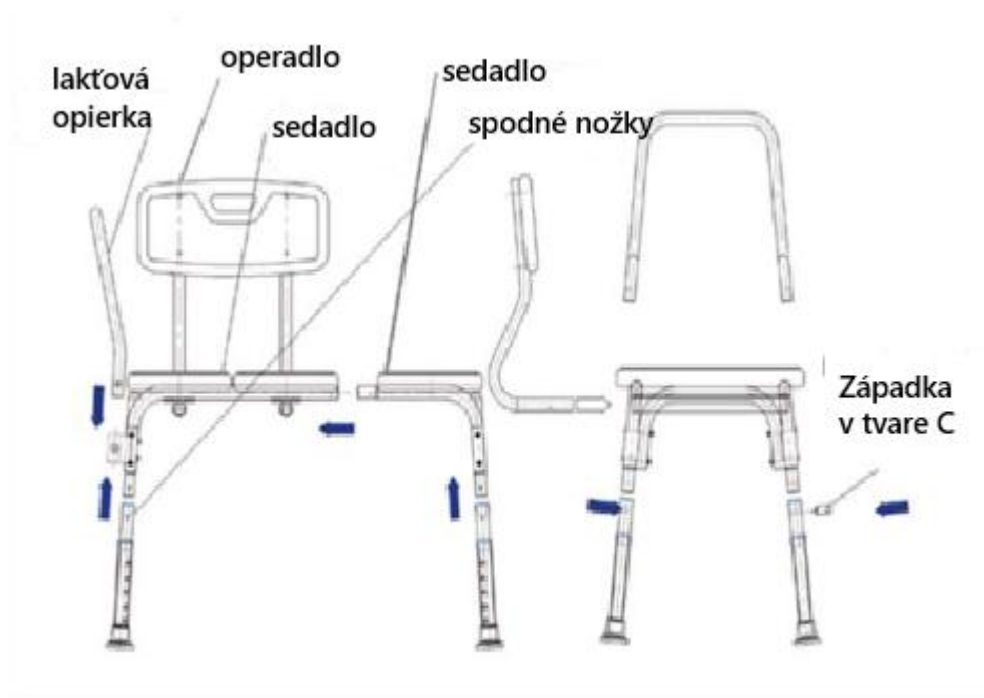

1. Zmontujte dve dosky sedadla vložením menšej do rámu väčšej. Dva zacvakávacie zámky vyskočia a zaistia sedadlo na mieste.
2. Vložte rúrky na nohy a nastavte ich na požadovanú výšku pre používateľa. Na zaistenie nohy použite západku v tvare C. Uistite sa, že všetky nohy sú zaistené v rovnakej výške.
3. Vložte operadlo do dvoch horných rúrok podľa šípok. Zámky sa vysunú a zaistia operadlo na mieste.
4. Vložte podrúčky do rámu na jednej strane podľa vyznačenia. Zámky sa vysunú a zaistia podrúčky na mieste.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pred sadnutím skontrolujte, či je rám bezpečne upevnený a či sú nohy nastavené na rovnakú výšku.
- Neupravujte konštrukciu stoličky a nekladte na ňu nič.
- Nepoužívajte stoličku ako rebrík ani ju neumiestňujte na iný nábytok.
- Neprekračujte maximálny hmotnostný limit.
- Nevykonávajte žiadne úpravy (mechanické zmeny) na výrobku, aby ste predišli ohrozeniu jeho bezpečnosti.

KONTRAINDIKÁCIE

Táto stolička nie je vhodná pre osoby s ťažkým zmyslovým postihnutím, poruchami rovnováhy alebo neschopnosťou sedieť vzpriamene.

ODPORÚČANIA NA STAROSTLIVOSŤ A UMÝVANIE

- Na čistenie použite neutrálny čistiaci prostriedok a teplú vodu. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
- Odporúča sa výrobok po každom použití osušiť čistou, mäkkou handričkou.
- Ak výrobok po každom použití nie je vysušený, okolo skrutiek sa môže objaviť hrdza. Ak sa tak stane, poraďte sa s inštalatérom, či je vhodné skrutky vymeniť.

ŽIVOTNOSŤ

Predpokladaná životnosť tohto výrobku je 2 roky pri bežnom používaní, bezpečnosti a údržbe. Po uplynutí tejto doby je možné výrobok používať, pokiaľ je v perfektnom prevádzkovom stave a je správne udržiavaný. Výrobok však môže vyžadovať výmenu určitých častí alebo komponentov z dôvodu bežného opotrebenia v kratšom období, ako je uvedené. Životnosť produktu je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania a pravidelnosťou jeho údržby.

ZÁRUKA

Záruka je trojročná (6 mesiacov pre batérie) od dátumu vystavenia faktúry za predpokladu, že produkt nebol zmenený oproti svojej pôvodnej konfigurácii. Počas záručnej doby bezplatne odstránime akúkoľvek výrobnú chybu, a to buď opravou, výmenou dielov alebo poskytnutím nového produktu, podľa nášho uváženia. Ak sa majiteľ produktu rozhodne pre opravu alebo výmenu, musí kontaktovať predajcu, ktorý bude výlučne zodpovedný za správu záruky s výrobcom. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho používania produktu, nesprávnej manipulácie, zhoršenia stavu produktu v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je voda alebo iné škodlivé, rušivé alebo korozívne chemikálie, nedostatočnej údržby, nedostatočného čistenia, straty komponentov alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov. Viac informácií nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach predaja.

UPOZORNENIE

Ak spozorujete akýkoľvek nedostatok, anomáliu alebo poruchu, ihneď o tom informujte predajcu alebo distribútora, aby mohol byť produkt vymenený alebo opravený.

Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s výrobkom musí byť nahlásený spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.