

NÁVOD NA POUŽITIE
STOLIČKA DO SPRCHY
2185



Sucesores de Manuel García S.L.
CIF B12321162
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com
www.garcia1880.com

NORMATÍVNE POŽIADAVKY

Tento výrobok je zdravotnícky výrobok triedy I a je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych výrobkoch. Pri likvidácii obalu a výrobku dodržiavajte prísne zákonné predpisy platné vo vašej krajine.

URČENÉ POUŽITIE

Pomôcka na umývanie a kúpanie. Technická pomôcka, ktorá poskytuje oporu osobe so zdravotným postihnutím alebo obmedzenou pohyblivosťou, ktorá nemôže používať bežnú sprchu, aby jej uľahčila vstávanie a poskytla istotu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Vyrobené z ocele natieranej bielou epoxidovou farbou.
- Sklopné sedadlo v tvare U na uľahčenie osobnej hygieny.
- Protišmykové sedadlo.
- Sedadlo: 41 x 40,5 cm.
- Nastaviteľná výška: 49 – 56 cm.
- Celková šírka: 50 cm
- Celková hĺbka: 47 cm
- Čistá hmotnosť výrobku: 4 kg
- Maximálna nosnosť: 136 kg

OPATRENIA

- Pred každým použitím sa uistite, že výrobok je v perfektnom stave.
- Produkt nepoužívajte, ak má viditeľné poškodenie. V prípade chýbajúcich, nesprávne namontovaných alebo poškodených dielov požiadajte o radu lekárnik alebo distribútora.
- Nevykonávajte žiadne úpravy (mechanické zmeny), aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti používania.

KONTRAINDIKÁCIE

Používanie tohto sedadla nie je vhodné pre osoby s ťažkými poruchami vnímania, poruchami rovnováhy alebo neschopnosťou sedieť.

ODPORÚČANIA PRE ÚDRŽBU A PRANIE

- Na čistenie používajte neutrálny čistiaci prostriedok a teplú vodu. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
- Po každom použití je odporúčané sedadlo utrieť čistou a mäkkou handričkou. Ak tak neurobíte, mohlo by dôjsť k jeho oxidácii.

ŽIVOTNOSŤ

Životnosť produktu závisí od podmienok používania a skladovania, ako aj od pravidelnosti údržby. Pri dodržaní pokynov uvedených v tejto príručke je možné produkt uchovať v perfektnom stave po dobu 24 mesiacov.

ZÁRUKA

Záruka je platná po dobu dvoch rokov (6 mesiacov na batérie) od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ produkt nebol zmenený vo svojej pôvodnej konfigurácii. V rámci záručnej lehoty bezplatne odstránime akúkoľvek výrobnú vadu, a to buď opravou, výmenou dielov alebo dodaním nového produktu, podľa nášho uváženia. Ak sa majiteľ produktu rozhodne pre opravu alebo výmenu, musí sa obrátiť na predajcu, ktorý je jediný zodpovedný za vybavovanie záruky s výrobcom. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho používania výrobku, nesprávnej manipulácie s ním, poškodenia výrobku v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je voda alebo iné škodlivé chemické, obštrukčné alebo korozívne látky, v dôsledku nesprávnej údržby, nedostatočného čistenia, straty komponentov alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov. Ďalšie informácie nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

UPOZORNENIE

- Ak zistíte akúkoľvek chybu, nezrovnalosť alebo poruchu, okamžite to oznámte predajcovi alebo distribútorovi, aby mohol produkt vymeniť alebo opraviť.
- Akékoľvek závažné incidenty súvisiace s produktom je potrebné nahlásiť spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.