

NÁVOD NA POUŽITIE

ZÁBRANA K POSTELI

2260



Sucesores de Manuel García S.L.

CIF B12321162

Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain

Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com

www.garcia1880.com

Pomôcka na pomoc pri vstávaní zo sedu alebo ležania. Je navrhnutá tak, aby zabránila používateľovi vypadnúť z postele.

Technické parametre

- Materiál: Oceľ s práškovou farbou
- Potiahnuté PU
- Rozmery výrobku:
- Dĺžka: 94 cm
- Šírka: 51 cm
- Nastaviteľná výška: 43,5 x 53,5 cm
- Vhodné pre všetky typy postelí
- Čistá hmotnosť: 2,8 kg
- Maximálna nosnosť: 130 kg

Údržba

- Výrobok pravidelne čistite vlhkou handričkou a potom ho osušte, aby ste predišli hrdzaveniu.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne výrobky. Nikdy nepoužívajte abrazívne výrobky.

Ak je výrobok poškodený, ihneď kontaktujte svojho distribútora.

Nepoužívajte iné náhradné diely ako tie, ktoré ponúka váš predajca.

Z bezpečnostných dôvodov výrobok neupravujte ani nemeňte; mohlo by vás to ohroziť alebo spôsobiť nehodu.


Životnosť:

Životnosť výrobku je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania a pravidelnosťou jeho údržby. Prísny dodržiavaním informácií uvedených v tomto návode na použitie je možné udržať výrobok v perfektnom stave 24 mesiacov. Prísny dodržiavaním pokynov uvedených v tomto návode je možné výrobok udržiavať v perfektnom stave 24 mesiacov.

Záruka Na naše výrobky poskytujeme záruku proti výrobným chybám dva roky od dátumu vystavenia faktúry. Viac informácií nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach predaja.

Upozornenie Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s výrobkom musí byť nahlásený príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient bydlisko.

Návod na montáž.

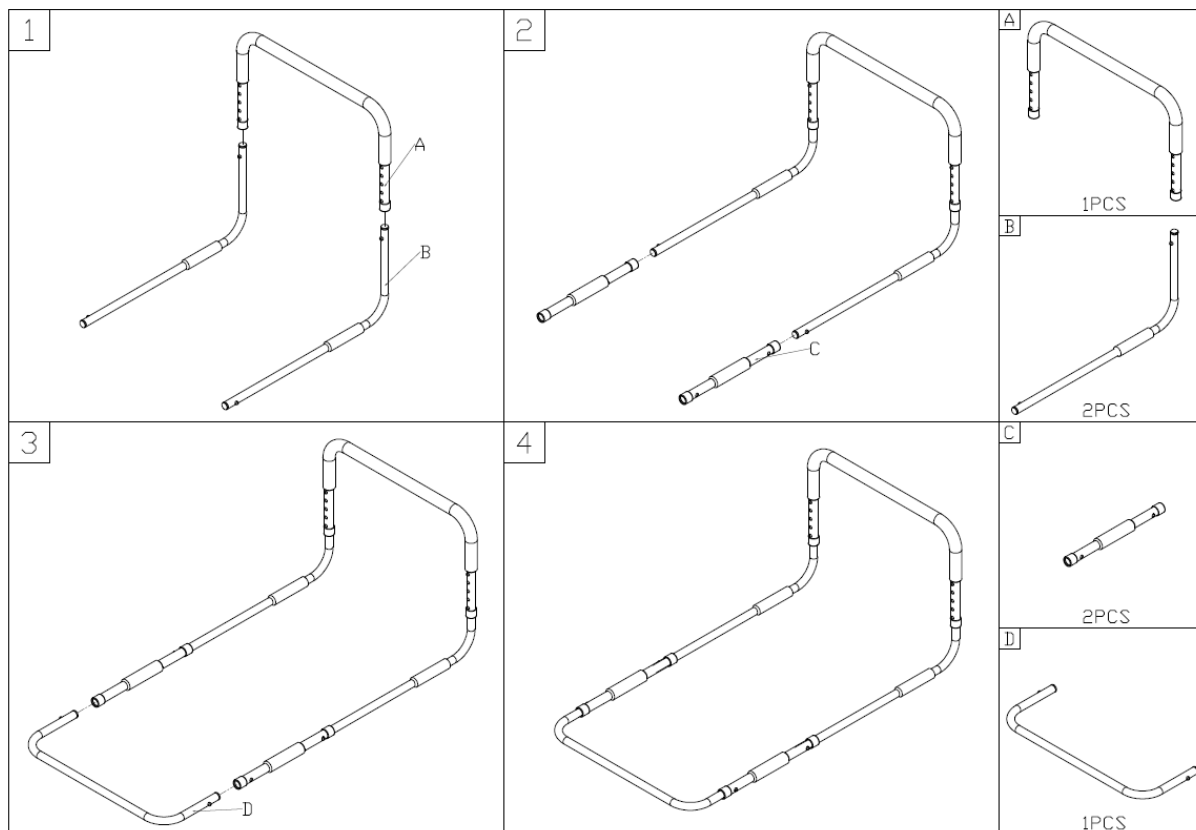

Čistenie / Ako čistiť

- Výrobok pravidelne čistite vlhkou handričkou a potom ho osušte, aby ste predišli hrdzaveniu.
- Nepoužívajte materiály, ktoré môžu poškriabať rám.

Bezpečnostné opatrenia / Upozornenie

- Pred inštaláciou skontrolujte, či je zábradlie postele vhodné pre posteľ a matrac.
- Pri manipulácii nikdy netlačte na zábradlia silou ani ich nepúšťajte.
- Uistite sa, že sú správne nainštalované a pevne ukotvené k posteli.
- ☑ Mali by sa používať iba po primeranom posúdení zdravotného stavu a potrieb pacienta, postele, matraca, miestnosti vo všeobecnosti a dostupnosti osoby zodpovednej za starostlivosť o pacienta.

Mali by sa používať až po riadnom posúdení zdravotného stavu a potrieb pacienta, postele, matraca, miestnosti vo všeobecnosti a dostupnosti osoby zodpovednej za starostlivosť o pacienta.

Uistite sa, že rodinní príslušníci alebo opatrovatelia pacienta, v ktorého posteli budú umiestnené, poznajú návod na obsluhu a môžu pacientovi pomôcť s akýmikoľvek problémami, ktoré môžu vzniknúť.

Kontraindikácie

Na používanie tohto produktu neexistujú žiadne kontraindikácie.

Ak má pacient tendenciu sa počas pobytu v posteli pohybovať, odporúča sa použiť chránič zábradlia postele, aby sa predišlo zraneniam.