

NÁVOD NA POUŽITIE
STOLIČKA DO SPRCHY S UPEVNENÍM NA STENU
2188



Sucesores de Manuel García S.L.
CIF B12321162
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com
www.garcia1880.com

Tento výrobok je zdravotníckym prostriedkom triedy I a spĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych prostriedkoch.

Tento výrobok sa nesmie likvidovať v kontajneri na odpad. Existujú špeciálne zberné miesta, kde ich môžete odovzdať. Pri likvidácii obalu a výrobku sa prísne riadte právnymi predpismi vašej komunity.

URČENÉ POUŽITIE

Podporné zariadenie na umývanie a kúpanie. Ide o technickú pomôcku, ktorá umožňuje osobám so zníženou pohyblivosťou alebo osobám, ktoré nemôžu bežne používať sprchu, zostať počas kúpania v sede.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Má otvory pre dobrý odtok vody a zabraňuje pošmyknutiu.
- Materiál sedadla: PE. protišmykový
- Materiál konštrukcie: oceľ.
- Nastaviteľná výška: 42,5 – 47,5 cm.
- Sedadlo: 49 x 29 cm.
- Rozmery nástenného taniera: 33,5 x 15,5 cm.
- Čistá hmotnosť výrobku: 5,1 kg.
- Maximálna nosnosť: 110 kg.

SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Gumené koncovky nie sú navrhnuté na zbytočné a opakované odstraňovanie. Mohlo by to viesť k ich oslabeniu a poškodeniu.
- Sprchové stoličky sa musia vždy používať na určený účel. Nesmú sa používať na žiadny iný účel. Napríklad sa nesmú používať ako vešiak na odkladanie predmetov alebo odevov, na odpočinok nôh atď.
- Na tomto výrobku nevykonávajte žiadne úpravy (mechanické zmeny), aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti jeho používania.
- Nikdy neprekračujte maximálnu nosnosť.

OPATRENIA

- Pred každým použitím sa musíte uistiť, že výrobok je v perfektnom stave.
- Pred každým použitím sa uistite, že koncovky sú v perfektnom stave. Ak vykazujú opotrebenie, okamžite kontaktujte svojho distribútora, aby ich vymenil alebo opravil.
- V prípade viditeľnej chyby výrobok nepoužívajte. V prípade chýbajúcich, nesprávne namontovaných alebo poškodených častí požiadajte o radu zariadenie alebo distribútora, kde ste výrobok zakúpili.
- Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky utiahnuté a bezpečné.
- Vždy musíte sedieť rovno a vzpriamene, aby ste predišli nebezpečenstvu prevrátenia alebo pošmyknutia.

MONTÁŽ

Odporúča sa, aby sedadlo inštaloval odborník. Odborník vie posúdiť, či je stena vhodná pre toto sedadlo, a vybrať potrebné upevňovacie systémy.

ODPORÚČANIA PRE ÚDRŽBU

- Držiak pripevnený na stenu a skrutky sú vyrobené z ocele. Po použití ich je potrebné vysušiť.
- Pravidelne čistite a sušte. Nečistoty odstráňte jemnou vlhkou handričkou a neutrálnym mydlom. Následne vysušte. Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne chemické čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť materiál výrobku.
- Nepoužívajte ani mastné produkty, ktoré môžu poškodiť materiály alebo spôsobiť, že budú klzké.

ŽIVOTNOSŤ

Predpokladaná životnosť tohto výrobku je 2 roky za normálnych podmienok používania, bezpečnosti a údržby. Po uplynutí tejto doby sa výrobok môže používať, pokiaľ je v perfektnom stave a je správne udržiavaný. V každom prípade môže výrobok vyžadovať výmenu určitých dielov alebo komponentov v dôsledku bežného opotrebenia v

kratšom čase, ako je uvedené. Životnosť je ovplyvnená podmienkami používania a skladovania a pravidelnosťou údržby.

ZÁRUKA

Záruka je na obdobie dvoch rokov (6 mesiacov na batérie) od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ produkt nebol zmenený vo svojej pôvodnej konfigurácii. V rámci záručnej lehoty bezplatne odstránime akúkoľvek výrobnú vadu, buď opravou, výmenou dielov alebo poskytnutím nového produktu, podľa nášho uváženia. Ak sa rozhodnete pre opravu alebo výmenu, majiteľ produktu sa musí obrátiť na predajcu, ktorý bude jediný zodpovedný za vybavovanie záruky s výrobcom. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho používania výrobku, nesprávnej manipulácie s ním, poškodenia výrobku v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je voda alebo iné škodlivé chemické, obštrukčné alebo korozívne látky, v dôsledku nesprávnej údržby, nedostatočného čistenia, straty komponentov alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov. Ďalšie informácie nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

UPOZORNENIE

- Ak zistíte akúkoľvek chybu, nezrovnalosť alebo poruchu, okamžite to oznámte predajcovi alebo distribútorovi, aby mohol produkt vymeniť alebo opraviť.
- Akékoľvek závažné incidenty súvisiace s produktom je potrebné nahlásiť spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.