

NÁVOD NA POUŽITIE
SCHODÍK DO VANE 2340-2341



Sucesores de Manuel García S.L.
CIF B12321162
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com
www.garcia1880.com

SCHODÍK DO VANE

Vyrobený z chrómovanej ocele s protišmykovou gumovou platformou. Model 2341 má odnímateľnú rukoväť, ktorá zvyšuje bezpečnosť pri státi na stoličke.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Schodík do vane 2340

- Bez rukoväte
- Základňa je pokrytá gumou, aby sa zabránilo šmyknutiu. Koncovky sú vyrobené z rovnakého materiálu.
- Rozmery výrobku: 42 x 35 x 23 cm
- Výška základne: 23 cm
- Maximálna nosnosť: 220 kg

Schodík do vane 2341

- S rukoväťou
- Základňa je pokrytá gumou, aby sa zabránilo pošmyknutiu. Koncovky sú vyrobené z rovnakého materiálu.
- Rozmery výrobku: 42 x 35 x 82,5 cm
- Výška základne: 23 cm
- Maximálna nosnosť: 150 kg

KONTRAINDIKÁCIE

Schodík do vane nie je vhodný pre osoby s vážnymi poruchami vnímania, poruchami rovnováhy alebo neschopnosťou sedieť.

ODPORÚČANIA PRE ÚDRŽBU A PRANIE

- Na čistenie použite neutrálny čistiaci prostriedok a teplú vodu. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
- Nepoužívajte materiály, ktoré by mohli poškriabať konštrukciu.
- Po čistení odporúčame vysušiť čistou a suchou handričkou.

ŽIVOTNOSŤ

Životnosť výrobku závisí od podmienok používania a skladovania a od pravidelnosti údržby. Pri dodržaní pokynov uvedených v tejto návode je možné výrobok uchovať v perfektnom stave po dobu 24 mesiacov.

ZÁRUKA

Záruka je platná po dobu dvoch rokov od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ produkt nebol zmenený vo svojej pôvodnej konfigurácii. V rámci záručnej lehoty bezplatne odstránime akúkoľvek výrobnú vadu, a to buď opravou, výmenou dielov alebo dodaním nového produktu, podľa nášho uváženia. Ak sa majiteľ produktu rozhodne pre opravu alebo výmenu, musí sa obrátiť na predajcu, ktorý je jediný zodpovedný za vybavovanie záruky s výrobcom. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho používania výrobku, nesprávnej manipulácie s ním, poškodenia výrobku v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je voda alebo iné škodlivé chemické, obštrukčné alebo korozívne látky, v dôsledku nesprávnej údržby, nedostatočného čistenia, straty komponentov alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov. Ďalšie informácie nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

UPOZORNENIE

- Ak zistíte akúkoľvek chybu, nezrovnalosť alebo poruchu, okamžite to oznámte predajcovi alebo distribútorovi, aby mohol produkt vymeniť alebo opraviť.
- Akékoľvek závažné incidenty súvisiace s produktom je potrebné nahlásiť spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.