

VANKÚŠIK GÉLOVÝ NA PRSIA

2907



Sucesores de Manuel García S.L. CIF B12321162
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com
www.garcia1880.com V3 022023

NÁVOD

Opakovane použiteľný gélový obklad na teplú a studenú terapiu. Užitočný na zmiernenie bolesti a svalového napätia.

Predpisy:

Toto je zdravotnícka pomôcka triedy I v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach. Tento výrobok by sa nemal likvidovať v kontajneri na všeobecný odpad. Na jeho likvidáciu sú určené zberné miesta. Pri likvidácii obalu a výrobku prísne dodržiavajte právne predpisy vašej obce.

Technické vlastnosti

- Rozmery: priemer 15 cm
- Vonkajší materiál: PVC a nylon
- Vnútorný obsah: Polymér kyseliny akrylovej, glycerol, deionizovaná voda
- Odporúčaná trvanlivosť: 3 roky

Upozornenia

- Pri použití na liečbu pooperačnej traumy dodržiavajte pokyny lekára.
- Pred každým použitím sa uistite, že je výrobok v perfektnom stave.
- Vždy skontrolujte dátum spotreby uvedený na etikete výrobku; nepoužívajte, ak už uplynula doba použiteľnosti.
- Nepoužívajte výrobok, ak je viditeľný poškodený. Ak sú niektoré časti poškodené, poraďte sa s lekárnikom alebo distribútorom.
- Aby ste predišli omrzlinám alebo popáleninám, vždy pred každým použitím zabaľte balenie do čistého a suchého uteráka.
- Studená alebo horúca terapia sa vo všeobecnosti odporúča pre ošetrenia nie dlhšie ako 20 minút na jedno použitie.
- Prehriatie alebo dlhodobá aplikácia môže spôsobiť zranenie.
- Deti by mali tento výrobok používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Neotvárajte balenie a neprehliťajte jeho obsah. Ak dôjde k náhodnému prehltnutiu obsahu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak sa obsah dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, ihneď ich vypláchnite vodou. Ak podráždenie alebo začervenanie pretrváva, poraďte sa s lekárom.

Údržba

1. Gélové balenie po každom použití osušte.
2. Neprať v práčke.
3. Nesušiť v sušičke.

Kontraindikácie

- Produkt by sa mal vždy používať zabalený v čistom, suchom uteráku, aby sa predišlo omrzlinám alebo popáleninám.
- Tento produkt je určený len na vonkajšie a povrchové použitie. Ak dôjde k náhodnému prehltnutiu obsahu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Odporúčania na použitie:

Tento gélový obklad na studenú/teplú termoterapiu je účinnou pomôckou pri aplikácii chladu alebo tepla priamo na požadované miesto. Jeho veľkosť umožňuje jeho umiestnenie na rôzne miesta.

Chladienie (mraznička):

1. Pred každým použitím vložte obklad do mrazničky aspoň na 15 – 20 minút.
2. Počas používania sa odporúča obklad prikryť čistým uterákom.
3. Pri aplikácii na postihnuté miesto zabaľte obklad do suchého, čistého uteráka.

Teplo (kúpeľ s horúcou vodou)

1. Pripravte si hrniec s vodou a zohrejte ho.
2. Keď je voda horúca (max. 80 °C), ponorte obklad do horúcej vody na 10 minút. Voda nesmie vriieť, keď vložíte obklad.
3. Po vybratí obkladu z vody počkajte aspoň jednu minútu pred jeho aplikáciou.
4. Pred aplikáciou na postihnuté miesto zabaľte horúci obklad čistým uterákom.

Zahrievanie (mikrovlnná rúra) / Horúce (mikrovlnná rúra)

1. Pred vložením do mikrovlnnej rúry sa uistite, že je gél rovnomerne rozložený.
2. Vložte obklad do mikrovlnnej rúry (odporúča sa 1000 W).
3. Zahrievajte obklad 50 sekúnd na nízky výkon. Doba ohrevu sa bude líšiť v závislosti od výkonu mikrovlnnej rúry.
4. Ak chcete, aby bol obklad teplejší, zahrievajte ho v 10-sekundových intervaloch, kým sa nedosiahne požadovaná teplota.
5. Pred aplikáciou počkajte aspoň jednu minútu.

Životnosť

Životnosť tohto výrobku je uvedená v dátume spotreby uvedenom na štítku výrobku. Pred použitím skontrolujte dátum spotreby.

Upozornenie

Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s výrobkom musí byť nahlásený spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Záruka

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu na akékoľvek výrobné chyby. Uschovajte si doklad o kúpe. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo zhoršením stavu či zlou údržbou v dôsledku nedodržania návodu na použitie.