

VANKÚŠIK GÉLOVÝ NA KOLENO S UPEVNENÍM

2904



Sucesores de Manuel García S.L. CIF B12321162
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com
www.garcia1880.com V3 022023

NÁVOD

Určené použitie:

Opakovane použiteľný gélový vankúšik na teplú a studenú terapiu. Užitočné na zmiernenie bolesti a svalového napätia.

Predpisy:

Zdravotnícka pomôcka triedy I v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach. Tento výrobok by sa nemal likvidovať v kontajneri na všeobecný odpad. Na jeho likvidáciu sú určené zberné miesta. Pri likvidácii obalu a výrobku prísne dodržiavajte právne predpisy vašej obce.

Technické vlastnosti

- Rozmery: 15 x 15 cm
- Vonkajší materiál: PVC a nylon
- Vnútorň obsah: Polymér kyseliny akrylovej, glycerol, deionizovaná voda
- Odporúčaná trvanlivosť: 3 roky

Upozornenia

- Pri použití na liečbu pooperačnej traumy, dodržiavajte pokyny lekára.
- Pred každým použitím sa uistite, že je výrobok v perfektnom stave. Vždy skontrolujte dátum spotreby uvedený na štítku výrobku; nepoužívajte, ak uplynula doba použiteľnosti.

Nepoužívajte výrobok, ak má viditeľnú chybu. Ak sú niektoré časti poškodené, poraďte sa s lekárnikom alebo distribútorom.

Aby ste predišli omrzlinám alebo popáleninám, vždy pred každým použitím zabaľte balenie do čistého a suchého uteráka.

Terapia studenou alebo teplou vodou sa vo všeobecnosti odporúča pre ošetrenia nie dlhšie ako 20 minút na jedno použitie. Prehriatie alebo dlhodobá aplikácia môže spôsobiť zranenie.

Deti by mali tento výrobok používať iba pod dohľadom dospeléj osoby. Neotvárajte balenie a/alebo neprehliťajte jeho obsah. Ak sa obsah dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, ihneď ich vypláchnite vodou. Ak podráždenie alebo začervenanie pretrváva, poraďte sa s lekárom. Len na vonkajšie použitie; obsah nie je určený na prehltnutie. Ak dôjde k náhodnému prehltnutiu obsahu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontraindikácie

- Produkt by sa mal vždy používať zabalený v čistom, suchom uteráku, aby sa predišlo omrzlinám alebo popáleninám.
- Tento produkt je určený len na vonkajšie a povrchové použitie. Ak dôjde k náhodnému prehltnutiu obsahu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Odporúčania na použitie: Tento gélový obklad na studenú/teplú termoterapiu je účinnou pomôckou na priame pôsobenie chladu alebo tepla na požadované miesto. Jeho veľkosť umožňuje jeho umiestnenie na rôzne miesta.

Chladenie (mraznička):

1. Pred použitím vložte obklad do mrazničky aspoň na 10-15 minút. Pred každým použitím vložte obklad do mrazničky aspoň na 10-15 minút.
 2. Počas používania sa odporúča obklad prikryť čistým uterákom.
- Pri prikladaní na postihnuté miesto zabaľte obklad do suchého, čistého uteráka.

Teplo (kúpeľ s horúcou vodou)

1. Pripravte si hrniec s vodou a zohrejte ho.
2. Keď je voda horúca (max. 80 °C), ponorte obklad do horúcej vody na 10-15 minút. Voda nesmie vriieť, keď vložíte obklad.

3. Po vybratí obkladu z vody počkajte aspoň jednu minútu pred jeho aplikáciou.
4. Na zabalenie obkladu použite čistý uterák a priložte teplo na postihnuté miesto. Pred aplikáciou horúceho obkladu na požadované miesto použite čistý uterák.

Zahrievanie (mikrovlnná rúra) / Horúce (mikrovlnná rúra)

1. Pred vložením do mikrovlnnej rúry sa uistite, že je gél rovnomerne rozložený.
2. Vložte obklad do mikrovlnnej rúry (odporúča sa 1000 W).
3. Zahrievajte obklad 50 sekúnd na nízky výkon. Doba ohrevu sa bude líšiť v závislosti od výkonu mikrovlnnej rúry.
4. Ak chcete, aby bolo teplejšie, zahrievajte ho v 10-sekundových intervaloch, kým sa nedosiahne požadovaná teplota.
5. Pred aplikáciou počkajte aspoň jednu minútu.

Údržba

1. Gélové balenie po každom použití osušte.
2. Neprať v práčke.
3. Nesušiť v sušičke.

Životnosť

Životnosť tohto výrobku je uvedená v dátume spotreby uvedenom na štítku výrobku. Pred použitím skontrolujte dátum spotreby.

Upozornenie

Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s výrobkom musí byť nahlásený spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Záruka

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu na akékoľvek výrobné chyby. Uschovajte si doklad o kúpe. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo zhoršením stavu či zlou údržbou v dôsledku nedodržania návodu na použitie.