

KLINOVÝ VANKÚŠ POD NOHY

3014



NÁVOD

Použitie:

Vankúš na opierku nôh proti kŕčovým žilám sa odporúča ľuďom, ktorí chcú predchádzať kŕčovým žilám, najmä na oddych ťažkých a unavených nôh. Tento klinovitý vankúš má liečivé vlastnosti. Používa sa aj ako opora pri posttraumatickej terapii, na boj proti prekrveniu alebo ako domáci doplnok na relaxáciu.

- Podporuje lepšie držanie tela.
- Odporúča sa na prevenciu kŕčových žíl v nohách.
- Uľahčuje odpočinok dolných končatín a zvyšuje pohodlie. Uľahčuje odpočinok dolných končatín a zvyšuje pohodlie.

Môže sa použiť aj na chrbát pri sedení, čím sa predchádza nepohodliu v dolnej časti chrbta alebo bedrovej oblasti.

Technické vlastnosti

Odnímateľný poťah

Rozmery: 70 x 40 x 17 cm

Vnútorň materiál: 25D polyuretán

Vonkajší materiál: 190g 3D tkanina

Čistá hmotnosť: 1400 g

Upozornenia

Pretože ide o horľavý výrobok, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani zdroju tepla. Keďže ide o horľavý výrobok, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.

Pokyny na pranie a sušenie / Starostlivosť

- Poťah by sa mal pravidelne prať ručne pri maximálnej teplote 30 °C s neutrálnym mydlom.
- Vnútorň strana vankúša by sa mala vetrať a vždy sa vyhýbajte vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla. Vnútorň stranu neperte v práčke, pretože by to mohlo poškodiť látku a spôsobiť stratu jej pôvodného tvaru.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá ani alkohol.
- Nesušte za konce. Nevešajte za konce.

Upozornenie

Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s výrobkom musí byť nahlásený spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Životnosť

Životnosť výrobku je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania a pravidelnosťou jeho údržby.

Prísny dodržiavaním informácií uvedených v tomto návode na použitie je možné udržať výrobok v perfektnom stave 24 mesiacov. Životnosť výrobku je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania a pravidelnosťou jeho údržby. Dôsledným dodržiavaním údajov uvedených v tomto návode na použitie je možné udržať výrobok v perfektnom stave 24 mesiacov.

Záruka / Záruka

Naším zákazníkom poskytujeme záruku proti výrobným chybám na dva roky od dátumu vystavenia faktúry. Viac informácií nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach predaja.