

NÁVOD NA POUŽITIE
OTOČNÁ STOLIČKA DO VANE
21871



Sucesores de Manuel García S.L.
CIF B12321162
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com
www.garcia1880.com

PREDPISY:

Tento výrobok je zdravotnícka pomôcka triedy I a je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach. Pri likvidácii obalu a výrobku prísne dodržiavajte zákonné predpisy vašej obce.

URČENÉ POUŽITIE

Pomocná pomôcka na umývanie a kúpanie. Technická pomôcka, ktorá poskytuje oporu osobe so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou, ktorá nemôže bežne používať sprchu, na uľahčenie vstávania a zaistenie bezpečnosti.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vyrobené z hliníka
- Vhodné na použitie pod vodou
- Ergonomický dizajn pre väčšie pohodlie
- Otáčanie: 360° a aretácia v 4 polohách
- Sedadlo v tvare U pre uľahčenie osobnej hygieny
- Protišmykové sedadlo
- Rozmery:
 - o Sedadlo: 40 x 40 cm
 - o Celková výška: 51 cm. Sedadlo: 35 cm. Podrúčky: 18 cm alebo Nastaviteľná šírka (v závislosti od vane): 67 - 72 cm
 - o Celková hĺbka: 53 cm
- Čistá hmotnosť výrobku: 4,4 kg
- Maximálna nosnosť: 130 kg

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pred každým použitím sa uistite, že je výrobok v perfektnom stave.
- Nepoužívajte výrobok, ak je na ňom viditeľná chyba. V prípade chýbajúcich, nesprávne namontovaných alebo poškodených častí sa poraďte s lekárnikom alebo distribútorom.
- Nevykonávajte žiadne úpravy (mechanické zmeny), aby ste predišli ohrozeniu jeho bezpečnosti.

KONTRAINDIKÁCIE

Toto sedadlo nie je vhodné pre osoby s ťažkým zmyslovým postihnutím, poruchami rovnováhy alebo neschopnosťou sedieť vzpriamene.

ODPORÚČANIA NA STAROSTLIVOSŤ A UMÝVANIE

Na čistenie použite neutrálny čistiaci prostriedok a teplú vodu. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.

Po každom použití sa odporúča sedadlo osušiť čistou, mäkkou handričkou.

ŽIVOTNOSŤ

Životnosť produktu je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania, ako aj pravidelnosťou jeho údržby. Prísny dodržiavaním pokynov uvedených v tejto príručke je možné udržať ho v perfektnom stave 24 mesiacov.

ZÁRUKA

Záruka platí 2 roky (6 mesiacov pre batérie) od dátumu vystavenia faktúry za predpokladu, že produkt nebol zmenený oproti svojej pôvodnej konfigurácii. Počas záručnej doby bezplatne odstránime akúkoľvek výrobnú chybu, a to buď opravou, výmenou dielov alebo poskytnutím nového produktu podľa nášho uváženia. Ak chce majiteľ produktu požiadať o opravu alebo výmenu, musí kontaktovať predajcu, ktorý bude výlučne zodpovedný za správu záruky s výrobcom. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho používania produktu, nesprávnej manipulácie, zhoršenia stavu produktu v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je voda alebo iné škodlivé, rušivé alebo korozívne chemikálie, nedostatočnej údržby, nedostatočného čistenia, straty komponentov alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov. Viac informácií nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach predaja.

UPOZORNENIE

- Ak spozorujete akýkoľvek nedostatok, anomáliu alebo poruchu, ihneď o tom informujte predajcu alebo distribútora, aby mohol byť produkt vymenený alebo opravený.
- Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s produktom musí byť nahlásený