

NÁVOD NA POUŽITIE

SKLOPNÉ MADLO

21782



Sucesores de Manuel García S.L.

CIF B12321162

Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain

Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com

www.garcia1880.com

PREDPISY

Tento výrobok je zdravotnícka pomôcka triedy I a je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach. Pri likvidácii obalu a výrobku prísne dodržiavajte právne predpisy vašej obce.

POUŽITIE

Pomôcka na umývanie a kúpanie. Technická pomôcka, ktorá poskytuje oporu osobe so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou, ktorá nemôže bežne používať sprchu, na uľahčenie vstávania a zaistenie bezpečnosti.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Skladacia
- Celková dĺžka: 85 cm
- Vnútoraná výška: 14,5 cm
- Vonkajšia výška: 21 cm
- Rozmery dosky: 10 x 30 cm
- Čistá hmotnosť: 3 kg
- Maximálna nosnosť: 100 kg, ale to musí vždy overiť váš inštalatér na povrchu, kde je nainštalovaná.

INŠTALÁCIA

1. Odporúča sa profesionálna inštalácia.
2. Pred inštaláciou sa uistite, že povrch je čistý a suchý.
3. Kotvy na koncoch sú predvŕtané pre montáž na stenu.
4. Skrutky sú súčasťou balenia*. Tie závisia od typu steny alebo dlaždice, na ktorú bude madlo nainštalované. Kontaktujte, prosím, svojho inštalatéra.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pred každým použitím sa uistite, že je výrobok v perfektnom stave.
- Nepoužívajte výrobok, ak je na ňom viditeľná chyba. Ak niektoré časti chýbajú, sú nesprávne namontované alebo poškodené, poraďte sa so svojím lekárnikom alebo distribútorom.
- Tieto madlá sú určené na pomoc s mobilitou a nie sú určené na podopretie celej telesnej hmotnosti.
- Nevykonávajte žiadne úpravy (mechanické zmeny), aby ste predišli ohrozeniu ich bezpečného používania.

KONTRAINDIKÁCIE

Neinštalujte tieto madlá pre nevidiacich alebo zrakovo postihnutých osôb.

ŽIVOTNOSŤ

Životnosť produktu je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania, ako aj pravidelnosťou jeho údržby. Prísny dodržiavaním pokynov uvedených v tejto príručke je možné udržať ho v perfektnom stave 24 mesiacov.

ZÁRUKA

Záruka platí dva roky (6 mesiacov pre batérie) od dátumu vystavenia faktúry za predpokladu, že produkt nebol zmenený oproti svojej pôvodnej konfigurácii. Počas záručnej doby bezplatne odstránime akúkoľvek výrobnú chybu, a to buď opravou, výmenou dielov alebo poskytnutím nového produktu podľa nášho uváženia. Ak chce majiteľ produktu požiadať o opravu alebo výmenu, musí kontaktovať predajcu, ktorý bude výlučne zodpovedný za správu záruky s výrobcom. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho používania produktu, nesprávnej manipulácie, zhoršenia stavu produktu v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je voda alebo iné škodlivé, rušivé alebo korozívne chemikálie, nedostatočnej údržby, nedostatočného čistenia, straty komponentov alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov. Viac informácií nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach predaja.

UPOZORNENIE

- Ak spozorujete akýkoľvek nedostatok, anomáliu alebo poruchu, ihneď o tom informujte predajcu alebo distribútora, aby mohol byť produkt vymenený alebo opravený.
- Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s produktom musí byť nahlásený spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.