

NÁVOD NA POUŽITIE
CHODÍTKO s nosnosťou do 180kg
2227XL



Sucesores de Manuel García S.L.
CIF B12321162
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com
www.garcia1880.com

Tento výrobok je zdravotnícky výrobok triedy I a je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych výrobkoch. Pri likvidácii obalu a výrobku prísne dodržiavajte zákonné predpisy platné vo vašej krajine.

URČENÉ POUŽITIE

Pomôcka na chôdzu ovládaná oboma rukami. Poskytuje mobilitu na kolesách a oporu tela osobám s problémami s pohyblivosťou, rovnováhou alebo s obmedzenou schopnosťou chôdze.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Skladateľná hliníková konštrukcia
- Vráťane vrečka pod sedadlom.
- Má blokovanie kolies. Aktivuje sa pomocou rukoväťou.
- 4 kolieska s priemerom 200 mm
- Výškovo nastaviteľné sedadlo a rukoväťe
- Rozmery výrobku:
 - o Výška sedadla: 52 – 57 cm
 - o Šírka sedadla: 57 cm
 - o Výškovo nastaviteľné rukoväťe: 83 – 100 cm
 - o Celková šírka: 73 cm
 - o Celková hĺbka: 66 – 71 cm
- Maximálna hmotnosť používateľa: 180 kg
- Čistá hmotnosť: 8,6 kg

SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Rollatory sa musia vždy používať na svoj účel. Nesmú sa používať na iný účel. Napríklad sa nesmú používať ako invalidné vozíky, ako kreslá na oddych atď.
- Možno ich používať v interiéri aj exteriéri.
- Nevykonávajte žiadne úpravy (mechanické zmeny), aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti používania.
- Neprekračujte maximálnu hmotnosť.

AKO POUŽÍVAŤ

1. Potlačte rollator a umiestnite ho pohodlne pred seba, pričom sa uistite, že všetky štyri kolesá sa dotýkajú zeme.
2. Opatrne kráčajte dopredu a potláčajte rollator pomocou koliesok, ktoré umožňujú pohyb.
3. Vždy sa držte vzpriamene. Nezabudnite, že rukoväťe sú výškovo nastaviteľné, aby ste si mohli nastaviť ideálnu polohu a predišli problémom s chrbtom.
4. Na záver odporúčame chodiť pomalými a krátkymi krokmi, pozeráť sa dopredu, držať chrbát čo najviac vzpriamený a robiť si prestávky podľa potreby, aby ste sa nepreťažili.

OPATRENIA

- Pred každým použitím sa uistite, že je výrobok v perfektnom stave.
- Nepoužívajte výrobok, ak má viditeľné poškodenie. V prípade chýbajúcich, nesprávne nastavených alebo poškodených častí požiadajte o radu lekárnik alebo distribútora.
- Pred použitím skontrolujte, či sú rukoväťe nastavené na rovnakú výšku a či je táto výška vhodná pre používateľa.