

NÁVOD NA POUŽITIE
Toaletná stolička
do nosnosti 225kg 2170XL



FOSHAN HUAFUKANG MEDICAL TECHNOLOGY Co., LTD
Youhe Industry Area, Luoxing, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China.
SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909 VA Capelle aan den IJssel, Netherlands,
Sucesores de Manuel Garcia S.L
Ctra Segorbe Castellnovo Km 0, 12400 Segorbe, Castellón, Spain

NORMATÍVNE POŽIADAVKY

Tento výrobok je zdravotnícky výrobok triedy I a je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych výrobkoch.

Tento výrobok sa nesmie vyhadzovať do kontajnera na odpad. Existujú špeciálne zberné miesta, kde ich môžete odovzdať. Pri likvidácii obalu a výrobku prísne dodržiavajte zákonné predpisy platné vo vašej krajine.

URČENÉ POUŽITIE

Toaletné kreslo funguje ako prenosné WC. Kreslo je možné použiť pri lôžku pacienta. Pomáha ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou (trvalá alebo periodická) a starším ľuďom pri základných fyziologických činnostiach. Stolička sa dá použiť aj ako záchod alebo bežná stolička na sedenie. Kreslo uľahčuje starostlivosť o pacienta. Bočné lakťové opierky uľahčujú vstávanie a sedenie na stoličke.

Toaletné kreslo možno použiť aj na umývanie a sprchovanie. Ide o technickú pomôcku, ktorá umožňuje ľuďom so zníženou pohyblivosťou alebo hendikepom, ktorí nemôžu konvenčne využívať sprchu, zostať pri kúpeli sedieť.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zosilnená oceľová konštrukcia s vaničkou a vekom.
- Sklopné ramená pre ľahšie nastupovanie a vystupovanie.
- Rozmery výrobku:
 - o Šírka: 75 cm
 - o Hĺbka: 55 cm
 - o Nastaviteľná výška: 76 - 86 cm
 - o Nastaviteľná výška sedadla: 50-61 cm
 - o Šírka sedadla: 65 cm
- Čistá hmotnosť: 9,3 kg
- Maximálna hmotnosť používateľa: 225 kg

SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Nie je odporúčané nakláňať sa dopredu (napr. pri viazaní topánok, zdvíhaní predmetov zo zeme atď.), pretože používateľ by mohol spadnúť.
- Toaletné stoličky sa musia vždy používať na svoj účel. Nesmú sa používať na iné účely. Napríklad sa nesmú používať ako invalidné vozíky, kreslá na oddych atď.
- Vhodné na použitie v interiéri.
- Nevykonávajte žiadne úpravy (mechanické zmeny), aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti používania.
- Neprekračujte maximálnu hmotnosť.

OPATRENIA

- Pred každým použitím sa uistite, že je výrobok v perfektnom stave.
- V prípade viditeľnej chyby výrobok nepoužívajte. V prípade chýbajúcich, nesprávne namontovaných alebo poškodených dielov požiadajte o radu lekárnik alebo distribútora.
- Pred každým použitím sa uistite, že koncovka je v perfektnom stave. Ak vykazuje opotrebenie, okamžite kontaktujte predajcu, aby ju vymenil alebo opravil.
- Pred použitím skontrolujte, či sú nožičky nastavené na rovnakú výšku a či je táto výška vhodná pre používateľa.

- Nedodržanie pokynov, varovaní a poznámok v návode na použitie môže spôsobiť fyzické zranenia vám alebo tretím osobám alebo poškodenie výrobku.
- Pri používaní tohto výrobku pamätajte, že jeho stabilita závisí od toho, či sú všetky štyri nohy v kontakte s podlahou, a preto by sa tento výrobok mal používať iba na rovných a pevných povrchoch.

KONTRAINDIKÁCIE

Produkt nie je určený na používanie osobami s vážnymi poruchami rovnováhy alebo funkčnými poruchami vnímania.

ODPORÚČANIA PRE ÚDRŽBU A PRANIE

- Pravidelne čistite a sušte. Nečistoty odstráňte jemnou vlhkou handričkou a neutrálnym mydlom. Následne vysušte. Nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky, ktoré môžu poškodiť materiál výrobku.
- Nepoužívajte ani mastné produkty, ktoré môžu poškodiť materiály alebo spôsobiť, že výrobok bude klzký.
- Keď výrobok nepoužívate, uložte ho na suchom mieste pri izbovej teplote.

ŽIVOTNOSŤ

Predpokladaná životnosť tohto výrobku je 2 roky za normálnych podmienok používania, bezpečnosti a údržby. Po uplynutí tejto doby sa výrobok môže používať, pokiaľ je v perfektnom stave a je správne udržiavaný. V každom prípade môže výrobok vyžadovať výmenu určitých dielov alebo komponentov v dôsledku bežného opotrebenia v kratšom čase, ako je uvedené. Životnosť je ovplyvnená podmienkami používania a skladovania a pravidelnosťou údržby.

ZÁRUKA

Záruka je na obdobie dvoch rokov (6 mesiacov na batérie) od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ produkt nebol zmenený vo svojej pôvodnej konfigurácii. V rámci záručnej lehoty bezplatne odstránime akúkoľvek výrobnú vadu, buď opravou, výmenou dielov alebo poskytnutím nového produktu, podľa nášho uváženia. Ak sa rozhodnete pre opravu alebo výmenu, majiteľ produktu sa musí obrátiť na predajcu, ktorý bude jediný zodpovedný za vybavovanie záruky s výrobcom. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho používania výrobku, nesprávnej manipulácie s ním, poškodenia výrobku v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je voda alebo iné škodlivé chemické, obštrukčné alebo korozívne látky, v dôsledku nesprávnej údržby, nedostatočného čistenia, straty komponentov alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov. Ďalšie informácie nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

UPOZORNENIE

- Ak zistíte akúkoľvek chybu, nezrovnalosť alebo poruchu, okamžite to oznámte predajcovi alebo distribútorovi, aby mohol produkt vymeniť alebo opraviť.
- Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s produktom je potrebné nahlásiť spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky s.r.o.