



NÁVOD NA POUŽITIE
Ergonomická bedrová opierka
REF 3009



Sucesores de Manuel García S.L.
CIF B12321162
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com
www.garcia1880.com

Použitie

Výrobok na prevenciu bolestí dolnej časti chrbta, primárne určený na udržanie prirodzeného zakrivenia chrbtice. Poskytne skvelý pocit pohody a odpočinku.

Je veľmi užitočný na zaujatie správneho držania tela pri sedení a na predchádzanie následnému svalovému nepohodliu alebo bolestiam chrbta.

Odporúčané použitie

- Ergonomická bedrová opierka pomáha rozložiť tlak vyvolaný telesnou hmotnosťou a zabraňuje jeho hromadeniu v jednej konkrétnej oblasti. To uvoľňuje napätie v rôznych častiach tela. Jej použitie zabraňuje hromadeniu tlaku v konkrétnej oblasti chrbta (bedrová oblasť), pretože tlak sa rozkladá na rôzne oblasti, čím sa uvoľňuje akékoľvek napätie.
- Použitie bedrového vankúša podporuje vyváženejšie držanie tela, čím sa zlepšuje pohodlie pracovníkov a spríjemňuje pracovný deň.
- Podporuje neutrálnejšie držanie tela pre zlepšenie pohodlia. Bežne ho používajú kancelárski pracovníci a vodiči, ktorí trávajú dlhé hodiny sedením.
- Výrazne sa zlepšuje poloha bedrovej chrbtice, čo výrazne znižuje bolesti chrbta.

Technické vlastnosti:

- Odnímateľný poťah
- Rozmery: 36 x 34 x 12 cm
- Vnútorň materiál: Vstrekovaná viskoelastická pena D80
- Vonkajší materiál: Poplin
- Čistá hmotnosť: 770 g

Pokyny na starostlivosť

- Poťah je možné pravidelne prať ručne pri maximálnej teplote 30 °C s neutrálnym mydlom.
- Keďže je vyrobený z PU, nemožno ho žehliť.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá ani alkohol.
- Výplň je potrebné pravidelne vetrať.
- Ak je potrebné výplň prať, odporúča sa to urobiť ručne pri maximálnej teplote 30 °C.
- Nie je možné prať v práčke, neumožňuje sušenie a žehlenie.
- Nevešajte za konce.

Bezpečnostné opatrenia - Upozornenie

- Pred každým použitím sa uistite, že je výrobok v perfektnom stave.
- Keďže ide o horľavý výrobok, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani zdroju tepla.

Životnosť

Životnosť výrobku je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania a pravidelnosťou jeho údržby. Prísny dodržiavanie informácií uvedených v tomto návode na použitie je možné udržať ho v perfektnom stave 24 mesiacov.

Záruka

Na naše výrobky poskytujeme záruku proti všetkým výrobným chybám dva roky od dátumu vystavenia faktúry. Viac informácií nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Upozornenie:

Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s výrobkom musí byť nahlásený spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o., Polárna 6, 040 12 Košice, www.sanitaske.sk