



NÁVOD NA POUŽITIE
KLINOVÝ VANKÚŠ
3017



Sucesores de Manuel García S.L.

CIF B12321162

Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain

Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com

www.garcia1880.com

Návod: KLINOVÝ VANKÚŠ 3017

Použitie

Tento klinovitý vankúš je obzvlášť užitočný na prevenciu preležanín a na použitie pri masážach a fyzioterapeutických rehabilitačných cvičeniach, pretože sa prispôsobuje tvaru tela používateľa a požadovanému držaniu tela. Umožňuje pacientovi udržiavať požadovanú polohu a tiež vykonávať časté zmeny držania tela s väčším pohodlím.

- **Horné vyvýšenie:** Podopiera chrbticu, keď používateľ sedí alebo leží. Pomáha bojovať proti refluxu, zlepšuje upchatý nos a zmierňuje dýchacie ťažkosti.
- **Dolné vyvýšenie:** Zmierňuje opuchy a nepohodlie pri unavených nohách a bolestiach nôh po úraze alebo v dôsledku kŕčových žíl.
- **Prevencia preležanín:**
 - **Trochanter, krížová kosť a päty:** Odporúča sa poloha v bočnej polohe 30°.
 - **Malleoly, kondyly a kolená:** Odborníci odporúčajú abdukciu dolných končatín, aby sa uvoľnil tlak na kondyly, malleoly a kolená.
 - **Lakte a päty:** Odborníci odporúčajú úplne odľahčiť lakte a päty v polohe na chrbte. Pravidelné nakláňanie je prospešné pre krvný obeh.

Technické vlastnosti

- Neodnímateľný poťah
- Rozmery: 60 x 50 x 25 cm
- Vnútorňý materiál: penové jadro HR-20 s hustotou 25 kg/m³
- Vonkajší materiál: PU
- Čistá hmotnosť: 1520 g

Pokyny na starostlivosť:

V prípade potreby je možné poťah umyť utretím čistou, vlhkou handričkou s teplou vodou a jemným mydlom. Poťah nie je odnímateľný; jeho odstránenie by poškodilo vnútorné polstrovanie.

Nepoužívajte abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá ani alkohol.

- Keďže je z PU, nedá sa žehliť.
- Nevešajte za konce.
- Nie je možné prať v práčke, sušiť v sušičke a nežehliť.

Upozornenie - Bezpečnostné opatrenia

- Pred každým použitím sa uistite, že je výrobok v perfektnom stave.
- Keďže ide o horľavý výrobok, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani zdroju tepla.

Životnosť:

Životnosť výrobku je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania a pravidelnosťou údržby. Prísny dodržiavaním informácií uvedených v tomto návode na použitie je možné udržať výrobok v perfektnom stave 24 mesiacov.

Záruka

Na naše výrobky poskytujeme dvojročnú záruku proti výrobným chybám od dátumu vystavenia faktúry. Viac informácií nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach predaja.

Upozornenie:

Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s výrobkom musí byť nahlásený spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o., Polárna 6, 040 12 Košice, www.sanitaske.sk