



NÁVOD NA POUŽITIE
NAFUKOVACÍ BAZÉN NA UMÝVANIE VLASOV
REF 2331



Sucesores de Manuel García S.L.

CIF B12321162

Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain

Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com

www.garcia1880.com

Návod na použitie

URČENÉ POUŽITIE

Toaletná pomôcka pre pacientov s obmedzenou pohyblivosťou alebo pre pacientov, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko.

Toto umývadlo umožňuje správne umiestnenie ramien a hlavy. Ľahko sa nafúkne a umiestni sa pod hlavu pacienta. Je potrebná asistencia. Obsahuje drenážnu hadičku na odtok vody.

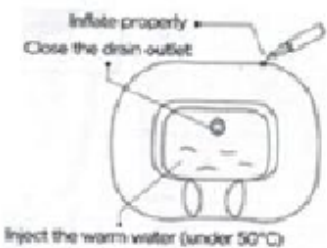
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Rozmery: 65 x 50 x 20 cm
- Materiál: PVC
- Vodný vak: 49,50 x 31 cm. Objem: 6 l

OBSAH BALENIA:

Bolsa de agua/Water Bag/ Sac d'eau 	Grifo/Sprinkler/ Douchette 
Tube/Tube/Tube 	Bombín/Pump/Pompe 

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Nafúknúť a naplniť 	2. Pripojte bazén k prívodu vody Závesný vak na vodu 	3. Pripravte si nádobu na vypustenie vody 
4. Otvorte kohútik na umývanie 	5. Vylejte vodu otvorením uzáveru a použitím nádoby 	

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pravidelne kontrolujte stav nafukovacieho bazéna, aby ste sa uistili, že sa správne nafúkne a že nedochádza k úniku.
- Teplota vody by mala byť vždy nižšia ako 50 °C.
- Keď sa bazén na umývanie vlasov nepoužíva, odporúča sa ho skladovať na čistom, suchom a uzavretom mieste, najlepšie v originálnom balení.
- Nevystavujte bazén na umývanie vlasov žiadnym zdrojom tepla.
- Nevykonávajte žiadne úpravy (mechanické zmeny) na výrobku, aby ste predišli ohrozeniu jeho bezpečnosti.

ODPORÚČANIA PRE STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBU

- Na čistenie používajte jemný čistiaci prostriedok a teplú vodu.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
- Po vyčistení sa odporúča osušiť čistou a suchou handričkou.
- Nevhodné na použitie v práčke alebo sušičke

ŽIVOTNOST'

Predpokladaná životnosť tohto výrobku je 2 roky za normálnych podmienok používania, bezpečnosti a údržby. Po uplynutí tejto doby sa výrobok môže používať, pokiaľ je v perfektných podmienkach používania a údržby. V každom prípade môže byť v dôsledku bežného opotrebenia potrebné vymeniť určité diely alebo komponenty produktu v kratšom čase ako je uvedené. Životnosť je ovplyvnená podmienkami používania a skladovania a pravidelnosťou údržby.

ZÁRUKA

Záruka je dvojročná od dátumu vystavenia faktúry. Počas záručnej doby bezplatne odstránime akúkoľvek výrobnú chybu, a to buď opravou, výmenou dielov alebo dodaním nového produktu, podľa nášho uváženia. Ak sa majiteľ produktu rozhodne pre opravu alebo výmenu, musí sa obrátiť na predajňu, ktorá bude ako jediná zodpovedná za správu záruky s výrobcom. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho používania alebo manipulácie s produktom, zhoršenia stavu produktu v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je voda alebo iné škodlivé chemikálie, obštrukčné alebo korozívne produkty, v dôsledku nedostatočnej údržby, nedostatočného čistenia, straty komponentov alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov našej značky. Viac informácií nájdete v našich všeobecných predajných podmienkach.

UPOZORNENIE

Ak spozorujete akýkoľvek nedostatok, anomáliu alebo poruchu, okamžite o tom informujte predajnú prevádzku alebo distribútora, aby vykonali výmenu alebo opravu.

Upozornenie:

Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s výrobkom musí byť nahlásený spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o., Polárna 6, 040 12 Košice, www.sanitaske.sk