



NÁVOD NA POUŽITIE
PODLOŽKA NA SEDENIE
REF 3059



Sucesores de Manuel García S.L.

CIF B12321162

Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain

Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com

www.garcia1880.com

Vankúš na sedenie

Podporný produkt na prevenciu dekubitov.

Klinovitý dizajn tohto vankúša na kostrč s výrezom v tvare U v hornej časti zabraňuje neustálemu tlaku a treniu na kostrči, čím poskytuje výraznú úľavu pri sedení. Je ideálny na dosiahnutie rovnomerného rozloženia tlaku a pomáha udržiavať držanie tela absorbovaním nárazov, reguláciou teploty a prevenciou nadmerného potenia.

Pre maximálnu účinnosť je dôležité ich správne umiestniť. Ich účelom je podprieť oblasť kostrče, čím sa zmierni tlak. Je optimálny na dosiahnutie homogénneho rozloženia tlaku a pomáha udržiavať držanie tela absorbovaním nárazov, reguláciou teploty a prevenciou nadmerného potenia.

Je veľmi dôležité ich správne umiestniť, aby boli úplne účinné. Jeho účelom je nechať oblasť kostrče vo vzduchu, aby sa uvoľnil tlak.

Technické vlastnosti / Technické vlastnosti

- Anatomický tvar
- Sivá farba
- 3D tkanina pre uľahčenie potenia / Priedušná 3D tkanina
- Materiál: Pamäťová pena
- Odnímateľný a prateľný poťah
- Rozmery: 46x35x6 cm
- Čistá hmotnosť: 0,500 kg

Starostlivosť o produkt - pokyny na pranie a sušenie

- Poťah by sa mal pravidelne prať ručne pri maximálnej teplote 30 °C s neutrálnym mydlom.
- Pena sa musí vetrať a nemala by byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla. Penu neperte v práčke, pretože by to mohlo poškodiť materiál a spôsobiť jej stratu pôvodného tvaru.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá ani alkohol.
- Nevešajte ju za konce.

Bezpečnostné opatrenia - Upozornenia:

Keďže ide o horľavý výrobok, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani žiadnym zdrojom tepla.

Kontraindikácie:

Neexistujú žiadne kontraindikácie pre používanie tohto výrobku.

Životnosť:

Životnosť výrobku je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania a pravidelnosťou jeho údržby. Prísny dodržiavaním informácií uvedených v tomto návode na použitie je možné udržať výrobok v perfektnom stave 24 mesiacov.

Záruka

Na naše výrobky poskytujeme záruku proti výrobným chybám dva roky od dátumu vystavenia faktúry. Viac informácií nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach predaja.

Upozornenie:

Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s výrobkom musí byť nahlásený spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o., Polárna 6, Košice, www.sanitaske.sk