

NÁVOD NA POUŽITIE ROZPERA NA NOHY SN-02/LLG

ÚČEL

Rozpera na nohy je určená pre osoby, ktoré potrebujú znehybnenie a stabilizáciu nôh voči sebe navzájom, pričom ich udržiava v rozkročenej polohe. Zabráňuje abdukciu, addukciu a rotáciu v bedrových kĺboch v pooperačnom období po poraneniach dolných končatín a podopiera nohy po celej ich dĺžke v správnej polohe bez toho, aby spôsobovala tlak.

VLASTNOSTI

Vyrobená z netoxickej a antialergickej polyuretánovej peny.

Rozmery:	veľkosť S:	31 x 46 cm
	veľkosť M:	36 x 56 cm
	veľkosť L:	41 x 64 cm

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistite mäkkou hadričkou nahlčenou v teplej vode a v jemnom čistiacom prostriedku. Po vyčistení dobre osušte. Neponárajte celú penu do vody.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte vlhký výrobok priamo v kontakte s pokožkou.

Nepoužívajte v prípade výskytu alergických kožných reakcií.

Nepoužívajte, ak dôjde k mechanickému poškodeniu výrobku (napr. prasknutie, roztrhnutie).

Nepoužívajte inak, ako je určené.

UPOZORNENIA

Pred použitím sa poraďte o vhodnosti, výbere výrobku a spôsobe použitia so zdravotníckym alebo rehabilitačným pracovníkom.

Výrobok by sa mal vyberať podľa veľkosti tela.

Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu ani iným zdrojom zapálenia

Pena sa pri vystavení otvorenému plameňu prudlo vznietí.

Nevystavujte výrobok nízkym teplotám (pod 5°C) po dlhšiu dobu. Obal výrobku nie je hračka

POZOR!

Nevystavujte výrobok dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu, pretože sa môže vplyvom slnečného žiarenia sfarbiť. Zmena farby peny nemá vplyv na fyzikálne a mechanické vlastnosti výrobku.

ZÁRUKA

Na predmet sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba. Musí sa používať v súlade s jeho určením a v súlade s pokynmi uvedenými v návode na použitie. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien. Výrobok musí byť do servisného strediska doručený čistý. V prípade neopodstatnenej reklamácie budú kupujúcemu účtované náklady na opravu a výmenu. Záruka sa poskytuje na základe dokladu o kúpe. Územná pôsobnosť záruky sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk