

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA / NÁVOD NA POUŽITIE

Držiak na dáždníky pre invalidné vozíky a chodítka

REF 2572



Výrobca: Foshan Kaiyang Medical Equipment Co., Ltd.

3 of No.21. 3rd Hongling Rd, Shishan Town, Foshan City, Guangdong Province, China

Schválil /EC/: SUNGO Europe B.V.

Fascinatia Blvd 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Netherlands

Dovozca: Sucesores de Manuel Garcia S.L

Ctra Segorbe Castellnovo Km 0, 12400 Segorbe, Castellón, Spain

NÁVOD NA POUŽITIE REF 2572

Držiak na dáždnik pre invalidné vozíky a chodítka

PREDPISY

Tento výrobok je zdravotnícka pomôcka triedy I a je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach.


Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom odpade. Na jeho likvidáciu sú určené zberné miesta. Pri likvidácii obalu a samotného výrobku prísne dodržiavajte zákonné predpisy vo vašej obci.

URČENÉ POUŽITIE

Držiak na dáždnik sa montuje na invalidné vozíky, chodítka a invalidné vozíky s vlastným pohonom, čo umožňuje používateľom uvoľniť obe ruky. Je vhodný pre trubky s priemerom 8 – 25 mm.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Otočte skrutku v tvare motýľa, aby ste otvorili sponu.
2. Pevne priskrutkujte sponu k rámu invalidného vozíka, chodítka alebo kočíka.
3. Nastavte dĺžku otáčaním vnútornej duše a uhol nastavte pomocou spony.
4. Nastavte dĺžku a uhol do najpohodlnejšej polohy. Vnútrnú trubicu je možné vysunúť až po značku „Stop Max“.
5. Otvorte hornú sponu a nainštalujte rukoväť dáždnika, potom rukoväť bezpečne utiahnite.

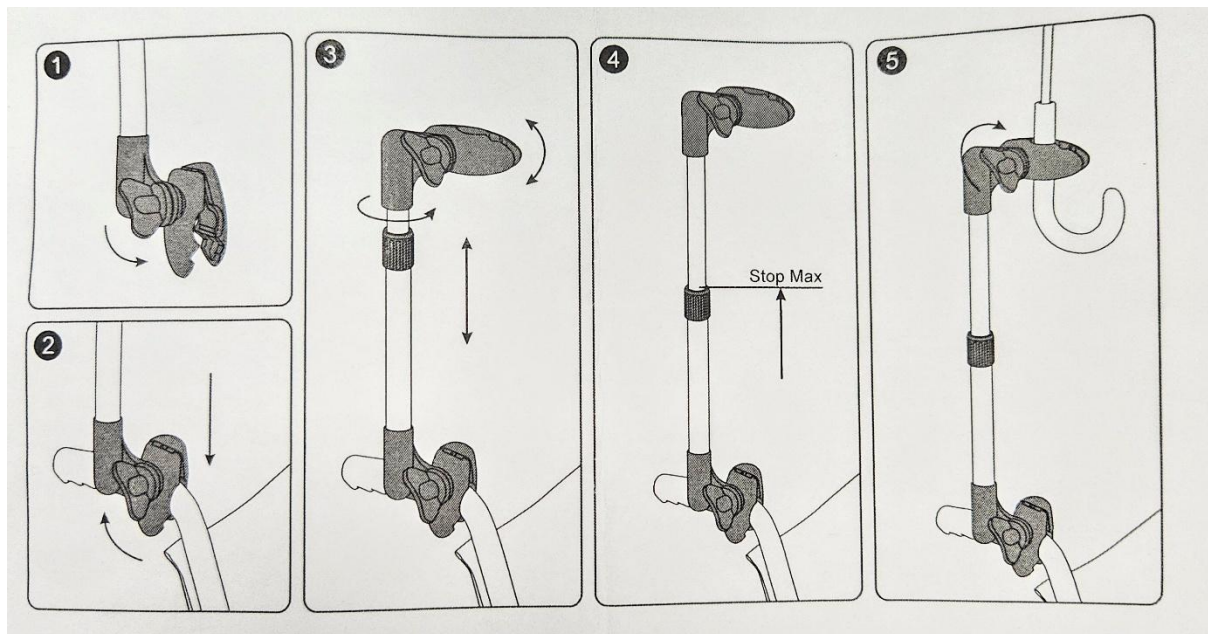

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pri otváraní dáždnika buďte opatrní.
- Nevyťahujte vnútornú trubicu za značku „Stop Max“.
- Uistite sa, že dáždnik vám pri používaní nezakrýva výhľad.
- Držiak na dáždnik by sa nemal používať vo veternom počasí.
- Držiak na dáždnik slúži na ochranu pred slnkom a dažďom a nemal by sa používať na iné účely.
- Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte držiak s bicyklom.
- Pred použitím sa uistite, že držiak a dáždnik sú bezpečne nainštalované.

ÚDRŽBA

Utrite dočista vlhkou handričkou.

ODPORÚČANIA PRE STAROSTLIVOSŤ A UMÝVANIE

- Pravidelne čistite a sušte. Nečistoty odstráňte mäkkou, vlhkou handričkou a jemným mydlom. Potom osušte.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne chemické čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť materiál výrobku.
- Tiež nepoužívajte mastné výrobky, ktoré môžu degradovať materiály alebo ich spôsobiť klzkosť.
- Ak výrobok nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste pri izbovej teplote.

ŽIVOTNOSŤ

Predpokladaná životnosť tohto výrobku je 2 roky za normálnych podmienok používania, bezpečnosti a údržby. Po uplynutí tejto doby sa výrobok môže používať, pokiaľ je v perfektnom prevádzkovom stave a správne udržiavaný. Výrobok však môže vyžadovať výmenu určitých častí alebo komponentov z dôvodu bežného opotrebenia v kratšom období, ako je uvedené. Životnosť produktu je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania a pravidelnosťou jeho údržby.

ZÁRUKA

Záruka je dvojročná od dátumu vystavenia faktúry. Počas záručnej doby bezplatne odstránime akúkoľvek výrobnú chybu, a to buď opravou, výmenou dielov alebo poskytnutím nového produktu, podľa nášho uváženia. Ak sa majiteľ produktu rozhodne pre opravu alebo výmenu, musí kontaktovať predajcu, ktorý bude výlučne zodpovedný za správu záruky s výrobcom. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho používania produktu, nesprávnej manipulácie, zhoršenia stavu produktu v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je voda alebo iné škodlivé, rušivé alebo korozívne chemikálie, nedostatočnej údržby, nedostatočného čistenia, straty komponentov alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov. Viac informácií nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach predaja.

UPOZORNENIE

- Ak spozorujete akýkoľvek nedostatok, anomáliu alebo poruchu, ihneď o tom informujte predajcu alebo distribútora, aby mohol byť produkt vymenený alebo opravený.
- Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s produktom musí byť nahlásený dovozcom.

DOVOZCA:

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.,

Polárna 6, 040 12 Košice,

t.č.: 055/62 229 25,

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk,

www.sanitaske.sk