

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA / NÁVOD NA POUŽITIE

Sprchovacia stolička otočná s kolieskami

REF 2203



Výrobca: Foshan Kaiyang Medical Equipment Co., Ltd.

3 of No.21. 3rd Hongling Rd, Shishan Town, Foshan City, Guangdong Province, China

Schválil /EC/: SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Blvd 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Netherlands

Dovozca: Sucesores de Manuel Garcia S.L

Ctra Segorbe Castellnovo Km 0, 12400 Segorbe, Castellón, Spain

Návod na použitie

Sprchovacia stolička otočná s kolieskami

PREDPISY

Tento výrobok je zdravotnícka pomôcka triedy I a je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach. Pri likvidácii obalu a výrobku prísne dodržiavajte zákonné predpisy vašej obce.

URČENÉ POUŽITIE

Pomôcka na umývanie a sprchovanie. Je to technická pomôcka, ktorá umožňuje osobám so zníženou pohyblivosťou alebo zdravotným postihnutím, ktoré nemôžu bežne používať sprchu, zostať počas kúpania sedieť.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s bielou povrchovou úpravou
- Otočné sedadlo o 360°
- Výška sedadla: 50 až 60 cm
- Celková výška: 87 až 97 cm
- Rozmery základne: 33 x 43 cm
- Celková výška: 85 až 95 cm
- Celková šírka: 56 cm. Vnútoraná šírka podrúčk: 50 cm
- Sedadlo: šírka 40 cm x hĺbka 35 cm
- Hmotnosť výrobku: 5,8 kg
- Maximálna nosnosť: 100 kg

SPRÁVNE POUŽITIE

- Kolieska sú vyrobené z ocele. Po každom použití ich treba vysušiť, aby sa predišlo hrdzaveniu.
- Tento výrobok by sa mal používať pod dohľadom člena rodiny, lekára, fyzioterapeuta alebo zdravotnej sestry.
- Pre zaistenie stability by sa mal používať iba v interiéri, na rovnom povrchu.
- Nepoužívajte stoličku na schodoch alebo eskalátoroch.
- Stolička by nemala niesť viac ako jednu osobu ani ďalšie bremená.
- Tento výrobok je určený len na lekárske účely a nemožno ho používať ako bežný nábytok.
- Neprekračujte maximálnu nosnosť.
- Nevykonávajte žiadne úpravy (mechanické zmeny) na výrobku, aby ste predišli ohrozeniu jeho bezpečnosti.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Vždy sedzte vzpriamene a rovno, aby ste predišli riziku prevrátenia a pošmyknutia.
- Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky pevne utiahnuté a bezpečné.
- Neprekračujte maximálny hmotnostný limit.

KONTRAINDIKÁCIE

Táto stolička nie je vhodná pre osoby s ťažkým zmyslovým postihnutím, poruchami rovnováhy alebo neschopnosťou sedieť vzpriamene.

ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte stav koliesok. Ak je potrebné ich vymeniť, kontaktujte svojho predajcu.
- Pravidelne kontrolujte skrutky a matice. Ak je potrebné ich vymeniť, kontaktujte svojho predajcu.
- Skontrolujte funkčnosť brzd koliesok a uistite sa, že sa dajú ľahko zaistiť a že pánty nie sú opotrebované.
- Nevykonávajte žiadne úpravy (mechanické zmeny), aby ste predišli ohrozeniu bezpečnosti používania.

ODPORÚČANIA NA OCHRANU A UMÝVANIE

- Konštrukcia a kolesá sú vyrobené z ocele. Po každom použití by sa mali vysušiť čistou suchou handričkou, aby sa zabránilo hrdzi.
- Je možné, že ak výrobok po každom použití nevysušíte, môže sa objaviť hrdza. Ak je to tak, overte si u svojho inštalatéra, či je vhodné vymeniť skrutky.
- Na čistenie použite neutrálny čistiaci prostriedok a horúcu vodu. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
- Nepoužívajte materiály, ktoré by mohli poškriabať konštrukciu.

ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU

Životnosť výrobku je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania a pravidelnosťou jeho údržby. Pri prísnom rešpektovaní údajov uvedených v tomto návode na obsluhu je možné udržiavať výrobok v perfektnom stave po dobu 24 mesiacov.

ZÁRUKA

Záruka je po dobu dvoch rokov od dátumu predaja, pokiaľ produkt nebol zmenený v pôvodnej konfigurácii. V rámci záručnej doby bezplatne opravíme akúkoľvek výrobnú chybu buď opravou, výmenou dielov alebo poskytnutím nového produktu podľa nášho uváženia. Ak sa chce vlastník produktu rozhodnúť pre opravu alebo výmenu, musí ísť do maloobchodnej prevádzky, ktorá bude ako jediná zodpovedná za správu záruky s výrobcom. Táto záruka nebude platná v prípade nesprávneho používania výrobku, nesprávnej manipulácie s ním, v dôsledku znehodnotenia výrobku vonkajšími činiteľmi, ako je voda alebo iné škodlivé chemické, obštrukčné alebo korozívne produkty, v dôsledku nedostatočnej údržby, nedostatočného čistenia, straty komponentov alebo používania neoriginálnych náhradných dielov značky. Pre viac informácií si pozrite naše všeobecné podmienky predaja.

UPOZORNENIE

Ak spozorujete akýkoľvek nedostatok, anomáliu alebo poruchu, ihneď informujte predajňu alebo svojho distribútora, aby mohol byť vymenený alebo opravený.

Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s produktom musí byť nahlásený dovozcovi.

DOVOZCA:

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.,
Polárna 6, 040 12 Košice
t.č.: 055/62 229 25,
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk,
www.sanitaske.sk