

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA / NÁVOD NA POUŽITIE

Hliníkový invalidný vozík

REF 2242



Výrobca: Foshan Kaiyang Medical Equipment Co., Ltd.

3 of No.21. 3rd Hongling Rd, Shishan Town, Foshan City, Guangdong Province, China

Schválil /EC/: SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Blvd 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Netherlands

Dovozca: Sucesores de Manuel Garcia S.L

Ctra Segorbe Castellnovo Km 0, 12400 Segorbe, Castellón, Spain

Návod na použitie

HLINÍKOVÝ INVALIDNÝ VOZÍK

PREDPISY

Tento výrobok je zdravotnícka pomôcka triedy I a je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach.

Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom odpade. Na jeho likvidáciu sú určené zberné miesta. Pri likvidácii obalu a samotného výrobku prísne dodržiavajte zákonné predpisy vo vašej obci.

URČENÉ POUŽITIE

Asistenčný výrobok, ktorý poskytuje mobilitu na kolieskach a oporu tela ľuďom s obmedzenou schopnosťou chôdze.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Hliníkový rám. Nylonové čalúnenie.
- Skladacie podrúčky, neskladacie, neodnímateľné opierky nôh.
- Skladací invalidný vozík s rukoväťami na prenášanie a brzdami.
- Otočné predné pevné kolesá (150 mm)
- Zadné pevné kolesá (500 mm) s blokovacím mechanizmom.
- Výška sedadla: 46 cm
- Rozmery sedadla: 44 x 38 cm
- Celková šírka: 61 cm
- Celková hĺbka: 100 cm
- Výška rukoväte: 90 cm
- Maximálna hmotnosť používateľa: 100 kg
- Čistá hmotnosť: 11,5 kg

SPRÁVNE POUŽITIE

- Pred použitím stoličky sa odporúča naučiť techniky vstávania, sadnutia si a chôdze po schodoch a rampách.
- Brzdy musia byť zablokované, keď si používateľ sadá alebo vstáva z invalidného vozíka.
- Invalidný vozík by sa nikdy nemal poháňať na zadných kolesách.
- Nechoďte hore ani dole po schodoch bez pomoci.
- Neodporúča sa predkláňať sa (na zaväzovanie šnúrok, zdvíhanie niečoho z podlahy atď.), pretože používateľ by mohol spadnúť.
- Invalidný vozík by sa nikdy nemal nosiť za podrúčky, pretože by to mohlo poškodiť rám invalidného vozíka. Skontrolujte, či sú podrúčky správne umiestnené.

Opierky na nohy musia byť aspoň 65 mm od zeme, aby sa predišlo pádom.

Invalidný vozík sa musí vždy používať na určený účel. Nesmie sa používať na žiadny iný účel. Napríklad sa nesmie používať ako hračka, na podopretie predmetov, na prepravu viacerých osôb atď.

Na vozíku nerobte žiadne úpravy (mechanické zmeny), aby ste predišli ohrozeniu jeho bezpečnosti.

Vždy rešpektujte maximálny nosný limit invalidného vozíka.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Nepoužívajte výrobok, ak je na ňom viditeľná chyba. V prípade chýbajúcich, nesprávne namontovaných alebo poškodených častí sa poraďte s lekárnikom alebo distribútorom.
- Nepoužívajte eskalátory na premiestňovanie invalidného vozíka, keď používateľ sedí. Môže to spôsobiť vážne telesné zranenie.
- Nepokúšajte sa siahť po predmetoch v žiadnom z nasledujúcich prípadov:
 - Ak sa používateľ musí pohybovať dopredu na sedadle

- Ak ich používateľ musí zdvihnúť z podlahy

Po nastavení opierky nôh je dôležité skontrolovať, či nastavená výška a sklon nespôsobujú trenie medzi zadnou časťou nôh a čalúnením stoličky.

KONTRAINDIKÁCIE

Používanie invalidných vozíkov nie je vhodné, ak používateľ trpí:

- Poruchami vnímania
- Závažnými poruchami rovnováhy
- Kĺbovými kontraktúrami alebo bolesťami kĺbov v oboch rukách
- Neschopnosťou sedieť

ODPORÚČANIA PRE STAROSTLIVOSŤ A UMÝVANIE

- Pravidelne čistite a sušte. Nečistoty odstráňte mäkkou, vlhkou handričkou a jemným mydlom. Potom osušte.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne chemické čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť materiál výrobku.
- Tiež nepoužívajte mastné výrobky, ktoré môžu degradovať materiály alebo ich spôsobiť klzkosť.
- Ak výrobok nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste pri izbovej teplote.

ŽIVOTNOSŤ

Predpokladaná životnosť tohto výrobku je 2 roky za normálnych podmienok používania, bezpečnosti a údržby. Po uplynutí tejto doby sa výrobok môže používať, pokiaľ je v perfektnom prevádzkovom stave a správne udržiavaný. Výrobok však môže vyžadovať výmenu určitých častí alebo komponentov z dôvodu bežného opotrebenia v kratšom období, ako je uvedené. Životnosť produktu je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania a pravidelnosťou jeho údržby.

ZÁRUKA

Záruka je dvojročná od dátumu predaja za predpokladu, že produkt nebol zmenený oproti svojej pôvodnej konfigurácii. Počas záručnej doby bezplatne odstránime akúkoľvek výrobnú chybu, a to buď opravou, výmenou dielov alebo poskytnutím nového produktu, podľa nášho uváženia. Ak sa majiteľ produktu rozhodne pre opravu alebo výmenu, musí kontaktovať predajcu, ktorý bude výlučne zodpovedný za správu záruky s výrobcom. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho používania produktu, nesprávnej manipulácie, zhoršenia stavu produktu v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je voda alebo iné škodlivé, rušivé alebo korozívne chemikálie, nedostatočnej údržby, nedostatočného čistenia, straty komponentov alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov. Viac informácií nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach predaja.

UPOZORNENIE

- Ak spozorujete akýkoľvek nedostatok, anomáliu alebo poruchu, ihneď o tom informujte predajcu alebo distribútora, aby mohol byť produkt vymenený alebo opravený.
- Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s produktom musí byť nahlásený spoločnosti

DOVOZCA:

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.,

Polárna 6, 040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk