

PLNĚ VIRUCIDNÍ



ALKOHOLOVÝ PŘÍPRAVEK
K PŘÍMÉMU POUŽITÍ

ŠIROKÉ SPEKTRUM
ÚČINNOSTI BĚHEM
1 MINUTY

BEZ OBSAHU ALDEHYDŮ
A ALKYLAMINŮ

Meliseptol[®] rapid

CÍLENÁ RYCHLÁ DEZINFEKCE



Meliseptol® rapid

CÍLENÁ RYCHLÁ DEZINFEKCE

Širokospektrý dezinfekční prostředek na neinvazivní zdravotnické prostředky, jako např. vyšetřovací křesla, pracovní plochy nebo vybavení operačních sálů.

VLASTNOSTI:

- Snadné použití otřením, případně postříkáním
- Mimořádně rychlý účinek: během 1 minuty
- Široké spektrum účinnosti: baktericidní, účinný na obalené i neobalené viry, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní
- Příjemná vůně
- Bez obsahu aldehydů a alkylaminů
- Zalistován v seznamech DGHM, VAH, IHO-viruzide*
- Dermatologicky testován

SLOŽENÍ:

100 g roztoku obsahuje: 50,0 g propan-1-olu, 0,075 g didecyldimethylamoniumchloridu
Pomocné látky: 5% neionogenních tenzidů, parfém, purifikovaná voda.

NÁVOD K POUŽITÍ

Meliseptol® rapid nalijte z láhve na jednorázovou utěrku a otřete povrch tak, aby byl plně smočen. Nebo postříkejte povrch, zejména obtížně dostupná místa sprejem. Dbejte na dokonalé smočení celého dezinfikovaného povrchu. Nechte působit min. 1 minutu. Nechte zaschnout, neutírejte do sucha. Pokud dezinfikujete elektrické zařízení, nejdříve jej vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout. Jestliže to není z provozních důvodů možné, ujistěte se, že nemůže dojít k zapnutí zařízení během dezinfekce. Před použitím na povrchy z materiálů citlivých vůči alkoholům vyzkoušejte jejich kompatibilitu s Meliseptol® rapid.

Meliseptol® rapid	Katalog. č.
Láhev 250 ml spray	19047
Láhev 1 000 ml	19048
Kanistr 5 l	19049

Upozornění: Používejte dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě nebo na informačním listu.



B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz

*
DGHM – Německá Společnost pro hygienu a mikrobiologii
VAH – Společnost aplikované hygieny
IHO – virucide-liste.de