



NOVINKA



ZAŽITE ZNOVU  
POCIT SLOBODY

## Diveen®

Prvá intravaginálna pomôcka  
na riešenie ženskej stresovej inkontinencie

# Diveen®

## Uľahčite si každodenný život

Stresovou inkontinenciou moču trpia milióny žien po celom svete. V Českej republike sa s týmto problémom stretáva asi 300 tisíc žien.

Privádza vás do rozpakov smiech, účasť na večierku alebo športovanie?

Únik moču môže ovplyvniť vaše každodenné aktivity. Môže vám zabrániť v mnohých veciach, ktoré máte rada.

Nedopusťte, aby vás tento problém premohol.



---

Zvoľte si diskretnú ochranu.

Vyberte si Diveen®.

---

**Diveen® je prvá a naozaj inovatívna intravaginálna pomôcka pre ženy trpiace únikom moču z dôvodu stresovej inkontinencie.**

- Unikátny a patentovaný mechanizmus s klinicky potvrdenou účinnosťou znižuje únik moču až o 69 %.
- Zavádza sa bezpečne a rovnako jednoducho ako tampón. Počas dňa ju nie je nutné vyberať ani pri použití toalety.



- Poskytuje 100% diskretnú ochranu až na 12 hodín.
- Dostupná v dvoch veľkostiach S a M.
- Bio kompatibilný materiál.
- Aplikátor je súčasťou každého balenia.
- Voľne predajná v lekárňach.


# Diveen®

## Inovatívny a patentovaný koncept<sup>2</sup>

Pomôcka Diveen® je navrhnutá tak, aby podporila stenu pošvy v oblasti pod hrdlom močového mechúra.

Pri fyzickej námahe, kašli alebo smiechu dochádza k náhlemu zvýšeniu vnútrobrušného tlaku, ktorý sa prenáša cez mechúr na pružný krúžok.


Pevná časť pomôcky sa tak posunie nahor, podoprie močovú trubicu a výrazne zníži riziko úniku moču.<sup>1</sup>

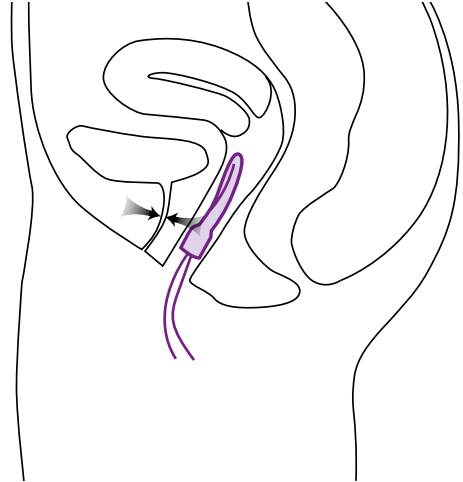

## Diveen® aplikátor

Vonkajšia trubička aplikátora

Vnútrotná časť aplikátora

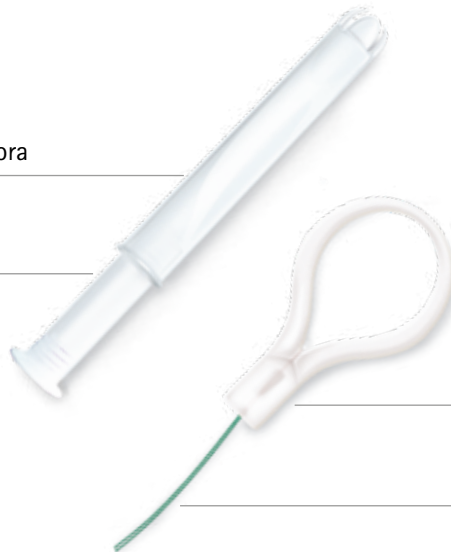

Diveen®

Krúžok

Pevná časť

Šnúrka na vybratie


# Ako pomôcku Diveen® používať

## 1. Pred použitím pomôcky

- Umyte si ruky.
  - Zaujmite pohodlnú polohu.
- 


## 2. Príprava pomôcky

- Jemne zovrite krúžok pomôcky a zasuňte ho do vonkajšej trubičky aplikátora.
- Nasadte vnútornú časť aplikátora späť do trubičky aplikátora. Pomôcka Diveen® je teraz pripravená na zavedenie.

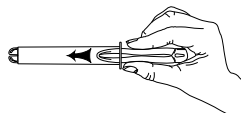

## 3. Zavedenie pomôcky

- Zasuňte vonkajšiu trubičku aplikátora do pošvy.
- Jemným tlakom na vnútornú časť aplikátora zavedte pomôcku čo najhlbšie do pošvy (podobne ako pri menštruačnom tampóne).

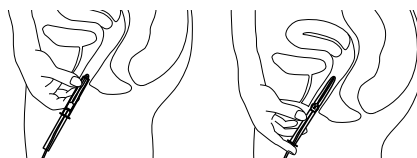

## 4. Vybratie pomôcky

- Zľahka zatiahnite za šnúрку a pomôcku vyberte z pošvy.



# Diveen®

## Informácie k objednávaníu

Produkt si môžete zakúpiť vo vybraných českých internetových lekárňach (pilulka.cz), e-shopoch (inkospor.cz) alebo v sieti predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok Zelená hviezda (zelenahviezda.sk).

Kompletný prehľad predajcov nájdete na [diveen.cz](http://diveen.cz), prípadne [heureka.sk](http://heureka.sk).

Ak si nie ste istá správnu veľkosťou, odporúčame kúpiť si skúšobné balenie, ktoré obsahuje obidve veľkosti.



Obsah balenia	Veľkosť	Katalóg. číslo
5 pomôcok + 1 aplikátor	malá	3132U
	stredná	3133U
Test set: 1 + 1 + aplikátor	malá + stredná	3025U

Odporúčaná maloobchodná cena je 24,99 €  
Test set je možné zakúpiť za 6,40 €

## Diveen linka B. Braun

**Chcete zistiť, či je pre vás  
pomôcka Diveen® vhodná?**

Radi vám poradíme počas  
pracovných dní od 9:00  
do 16:00.



**Mgr. Olga Panenková**  
Zdravotná sestra  
a edukačná špecialistka

[diveen.cz@bbraun.com](mailto:diveen.cz@bbraun.com)  
**+420-777 363 343**

## Skúsenosti používateľiek

„S Diveen® som sa mohla prechádzať  
po milovanom blšom trhu a nič ma  
nenútilo zúfalo hľadať najbližšiu  
toaletu. Bolo to úžasné.“

Danuše

„Pomôcka Diveen® bola pre mňa  
prekvapením. Vyskúšala som ju a je  
to bomba. Som s ňou zatiaľ veľmi  
spokojná.“

Kateřina

Viac na [diveen.cz](https://diveen.cz)



**ZELENÁ HVIEZDA**

Váš dodávateľ zdravotníckych prostriedkov



**Diveen linka B. Braun**

**+420-777 363 343**

Prevádzka patientskej linky počas pracovných dní v čase 9–16 hod.



Viac informácií nájdete  
na webových stránkach

**[www.diveen.cz](http://www.diveen.cz)**

B. Braun Medical s.r.o. | Divízia OPM | Hlučínska 3 | 831 03 Bratislava | Slovenská republika  
Tel. +421-2-638 38 920 | [info@bbraun.sk](mailto:info@bbraun.sk) | [www.bbraun.sk](http://www.bbraun.sk)

#### Literatúra

- 1 Cornu JN, et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized control trial. International Urogynecology Journal. 2012;23(12):1727-1734.

- 2 Brevet EP. 1 924 218 B1.