

ZÁRUČNÝ LIST
TGR-R RA 882
Chodítko rehabilitačné
4-kolesové

Prevedenie: Chodítko 4-kolesové	Zákazník:
TGR-R RA 882	
Výrobné číslo:	
Doplnky:	Telefón:
	Zdravotná poisťovňa:
Kontroloval:	

Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na skryté vady materiálu a výrobné chyby. Nevzťahuje sa na diely, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu, na škody, ktoré vznikli dôsledkom nadmerného namáhania, nesprávnej údržby, násilného poškodenia nekvalifikovaným zásahom alebo neautorizovanými zmenami konštrukcie. Zmeny v rámci modulového systému môže vykonať iba výrobca alebo výhradný dovozca, pričom musia byť použité originálne a schválené náhradné diely.

Výrobca si vyhradzuje možnosť vykonanie zmien z dôvodu technického zlepšenia modifikácie dizajnu.

UPOZORNENIE:

Pri nároku na bezplatnú záručnú opravu sa obráťte vždy na Vášho autorizovaného predajcu – dodávateľa, u ktorého ste pomôcku získali s týmto vyplneným a potvrdeným záručným listom. V opačnom prípade strácate nárok na bezplatnú opravu.

Záručný a pozáručný servis:

REVO – MAT, s.r.o.

Nikola Teslu 28

921 01 Piešťany

Tel/fax.: 032 776 2949,033 381 3034

Mob.: +421 917 666 725

+421 907 951 707

e-mail: revomat.servis@gmail.com

matus.bubak@rehacare.sk

Vydal:

Dňa:

.....
Pečiatka a podpis

Popis a návod na používanie
Chodítko rehabilitačné 4-kolesové

TGR-R RA 882

Výrobca:

Timago International Group
Spółka z.o.o. i Spółka komandytowa
Ul.Karpatska 24/12
43 316 Bielsko-Biala
Poľsko



Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku:

REHA-CARE, s.r.o.
M.R. Štefánika 1790/101
922 03 Vrbové



Návod na používanie

Chodítko slúži ako pomôcka na uľahčenie pohybu telesne postihnutých a chorých osôb vo vonkajšom a vnútornom prostredí. Chodítko sa používa tým spôsobom, že sa rukami uchytíme rukoväť chodítka, ktoré sú výškovo nastaviteľné.

K regulácii rýchlosti slúžia dve brzdy, ktoré sú spojené lankom s ovládacími páčkami, ktoré sú umiestnené v rukoväti.

1. ROZLOŽENIE CHODÍTKA

* Postavte chodítko pred seba v smere pohybu.

Zabrzďte parkovacie brzdy.

* Nakloňte chodítko k sebe, aby boli vodiace kolieska odľahčené a zatlačte súčasne ľahko rukoväť smerom nadol.

*Zatlačte plochou dlane na priečnu výstuhu

2. ZLOŽENIE CHODÍTKA

* Zopakujte prvé dva kroky.

*Uchopte jednou rukou chodítko za rukoväť.

* Potom uchopte priečnu výstuhu a dvíhajte ju jednoducho smerom nahor.

3. NASADENIE KOŠÍKA

* Košík nasádzate pri rozložení a zabrzdenom chodítku.

* Koš zavesíte do držiakov na prednej trubke rámu chodítka.

4. NAMONTOVANIE PLASTOVÉHO PODNOSU

* Podnos položíme zhora na sedadlo tak, aby sa štyri plastové nožičky zasunuli do otvoru sedadla.

5. NASTAVENIE RÚČIEK

* Výšku rúčiek nastavujeme pri rozložení a zabrzdenom chodítku.

* Na trubkách uvoľníme plastové skrutky tak, aby sa dali voľne pohybovať.

* Nastavte správnu výšku rúčiek / najlepšie do výšky zápästí /.

6. BRZDY

* Počas jazdy zabrzďte ťahom páky, ktorá je umiestnená pod rukoväťami, smerom nahor.

* Uvoľnením páky odbrzdíte.

* Zatlačením oboch pák pod rukoväťami chodítka smerom nadol chodítko zabrzdíte.

* Odbrzdíme uvoľnením obidvoch pák do strednej polohy.

7. KOLESÁ

* Na chodítku sú polyuretanové kolieska veľkosti 6"x 1

POZOR ! Bezpečnostné pokyny.

Maximálna nosnosť **110 kg**

Jazda iba na rovnom a vodorovnom podklade !

Pozor na značku minimálneho zasunutia trubky vodička !

Každá z brzd pôsobí iba na jedno koleso !

K čisteniu nepoužívajte agresívne alebo iné leptajúce čistiace prostriedky !

Dĺžka chodítka	66 cm
Šírka chodítka	60 cm
Výška sedadla	50 cm
Zložené	30 cm
Hmotnosť	7,5 kg
Výška rúčiek	75 – 85 cm

Údržba chodítka

Na čistenie kostry chodítka a sedačky je možné použiť bežné saponátové prípravky. Jedenkrát ročne je nutné premazať ložiská a brzdy silikónovým olejom.

Záručné a pozáručné opravy		
Popis závady	Dátum	Pečiatka a podpis