

NÁVOD NA POUŽITIE

HF6001 + HF62012 pneumatický zdravotný matrac GABI s variabilným tlakom a pumpou

Matrac HF6001

Špecifikácia:

Maximálna hmotnosť používateľa: 130 kg

Rozmery matraca: 200 x 90 x 7 cm

Materiál: PVC (polyvinylchlorid) 0,3 mm

Farebný odtieň: béžová

Hmotnosť matraca: 1,8-2,1 kg

Počet komôr matraca: 30

Záruka: 24 mesiacov

Pumpa HF62012

Špecifikácia:

Vzduchový výkon: 5-7 l/min

Rozsah tlaku: 50-120 mmHg

Elektrické napájanie:

220V/50Hz

Kapacita: 5-7 l/ min.

Trieda II ochrany proti úrazu
elektrickým prúdom

Poistky: 1A

Spotreba energie: 7W

Rozmery: 7,5 mm: 23,5 (D) x 12 (V) x 9,5 (Š) cm

Záruka: 24 mesiacov

Výrobca:

FOS HAN HONGFENG CO.,LTD

No.4-2 Leqiang Road, Leping, Sanshui, Foshan District, Guangdong Province, Čína

TECHNOLOGY OF KOREA

MEDICÍNSKE ZARIADENIE

Verzia: 1.0/06/2021

**MedNet EC-REP GmbH**

Borkstrasse 10 48163 Muenster, Nemecko

Spôsob prevádzky

- Systém variabilného tlaku s vhodnou frekvenciou pomáha zabrániť dlhodobému stláčaniu ciev, ktoré môžu spôsobiť hypoxiu tkaniva.
- Systém zmeny tlaku umožňuje prispôbiť matrac pacientovi a jeho polohe.

Pokyny na používanie

Tradične uznávanou metódou prevencie vzniku tlakových vredov - dekubitov je pravidelné otáčanie pacienta a pozorovanie rizikových oblastí.

Používanie matraca s variabilným tlakom dopĺňa túto liečbu. Zároveň v prípade potreby treba otáčanie a pozorovanie pacienta stále považovať za súčasť starostlivosti o pacienta.

Určené použitie:

- pre pacientov, ktorí pravdepodobne trávajú na lôžku viac ako 15 hodín denne
- pre pacientov so stredným alebo vysokým rizikom vzniku tlakových vredov - dekubitov

Inštalácia a používanie

1. Rozbaľte matrac.
2. Umiestnite matrac na posteľ.
3. Umiestnite ho na posteľ pomocou držiadiel.
4. Umiestnite pumpu na rám postele pomocou háčikov pri nohách pacienta.
5. Pripojte matrac k pumpe pomocou hadičiek, ktoré zodpovedajú príslušným zásuvkám.
6. Pripojte pumpu k napájacímu káblu priradením príslušných zásuviek.
7. Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky.
8. Stlačením spínača spustíte pumpu.
9. Pred uložením pacienta na matrac počkajte, kým sa matrac úplne nenafúkne.
10. Nastavte tlak na príslušnú úroveň.

Bezpečnostné opatrenia

- Pri manipulácii s elektrickým zariadením buďte opatrní.
 - Keď sa výrobok nepoužíva, vytiahnite ho zo siete.
 - Nevystavujte elektrické zariadenie nadmernej vlhkosti.
 - Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, ako sú priemyselné odmasťovače alebo octové rozpúšťadlá.
 - Nepokúšajte sa premiestňovať zariadenie, keď je pripojené k zdroju napájania.
- Akýkoľvek závažný incident súvisiaci so zariadením treba nahlásiť výrobcovi.

Čistenie / dezinfekcia

Pumpa:

Pozor!

Pred čistením odpojte čerpadlo od elektrickej siete. Používajte handričku namočenú v jemnom roztoku čistiaceho prostriedku. Dodržiavajte koncentrácie roztoku odporúčané výrobcami.

Pred použitím čistiaceho roztoku dodržiavajte odporúčania výrobcu.

Používajte handričku namočenú v čistiacom roztoku alebo dezinfekčnom prostriedku s označením CE v súlade s koncentraciami a dobou použiteľnosti odporúčanými výrobcom.

Údržba

Údržbu pumpy smie vykonávať iba dovozcom autorizovaný a vyškolený technik.

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Poľsko
tel. 48 22 59 40 300
fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.
Polárna 6
040 12 Košice
t.č.: 055/62 229 25
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk
www.sanitaske.sk