

Infračervená lampa SYMPLEE AK-2012-R 300W

Predstavenie výrobku a návod na obsluhu



SYMPLEE AK-2012-R 300W

Predstavenie produktu Infračervená lampa SYMPLEE AK-2012-R 300W

Infračervená lampa **SYMPLEE AK-2012-R** poskytuje účinnú úľavu od bolesti svalov a kĺbov. Jeho 300W infračervené teplo je veľmi príjemné a preniká hlboko do pokožky, čím stimuluje krvný obeh.

Účinky infračervenej lampy

Infračervená lampa SYMPLEE AK-2012-R dokáže preniknúť hlboko do pokožky a zohriať tkanivá. Teplo moduluje nervové signály do mozgu, a tým znižuje bolesť. Teplo tiež stimuluje krvný obeh a rozširuje cievy, čo urýchľuje prenos látok potrebných na obnovu a výživu telesných tkanív. Okrem toho infračervená lampa urýchľuje proces látkovej výmeny a odstraňovania odpadových látok z tela. Keďže teplo robí tkanivo poddajnejším, znižuje tiež stuhnutosť a robí kĺby pružnejšími. Vďaka týmto účinkom môže tréning s infračervenou lampou dočasne zmierniť bolesť spôsobenú infračerveným žiarením.

Bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvá

- ◆ Voda a elektrina sú nebezpečnou kombináciou!
- ◆ Nepoužívajte tento spotrebič vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni alebo v blízkosti sprchy či bazéna).
- ◆ Nenechávajte vodu vtekať do spotrebiča ani ju naň nelejte.

Upozornenie

- ◆ Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá napätiu miestnej elektrickej siete.
- ◆ Ak je sieťový kábel poškodený, musíte ho nechať vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku výrobcu alebo v podobne kvalifikovanom servise. osoba, aby sa vyhla nebezpečenstvu.
- ◆ Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru.
- ◆ Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- ◆ Tento spotrebič nie je určený na používanie deťmi. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

- ◆ Tento prístroj je určený na liečbu bolesti svalov a kĺbov a svalovej a kĺbovej stuhnutosti, nie na liečbu bolesti brucha, tváre alebo iných typov bolesti.

- ◆ Aby ste zabránili prehriatiu pokožky, vyhnite sa veľmi krátkym vzdialenostiam ošetrovania. Teplo by malo byť príjemné počas celého ošetrovania.
- ◆ Aby ste zabránili poškodeniu očí, nepozerajte sa do svetla lampy, keď je zapnutá.

Kľúčové vlastnosti

- zariadenie je vybavené rukoväťou na jednoduchú manipuláciu
 - lampa má plynulo nastaviteľný uhol sklonu
 - automatická ochrana proti prehriatiu
 - keramické infračervené sklo
 - 100 % blokovanie UV žiarenia
 - digitálny časovač 1 -15 min s automatickým vypnutím
 - automatické vypnutie pri páde alebo položení svietidla
 - 160 cm kábel
- ◆ Počas liečby nezaspávajte.
 - ◆ Bezprostredne po ošetrovaní zabráňte príliš rýchlemu ochladeniu ošetrovanej oblasti.
 - ◆ Ak spotrebič klesne pod uhlom $\geq 90^\circ$ C, lampa prestane pracovať, zatiaľ čo chladiaci ventilátor stále pracuje a ochladzuje teplotu spotrebiča.
- Kontraindikácie liečby infračervenou lampou:
- Prístroj nepoužívajte bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom, ak trpíte závažnými ochoreniami, ako sú ochorenia srdca, akútne zápalové ochorenia, trombóza, poruchy krvácania, nedostatočnosť nadobličiek, systémový lupus erythematosus alebo rakovina.
- ◆ Zariadenie nepoužívajte, ak ste precitlivení na infračervenú lampu alebo ak máte opuch. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Zariadenie nepoužívajte, ak ste necitliví na infračervené žiarenie a teplo z dôvodu choroby (napr. pokročilá cukrovka) alebo užívate lieky proti bolesti. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Prístroj nepoužívajte, ak trpíte ochoreniami spojenými s demyelinizáciou nervov, ako je syndróm karpálneho tunela, skleróza multiplex a neuropatia lakťového nervu. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Prístroj nepoužívajte, ak máte implantovaný prístroj, najmä ak sa nachádza v blízkosti ošetrovanej oblasti. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Ak ste tehotná, nepoužívajte prístroj na ošetrovanie oblastí v blízkosti brucha alebo spodnej časti chrbta, aby nedošlo k prehriatiu týchto oblastí. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Zariadenie nepoužívajte, ak máte opuch alebo zápal, pretože teplo môže problém zhoršiť. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Prístroj nepoužívajte na poškodenú alebo podráždenú pokožku alebo na rany. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Keď je spotrebič zapnutý, nezakrývajte ho napríklad látkou alebo kusom odevu. Pred čistením alebo skladovaním nechajte spotrebič približne 15 minút vychladnúť.

◆ Ak ste práve plávali alebo ste sa sprchovali, nezabudnite sa osprchovať pred použitím prístroja si riadne osušte pokožku.

Ako používať infračervenú lampu SYMPLEE AK-2012-R

◆ Ak je zásuvka použitá na napájanie spotrebiča zle pripojená, zástrčka spotrebiča sa zahrieva. Uistite sa, že je spotrebič zapojený do správne pripojenej zásuvky.

◆ Spotrebič nevystavujte silným nárazom.

◆ Po použití a v prípade výpadku prúdu spotrebič vždy odpojte zo zásuvky.

◆ Umiestnite spotrebič na stabilný, rovný povrch.

◆ Uistite sa, že vzdialenosť medzi vaším telom a spotrebičom je dostatočne veľká, aby ste predišli nehodám.


◆ Vyberte vzdialenosť, pri ktorej je teplo príjemné, a ak je teplo príliš intenzívne, vzdialenosť zvýšte.

D: Ak chcete nastaviť smer svetelného lúča, nakloňte kryt svietidla dopredu alebo dozadu.

E: Posadte sa alebo si ľahnite do správnej vzdialenosti od spotrebiča. Vo vzdialenosti 30-40 cm od tela infračervená lampa pôsobí na plochu približne 40 cm x 30 cm (š x v). Pri väčších vzdialenostiach sa ošetrovaná oblasť zväčšuje, takže teplo z infračervenej lampy je menej intenzívne. Pri kratších vzdialenostiach je ošetrovaná oblasť menšia a teplo infračervenej lampy je intenzívnejšie.

Spotrebič sa dá používať rôznymi spôsobmi. Nižšie nájdete niekoľko príkladov.

◆ Ak chcete ošetriť boľavé ramená, krk alebo hornú časť chrbta, položte prístroj na stôl a nakloňte kryt lampy dozadu. Sadnite si na stoličku alebo kreslo chrbtom k lampe.

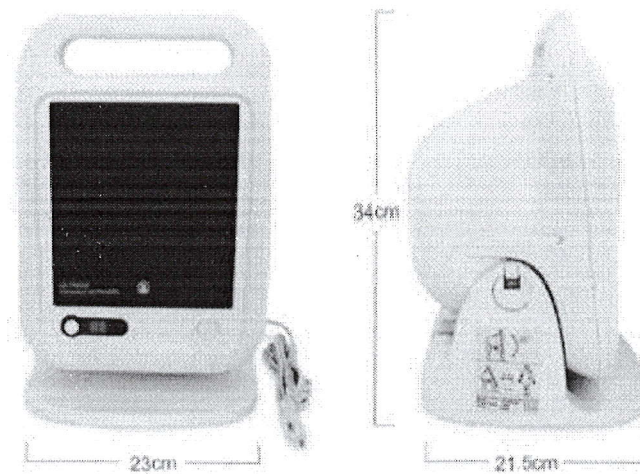

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Product Name | Infrared Lamp | | |
| Model | AK-2012-R | Power | 300W |
| Voltage | AC110-220V | Frequency | 50 Hz |
| Product Dimension | 230*215*340mm | Box Size | 275*275*385mm |
| Carton Size | 550X275X780mm | Unit Weight | 1.65KG |
| Package | 4 PCS/CARTON | Timer | 0-15mins |

SYMPLEE AK-2012-R 300W infračervená lampa

- ◆ Ak chcete liečiť bolesť spodnej časti chrbta, umiestnite prístroj na stôl vedľa stoličky. Sadnite si na stoličku alebo kreslo chrbtom k lampe.
- Ak chcete ošetriť boľavý lakeť, položte prístroj na stôl a sadnite si vedľa neho.
- ◆ Ak chcete ošetriť boľavé koleno, položte prístroj na nočný stolík a ľahnite si vedľa neho. Ľahnite si na posteľ a jednu nohu pritiahnite k lampe.

Po použití spotřebič vypnete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.

Trvanie liečby

Dĺžka liečby závisí od typu liečby a liečenej osoby. Ošetrovanie jedného svalu alebo kĺbu by malo trvať približne 15 minút. V prípade potreby sa liečba môže opakovať niekoľkokrát denne. Ošetrovanie dlhšie ako 15 minút nevedie k lepším výsledkom. Na dosiahnutie výsledkov môžete opakovať niekoľko ošetrení denne v po sebe nasledujúcich dňoch. Pri chronických problémoch sa zariadenie môže používať dlhší čas.

Čistenie a skladovanie výrobku

Čistenie:

A: Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete a nechajte ho približne 15 minút vychladnúť.

B: Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte drôtené handry, abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny, ako je benzín alebo acetón.

C: Vyčistite kryt a základňu lampy vlhkou handričkou. Nedovoľte, aby do spotrebiča tiekla voda.

D: Povrch spotrebiča môžete vyčistiť mäkkou handričkou potretou trochu metylovaného liehu.

Skladovanie:

A: Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcim povrchom spotrebiča.

B: Pred uskladnením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete a nechajte ho približne 15 minút vychladnúť. Spotrebič vždy zdvíhajte alebo prenášajte za rukoväť Infračervenú lampu skladujte na suchom mieste.

Špecifikácie:

- Značka.
- Model: AK-2012-R
- Digitálny displej
- Rozmery svietiacej plochy: 16 x 17 cm
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- Napájanie: 220 V AC sieť
- Výkon: 300 W
- Hmotnosť výrobku: 1,65 kg
- Rozmery výrobku: 225 x 225 x 340 mm