



1.0/10/2023

## NÁVOD NA POUŽITIE

**REHAFUND GABI Bioflote matrac pneumatický zdravotný HF6002+HF62012**



### **Spôsob účinku**

- Systém s premenlivou frekvenciou s vhodnou frekvenciou pomáha predchádzať dlhodobému tlaku na krvné cievy, ktorý môže spôsobiť hypoxiu tkaniva.
- Systém zmeny tlaku umožňuje prispôbiť matrac pacientovi a jeho polohe.

### **Pokyny na použitie**

Tradične uznávanou metódou prevencie dekubitov je pravidelné otáčanie pacienta a pravidelné sledovanie rizikových oblastí.

Túto úpravu dopĺňa použitie variabilného matraca. Zároveň musí byť otáčanie a pozorovanie pacienta v prípade potreby stále považované za súčasť starostlivosti o pacienta.

### **Určenie:**

- pre pacientov, ktorí pravdepodobne strávia viac ako 15 hodín denne v posteli
- pre pacientov so stredným alebo vysokým rizikom vzniku dekubitov

### **Inštalácia a použitie**

1. Rozviňte matrac.
2. Matrac položte na posteľ.
3. Položte ho správne na posteľ pomocou chlopní.
4. Umiestnite pumpu na rám postele pomocou hákov na nohách pacienta.
5. Pripojte matrac k pumpe pomocou hadíc, ktoré zodpovedajú príslušným výstupom.
6. Pripojte čerpadlo k napájacímu káblu zodpovedajúcim príslušným zásuvkám.
7. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
8. Stlačením spínača spustíte čerpadlo.
9. Pred umiestnením pacienta na matrac počkajte, kým sa matrac úplne nenafúkne.
10. Nastavte tlak na príslušnú úroveň.

### **Bezpečnostné opatrenia**

- Pri manipulácii s elektrickým zariadením buďte opatrní.
- Nenechávajte produkt zapojený, keď ho nepoužívate.
- Nevystavujte elektrické zariadenia nadmernej vlhkosti.
- Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, ako sú priemyselné odmasťovače alebo octové rozpúšťadlá
- Nepokúšajte sa premiestňovať zariadenie, keď je pripojené k zdroju napájania.

Akýkoľvek vážny incident týkajúci sa pomôcky sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a pacient bydlisko.

### **Čistenie/dezinfekcia**

Kompresor:

#### **Pozor!**

Pred čistením odpojte napájanie.

Použite handričku navlhčenú slabým roztokom čistiaceho prostriedku. Dodržiavajte koncentrácie roztokov odporúčané výrobcami.

Pred použitím čistiaceho roztoku dodržujte odporúčania výrobcu.

Použite handričku namočenú v roztoku čistiaceho prostriedku s označením CE alebo dezinfekčného prostriedku v súlade s koncentráciou a dobou použiteľnosti odporúčanou výrobcu.

### **Údržba**

Údržbu kompresora smie vykonávať iba technik autorizovaný a vyškolený dovozcom.

## **Matrac HF6002**

### **Špecifikácia:**

Max. nosnosť: 145kg  
Rozmery matraca: 190 x 85 x 11,5 cm  
Materiál: PVC, 0.45mm  
Farba: modrá  
Hmotnosť matraca: 5,5-6,5kg  
Počet komôr matraca: 17  
Záruka: 24 mesiacov

## **Kompresor HF62012**

Výstup vzduchu: 5-7 l/min  
Tlakový rozsah 50-120 mmHg  
Napájanie: 220V/50Hz  
Poistka 1A  
Spotreba energie: 7W  
Rozmery: DVH :23,5 x 12 x 9,5 cm  
Záruka: 24 mesiacov

### **VÝROBCA**

Reha Fund Sp. z o.o.  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Poľsko  
tel. 48 22 59 40 300  
fax. 48 22 59 40 307  
e-mail: [info@rehafund.pl](mailto:info@rehafund.pl)  
[www.rehafund.pl](http://www.rehafund.pl)

### **DOVOZCA**

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.  
Polárna 6  
040 12 Košice  
t.č.: 055/62 229 25  
e-mail: [sanitaske@sanitaske.sk](mailto:sanitaske@sanitaske.sk)  
[www.sanitaske.sk](http://www.sanitaske.sk)